

# TULSA-PRO<sup>®</sup>



Transurethrales  
Ultraschallablationssystem  
Benutzerhandbuch

*Philips Ingenia 3T und Ingenia Elition 3T*

## PROFOUND



# Verlagshinweis

**TULSA-PRO® SYSTEM**

Modellnummer: PAD-105

Benutzerhandbuch für Philips Ingenia 3T und Ingenia Elition 3T Dokumentennummer: 105993 REV C

Änderungskontrollnummer: CO-04613

**Veröffentlicht von:**



Profound Medical Inc.  
2400 Skymark Avenue, Unit 6  
Mississauga ON L4W 5K5  
Telefon: 647-476-1350  
Fax: 647-847-3739  
<http://www.profoundmedical.com>



**HANDLUNGSBEVOLLMÄCHTIGTER FÜR EUROPA:**

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Deutschland  
Tel.: +49 511 6262 8630  
Fax: +49 511 6262 8633  
[www.mdss.com](http://www.mdss.com)

Copyright © 2020 Mississauga, Kanada.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Profound Medical Inc. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln in elektronischer oder mechanischer Form oder durch Kopieren, Aufzeichnen oder auf eine andere Art und Weise vervielfältigt oder übertragen werden.



Nach US-amerikanischem Recht darf dieses Gerät nur durch einen Arzt oder auf dessen Anweisung verkauft werden.

# Inhaltsverzeichnis

<b>VERLAGSHINWEIS</b> .....	<b>2</b>
<b>INHALTSVERZEICHNIS</b> .....	<b>3</b>
<b>1. EINLEITUNG</b> .....	<b>7</b>
<b>2. ABKÜRZUNGEN</b> .....	<b>8</b>
<b>3. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN</b> .....	<b>9</b>
3.A VORGESCHLAGENES PERSONAL .....	9
3.B ÜBERSICHT ARBEITSABLAUF .....	10
3.C ANFORDERUNGEN AN ANWENDER, PERSONAL UND PATIENTEN .....	10
3.D INBETRIEBNAHME DES TULSA-PRO® SYSTEMS .....	11
<b>4. AUFNAHME UND VORBEREITUNG DES PATIENTEN</b> .....	<b>12</b>
<b>5. GERÄTEEINRICHTUNG</b> .....	<b>13</b>
5.A EINRICHTUNG IM MRT-RAUM.....	15
5.a.i Vorbereitung der Arbeitsoberfläche .....	15
5.a.ii Spulenhalterkonfiguration .....	15
5.a.iii Montage von Basisplatte und Kopfpolster .....	17
5.a.iv Anschließen des Positionierungssystems (PS).....	18
5.B EINRICHTUNG AUßERHALB DES MRT-RAUMS.....	18
5.b.i Vorbereiten des Systemwagens.....	18
5.b.ii Anschließen der Systemelektronik.....	20
5.b.iii Registrierung eines neuen Patienten an der MRT-Konsole .....	21
5.b.iv Vorbereiten der Behandlungskonsole (TDC).....	21
5.C DURCHFÜHREN VON GERÄTEKONTROLLEN VOR DER BEHANDLUNG IM MRT-RAUM .....	24
5.c.i Vorbereitung von UA und ECD .....	24
5.c.ii Gerätekontrollen vor der Behandlung.....	30
<b>6. PATIENTENPOSITIONIERUNG VOR DER BILDGEBUNG</b> .....	<b>34</b>
<b>7. EINFÜHREN DES GERÄTS</b> .....	<b>37</b>
7.A VORBEREITEN DES UA .....	37
7.B EINFÜHREN DES UA .....	38
7.C ANBRINGEN DES POSITIONIERUNGSSYSTEMS AM ULTRASCHALLAPPLIKATOR.....	38
7.D EINFÜHREN DES ECD .....	41
<b>8. PATIENTENPOSITIONIERUNG FÜR DIE MRT</b> .....	<b>43</b>
8.A FIXIEREN DES PATIENTEN .....	43
8.B GERÄTEKONTROLLE .....	48

8.C EINGABE DER „WICHTIGEN BEHANDLUNGSETAPPEN“ .....	48
<b>9. BEHANDLUNGSPLANUNG .....</b>	<b>50</b>
9.A BEGINN DER BILDGEBUNG .....	50
9.a.i Bewegen des Patienten in die Orientierungspunktposition .....	52
9.B GROBPOSITIONIERUNG .....	52
9.b.i Übertragen von Planungsbildern vom MRT zur TDC .....	53
9.C AUSRICHTUNG .....	54
9.D GROBPLANUNG .....	55
9.E DETAILPLANUNG .....	56
9.e.i Aufnahmen der Behandlungsplanungsbilder .....	57
9.e.ii Prostatagrenzen zeichnen .....	58
9.e.iii Leitlinien für die Behandlungsplanung .....	60
<b>10. VERABREICHUNG .....</b>	<b>62</b>
10.A STARTPOSITION UND DREHRICHTUNG .....	63
10.B INITIALISIEREN DER BEHANDLUNG .....	64
10.C VERABREICHUNG .....	66
10.c.i Anpassen der Strahlausrichtung während der Behandlung .....	67
10.c.ii Verabreichung pausiert .....	69
10.c.iii Bearbeiten der Prostatagrenze während der Behandlung .....	71
10.c.iv Erstellen eines neuen Behandlungssegments .....	72
10.c.v Verlaufs-Schieberegler .....	73
<b>11. BILDGEBUNG NACH DER BEHANDLUNG UND BERICHTE .....</b>	<b>75</b>
11.A BILDGEBUNG NACH DER BEHANDLUNG .....	75
11.B EINGABE DER „WICHTIGEN BEHANDLUNGSETAPPEN“ .....	75
11.C BEHANDLUNGSBERICHTE .....	76
11.c.i Anzeigen von Behandlungsvideos .....	78
11.c.ii Exportieren von Berichten und Videos .....	78
11.D EXPORT DER NACHBEHANDLUNGSSITZUNG .....	79
<b>12. ENTFERNEN DES GERÄTS UND PATIENTENERHOLUNG .....</b>	<b>81</b>
12.A REINIGUNG UND ENTSORGUNG .....	82
12.a.i Ultraschallapplikator (UA) .....	83
12.a.ii Endorektales Kühlgerät (ECD) .....	83
12.a.iii Flüssigkeitsschläuche .....	83
12.a.iv Positionierungssystem .....	83

12.a.v Systemwagen.....	83
12.a.vi TDC-Computer .....	83
<b>13.SOFTWARE-ALARMMELDUNGEN .....</b>	<b>84</b>
13.A ALARMANZEIGEN .....	84
13.B BESCHREIBUNG DER ALARMBEDINGUNGEN.....	85
13.C MEHRERE ALARMBEDINGUNGEN.....	86
13.D ALARMBEDINGUNGSPROTOKOLL .....	87
<b>A. TULSA-PRO® MRT TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG .....</b>	<b>88</b>
A.1. PROBLEME AUFGRUND VON PATIENTENBEWEGUNG .....	88
A.2. THERMOMETRIE UND TEMPERATURUNSICHERHEIT .....	88
A.3. ZUGRIFF AUF BENUTZERDOKUMENTATION ÜBER DIE TDC .....	89
<b>B. LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG: ALARMSIGNALE.....</b>	<b>90</b>
B.1. FLÜSSIGKEITSWAGEN .....	92
40-201: KEINE NETZWERKVERBINDUNG ZWISCHEN TDC UND SYSTEMWAGEN .....	92
40-202: KABEL ZWISCHEN SYSTEMWAGEN UND SYSTEMELEKTRONIK GETRENNT .....	93
40-206: RAUMTEMPERATUR FÜR DEN SYSTEMWAGEN ZU HOCH .....	94
41-107: BEUTELVOLUMEN DES ULTRASCHALLAPPLIKATOR-FLÜSSIGKEITSKREISLAUFS ZU NIEDRIG .....	95
41-109: PUMPENDRUCK DES ULTRASCHALLAPPLIKATOR-FLÜSSIGKEITSKREISLAUFS ZU NIEDRIG .....	96
41-110: PUMPENDRUCK DES ULTRASCHALLAPPLIKATOR-FLÜSSIGKEITSKREISLAUFS ZU HOCH .....	98
42-107: BEUTELVOLUMEN DES ECD-FLÜSSIGKEITSKREISLAUFS ZU NIEDRIG.....	99
42-109: PUMPENDRUCK DES ECD-FLÜSSIGKEITSKREISLAUFS ZU NIEDRIG .....	100
42-110: PUMPENDRUCK DES ECD-FLÜSSIGKEITSKREISLAUFS ZU HOCH .....	102
B.2. MAGNETRESONANZTOMOGRAFIE .....	104
50-201: IP-ADRESSE ODER DER IP-PORT FÜR DIE MRT-KASSETTE FALSCH ODER BEREITS BELEGT .....	104
50-202: KEINE NETZWERKVERBINDUNG ZWISCHEN TDC UND MRT.....	105
50-203: VERZÖGERUNG BEIM EMPFANG DES THERMOMETRIEBILDES.....	106
50-204: TDC HAT IN DEN LETZTEN 30 SEKUNDEN KEINE NEUEN THERMOMETRIEBILDER ERHALTEN .....	107
50-209: THERMOMETRIEBILDER NICHT VERWENDBAR .....	108
50-211: THERMOMETRIE-SCAN ENTSPRICHT NICHT DER VORGESCHRIEBENEN BILDPOSITION BZW. -AUSRICHTUNG.....	110

50-212: PARAMETER DER THERMOMETRIESEQUENZ GEÄNDERT UND AUßERHALB DES BEREICHS .....	112
50-213: THERMOMETRIEBILDER NICHT VERWENDBAR .....	113
50-214: FÜR DIE AUSRICHTUNG ERFORDERLICHER ANATOMIE-SCAN IST ÄLTER ALS 2 STUNDEN .....	115
50-215: ÜBERPRÜFEN, OB SICH DER PATIENT IN DER POSITION „KOPF ZUERST, RÜCKENLAGE“ BEFINDET .....	116
B.3. POSITIONIERUNGSSYSTEM .....	117
10-102: KEINE NETZWERKVERBINDUNG ZWISCHEN TDC UND SCHNITTSTELLENBOX DES POSITIONIERUNGSSYSTEMS .....	117
20-102: KABEL ZWISCHEN POSITIONIERUNGSSYSTEM (PS) UND PS-SCHNITTSTELLENBOX GETRENNT .....	118
20-201: PROBLEM MIT DER DREHBEWEGUNG .....	120
20-202: TDC-COMPUTER AUSGELASTET, KANN THERMOMETRIEBILDER NICHT SCHNELL GENUG VERARBEITEN .....	121
20-203: FEHLER BEI DER KOMMUNIKATION MIT DEM POSITIONIERUNGSSYSTEM .....	122
21-201: LINEARE ACHSE DES POSITIONIERUNGSSYSTEMS UNERWARTET VERSCHOBEN .....	123
22-201: POSITIONIERUNGSSYSTEM DREHT ULTRASCHALLAPPLIKATOR NICHT MIT ERWARTETER GESCHWINDIGKEIT .....	124
22-202: ROTATIONSANGANGSPOSITION VERLORENGEGANGEN .....	125
22-206: ULTRASCHALLAPPLIKATOR (UA) ZU WEIT IN EINE RICHTUNG GEDREHT .....	126
22-208: DIE DREHACHSE DES POSITIONIERUNGSSYSTEMS HAT SICH UNERWARTET VERSCHOBEN .....	127
B.4. HOCHFREQUENZ .....	128
30-201: NOT-AUS-SCHALTER AKTIVIERT .....	128
30-202: TDC-COMPUTER AUSGELASTET, KANN THERMOMETRIEBILDER NICHT SCHNELL GENUG VERARBEITEN .....	129
31-201: SYSTEMELEKTRONIKVERSTÄRKER ÜBERHITZT .....	130
31-202: SYSTEMELEKTRONIKVERSTÄRKER ABGESCHALTET .....	131
32-102: KEINE NETZWERKVERBINDUNG ZWISCHEN TDC UND SYSTEMELEKTRONIK .....	132
B.5. SYSTEM .....	133
71-202: NICHT GENÜGEND FESTPLATTENSPEICHER ZUM ABSCHLIEßEN DER SITZUNG .....	133

# 1. Einleitung

Dieses Handbuch enthält Bedienungsanleitungen für die Einrichtung und den Betrieb des **TULSA-PRO® transurethralen Ultraschallablationssystem**s und für die Vorbereitung und Positionierung von Patienten sowie spezifische Informationen für *Philips Ingenia 3T oder Ingenia Elition 3T Magnetresonanztomographie-(MRT)-Scanner*.

Sie müssen diese Anweisungen zusammen mit der *TULSA-PRO® Gebrauchsanweisung* für das TULSA-PRO® transurethrale Ultraschallablationssystem verwenden, das alle behördlichen Informationen zum TULSA-PRO® System enthält, einschließlich Warnungen und Vorsichtshinweise, die für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung dieses medizinischen Gerätesystems erforderlich sind.

Wenn Sie zusätzliche Kopien der *TULSA-PRO® Gebrauchsanweisung* oder des *Benutzerhandbuchs* für ein MRT-System benötigen oder Fragen zum Inhalt dieses Dokuments haben, wenden Sie sich bitte an:



Profound Medical Inc.  
2400 Skymark Avenue, Unit 6  
Mississauga ON L4W 5K5  
Telefon: 647-476-1350  
Fax: 647-847-3739  
<http://www.profoundmedical.com>

## 2. Abkürzungen

In diesem Handbuch werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

ECD.....	Endorektales Kühlgerät
MR.....	Magnetresonanz
MRT.....	Magnetresonanztomographie/Bildgebung/Bildrechner
PS.....	Positionierungssystem
PSIB.....	Positionierungssystem-Schnittstellen-Box
TDC.....	Behandlungskonsole
TULSA-PRO.....	Name des transurethralen Ultraschallablationssystem
UA.....	Ultraschallapplikator



## 3. Allgemeine Anweisungen

### 3.a Vorgeschlagenes Personal

In der folgenden Tabelle werden die vorgeschlagenen Rollen und Verantwortlichkeiten beschrieben, die für ein TULSA-PRO®-Verfahren erforderlich sind. Es ist möglich, dass an Ihrem Standort einige Mitarbeiter mehrere Rollen übernehmen. Die Anweisungen in diesem Handbuch sind anhand der Schattierungsfarben in der folgenden Tabelle nach Rolle des Benutzers farbcodiert.

ROLLE	TYPISCHE AKTIVITÄTEN INNERHALB EINES TULSA-PRO® VERFAHRENS
<b>Urologe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eignung und Schulung von Patienten (beurteilen, ob ein Patient geeignet ist, Risiken/Nutzen von TULSA besprechen, Besuche und Nachbeobachtung)</li> <li>Patientenvorbereitung (Katheter und Einführen des Führungsdrahts)</li> <li>Einführen der Geräte (Ultraschallapplikator und endorektales Kühlgerät)</li> <li>TULSA-PRO® Softwarebetrieb (wie bei <i>Radiologe</i>)</li> </ul>
<b>Radiologe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TULSA-PRO® Softwarebetrieb:</li> <li>Gerätepositionierung und -anpassung an die Anatomie</li> <li>Behandlungsplan (Kontur der Prostata, Vorgabe der Kontrollgrenze)</li> <li>Überwachung der Behandlungsabgabe (Beobachtung auf erwartete Ablations- und Software-Alarmmeldungen)</li> </ul>
<b>MRT-MTRA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beurteilung der Eignung von Patienten und Personal für die Magnetresonanztomographie (MRT) in der MR-Umgebung</li> <li>TULSA-PRO® Geräteeinrichtung, Abbau und Lagerung</li> <li>Positionierung von Patient und Gerät im MRT-Raum</li> <li>Bedienung der MRT-Konsole für die Bilderfassung</li> </ul>
<b>Anästhesist (mit möglichen Anästhesie-Assistenten)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beurteilung der Eignung des Patienten für die Narkose</li> <li>Sedierung im Vorbereitungsbereich oder im MRT-Scannerraum</li> <li>Überwachung und Anpassung der Sedierung während der Behandlungsplanung und -verabreichung</li> <li>Aufwachphase des Patienten nach Ablation und Überführung in die nachanästhetische Versorgung</li> </ul>

### 3.b Übersicht Arbeitsablauf

In der folgenden Tabelle ist der Arbeitsablauf eines TULSA-PRO® Verfahrens zusammengefasst. Detaillierte Anweisungen für jeden Schritt werden in den folgenden Abschnitten dieses Dokuments beschrieben. Mehrere Mitarbeiter betreffende bzw. parallel durchzuführende Schritte werden in derselben Zeile aufgeführt. Die primäre Rolle für jeden Schritt ist **fett** dargestellt. Schritte, die Unterstützung durch einen Anästhesisten erfordern, sind mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet.

UROLOGE	RADIOLOGE	MRT-MTRA
<b>Patientenaufnahme *</b>		<b>MRT-Screening des Patienten</b>
<b>Vorbereitung des Patienten *</b>		<b>Geräteeinrichtung</b>
		<b>Patientenpositionierung vor der Bildgebung *</b>
<b>Einführen des Geräts – UA</b>		Einführen des Geräts – UA
<b>Einführen des Geräts – ECD</b>		Einführen des Geräts – ECD
		<b>Patientenpositionierung für die MRT *</b>
	Beginn der Bildgebung	<b>Beginn der Bildgebung</b>
	<b>Planung – Ausrichtung</b>	Planung – Ausrichtung
	<b>Planung – Grob</b>	Planung – Grob
	<b>Planung – Detailliert *</b>	Planung – Detailliert *
<b>Abgabe der Behandlung *</b>	<b>Abgabe der Behandlung *</b>	Abgabe der Behandlung *
	Bildgebung nach der Behandlung	<b>Bildgebung nach der Behandlung</b>
<b>Patientenerholung *</b>		<b>Geräteabbau</b>

### 3.c Anforderungen an Anwender, Personal und Patienten

Alle Mitarbeiter und Anwender, die TULSA-PRO® installieren und handhaben, **müssen** in der Geräteeinrichtung geschult werden.

Der Patient und alle Anwender, die den MRT-Raum betreten, müssen von Radiologie- oder MRT-Personal gescreent werden und ein MRT-Screening-Formular ausfüllen.

Geräte einrichtende Anwender müssen in der MR-Umgebung Vorsicht walten lassen und dürfen die MR-Umgebung nicht betreten, wenn sich MR-unsichere Gegenstände in ihren Taschen oder auf einem Tablett oder Wagen befinden. Das TULSA-PRO®-Gerät wurde so konzipiert, dass für die Einrichtung keine Werkzeuge wie z. B. Schraubenzieher und Schraubenschlüssel erforderlich sind.

### 3.d Inbetriebnahme des TULSA-PRO® Systems

Vor dem ersten Einsatz des TULSA-PRO® Systems an einem MRT-Standort **muss** das System eine Erstinstallations- und Abnahmeprüfung durch einen von Profound Medical autorisierten Servicemitarbeiter durchlaufen.

- Die Einrichtung umfasst die Kalibrierung der Flüssigkeitskreislaufsensoren sowie die Verifizierung der elektrischen Anschlüsse.
- Die Abnahmeprüfung verifiziert den Gerätebetrieb in der MRT-Umgebung.
- Das Servicepersonal konfiguriert auch Namen und Adresse Ihres Standorts, so wie sie in den Behandlungsberichten angezeigt werden sollen (siehe *Exportieren von Berichten und Videos*).

## 4. Aufnahme und Vorbereitung des Patienten

Die Aufnahme und Vorbereitung des Patienten wird vom **Urologen** mit Unterstützung durch den **Anästhesisten** und den **MR-Techniker** durchgeführt.

Nach der Aufnahme wird der Patient in den MRT-Patientenvorbereitungsbereich gebracht.

1. **MRT-MTRA:** Den Patienten auf MRT-Eignung untersuchen und die für die Registrierung des Patienten auf dem MRT-Computer erforderlichen Informationen einholen.
2. **Anästhesist:** Für sich diesem Verfahren unterziehende Patienten wird eine Vollnarkose empfohlen.
3. **Urologe:** Ein suprapubischer Katheter kann unter Führung des Zystoskops in die Blase des Patienten gelegt werden, um den Urin aus der Blase abzuleiten und den Urinfluss während des Eingriffs zu verwalten. Wenn kein suprapubischer Katheter verwendet wird, muss die Blase mit einem Foley-Katheter geleert werden, bevor der Führungsdraht eingeführt wird.
4. **Urologe:** Mithilfe eines Zystoskops bzw. Foley-Katheters einen nicht-magnetischen Führungsdraht (z. B. Nitinolkern) mit einer maximalen Dicke von 0,96 mm (0,038 Zoll) in die prostatistische Harnröhre und die Blase einführen.



**Nur Führungsdrähte verwenden, die als nicht-magnetisch verifiziert wurden.**

5. **Urologe:** Zystoskop bzw. Foley-Katheter entfernen und den Führungsdraht an seinem Platz belassen. Wenn dieser Schritt außerhalb des MRT-Raums durchgeführt wird, sichern Sie den Führungsdraht, damit er während der Verlegung auf die MRT-Liege nicht aus dem Patienten herausrutscht.



**Entfernen Sie vor dem Betreten des MRT-Raums das Zystoskop vom Patienten. Andernfalls könnten Sie den Patienten verletzen.**

## 5. Geräteeinrichtung

**MRT-MTRA:** Führen Sie zur Einrichtung des TULSA-PRO® die folgenden Schritte durch:

- Im MRT-Raum gehen Sie wie folgt vor:
  - Vorbereiten einer Arbeitsfläche für die Vorbereitung von Geräten, die mit dem Patienten in Kontakt kommen
  - Konfiguration des Spulenhalters
  - Einrichten von TULSA-PRO® Basisplatte, Spulenhalter, Kopfpolster, Schnappverschlüssen und Laschen
  - Anschließen der Schnittstellenbox für das Positionierungssystem an die Filterbox und das Positionierungssystem
- Außerhalb des MRT-Raums gehen Sie wie folgt vor:
  - Vorbereiten des Systemwagens:
    - Den Systemwagen in die Nähe des Hohlleiters stellen und die Systemwagenstange anheben
    - Steriles Wasser für den Ultraschall-Applikator (UA) und dotiertes steriles Wasser für das Endorektale Kühlgerät (ECD) vorbereiten
    - Aufhängen des UA- und des ECD-Schlauchsatzes (mit verschlossenen Enden) am Systemwagen
    - Die verschlossenen Enden der Schlauchsätze durch den Hohlleiter an einen Helfer im MRT-Raum reichen
  - Anschließen der Systemelektronik an Behandlungskonsole, Filterbox und Steckdose sowie Einschalten der Systemelektronik
  - Registrierung eines neuen Patienten an der MRT-Konsole
  - Initialisieren der Behandlungskonsole (TDC) und Einschalten der PSIB-Anzeige
- Durchführen von Geräteprüfungen vor der Behandlung im MRT-Raum:
  - Die Schlauchsätze durch den Hohlleiter an UA und ECD auf der MRT-Arbeitsfläche anschließen
  - Spülung von UA und ECD und Kontrolle auf Luftblasen
  - Anschließen von UA und PSIB und Durchführen des HF-Verbindungstests
  - Durchführen des Referenzierungstests für das Positionierungssystem (PS)

Alle in den MRT-Raum einlaufenden elektrischen Kabel sind über eine Filterbox an einer Penetrationsplatte angeschlossen. Alle in den MRT-Raum einlaufenden Flüssigkeitsleitungen werden durch einen Hohlleiter geführt.

*Abbildung 1* zeigt ein Schema der TULSA-PRO® Geräteeinrichtung.



Das TULSA-PRO® System darf nur mit MRT-Systemen verwendet werden, die von Profound Medical getestet und genehmigt wurden. Nicht getestete MRT-Systeme liefern möglicherweise nicht die gewünschten Behandlungsergebnisse. Weitere Informationen finden Sie im „Spezifikationsblatt“ in der Gebrauchsanweisung und in den Installationsanforderungen für Ihr unterstütztes MRT-System.

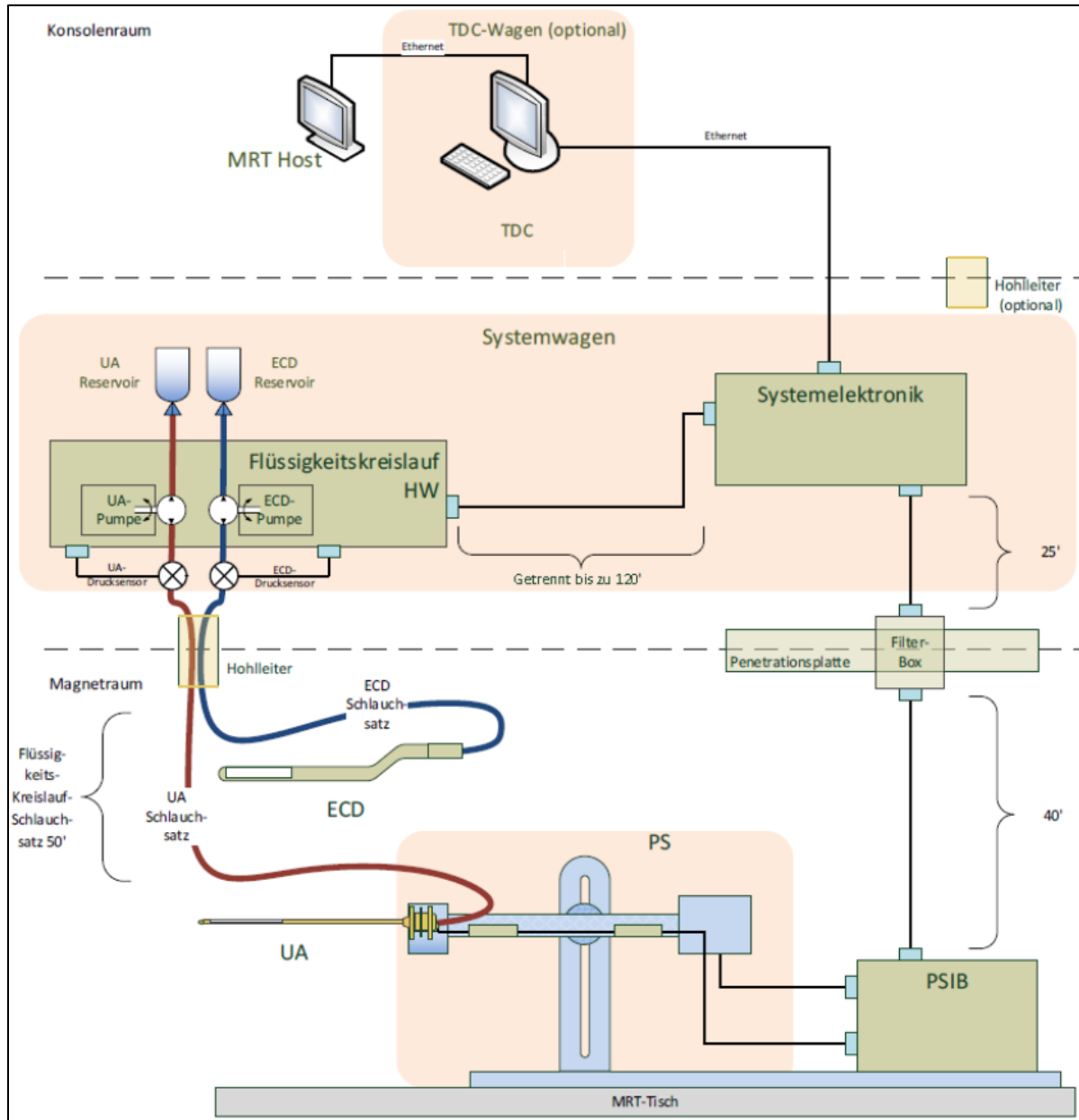


Abbildung 1: Schematische Darstellung der TULSA-PRO® Geräteeinrichtung

## 5.a Einrichtung im MRT-Raum

### 5.a.i Vorbereitung der Arbeitsoberfläche

**MRT-MTRA:** Im MRT-Raum benötigen Sie eine Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Geräten, die mit dem Patienten in Kontakt kommen, dem Ultraschallapplikator (UA) und dem endorektalen Kühlgerät (ECD). Wenngleich die Arbeitsfläche im MRT-Raum nicht steril sein muss, sollte ein ausgewiesener Bereich für die Vorbereitung der Geräte mit Patientenkontakt vorhanden sein, der auch zur Qualitätssicherung aller Komponenten des TULSA-PRO® Systems verwendet wird. Im MRT-Raum oder in der Nähe müssen medizinische Handschuhe, blaue Saugeinlagen und medizinisches Band verfügbar sein.

### 5.a.ii Spulenhalterkonfiguration

1. Legen Sie die Spule in den TULSA-PRO Spulenhalter für Ingenia, wobei das Kabel wie unten dargestellt aus dem Spulenhalter herausragt (*Abbildung 2*). Schließen Sie die Verschlüsse und ziehen Sie die Gurte fest.

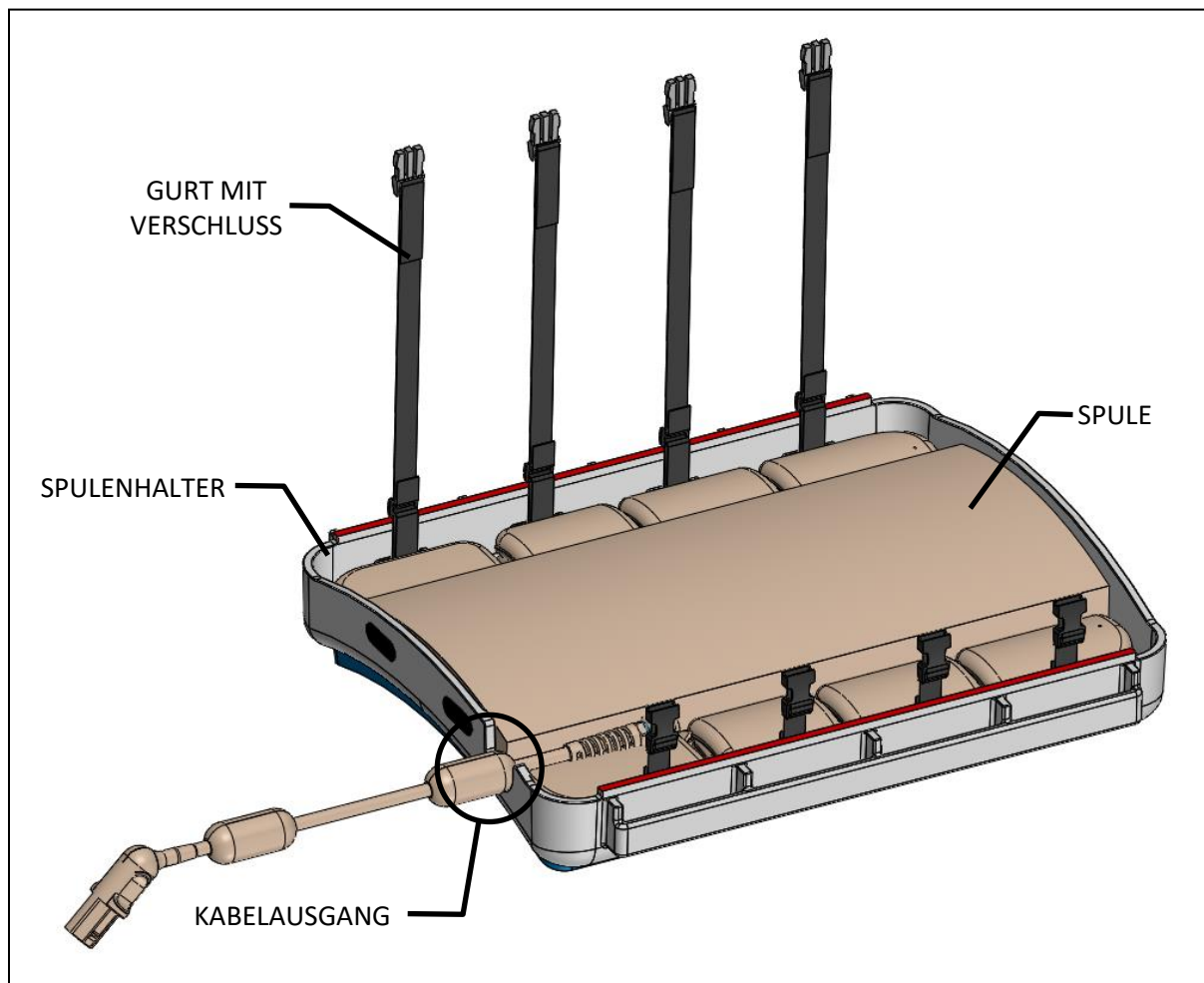


Abbildung 2: Kabel, das aus dem Spulenhalter herausragt

2. Legen Sie den Spulenhalter mit der hinteren Spule auf die MRT-Liege (Abbildung 3).
  - a) Positionieren Sie den Spulenhalter so, dass das Kabel von der Spule zum Kopf der Liege hin herausragt.
  - b) Stellen Sie sicher, dass die Füße des Spulenhalters an den äußeren Schienen der Liege ausgerichtet sind.
3. Befestigen Sie die Ingenia Spulenhaltermatte am Spulenhalter. Wenn diese zum ersten Mal angebracht wird, entfernen Sie die Klebeschutzfolie von den sechs Klettbindern der Spulenhaltermatte und positionieren Sie sie entsprechend der Form des Spulenhalters. Drücken Sie die Spulenhaltermatte fest auf die Klettverschlüsse.

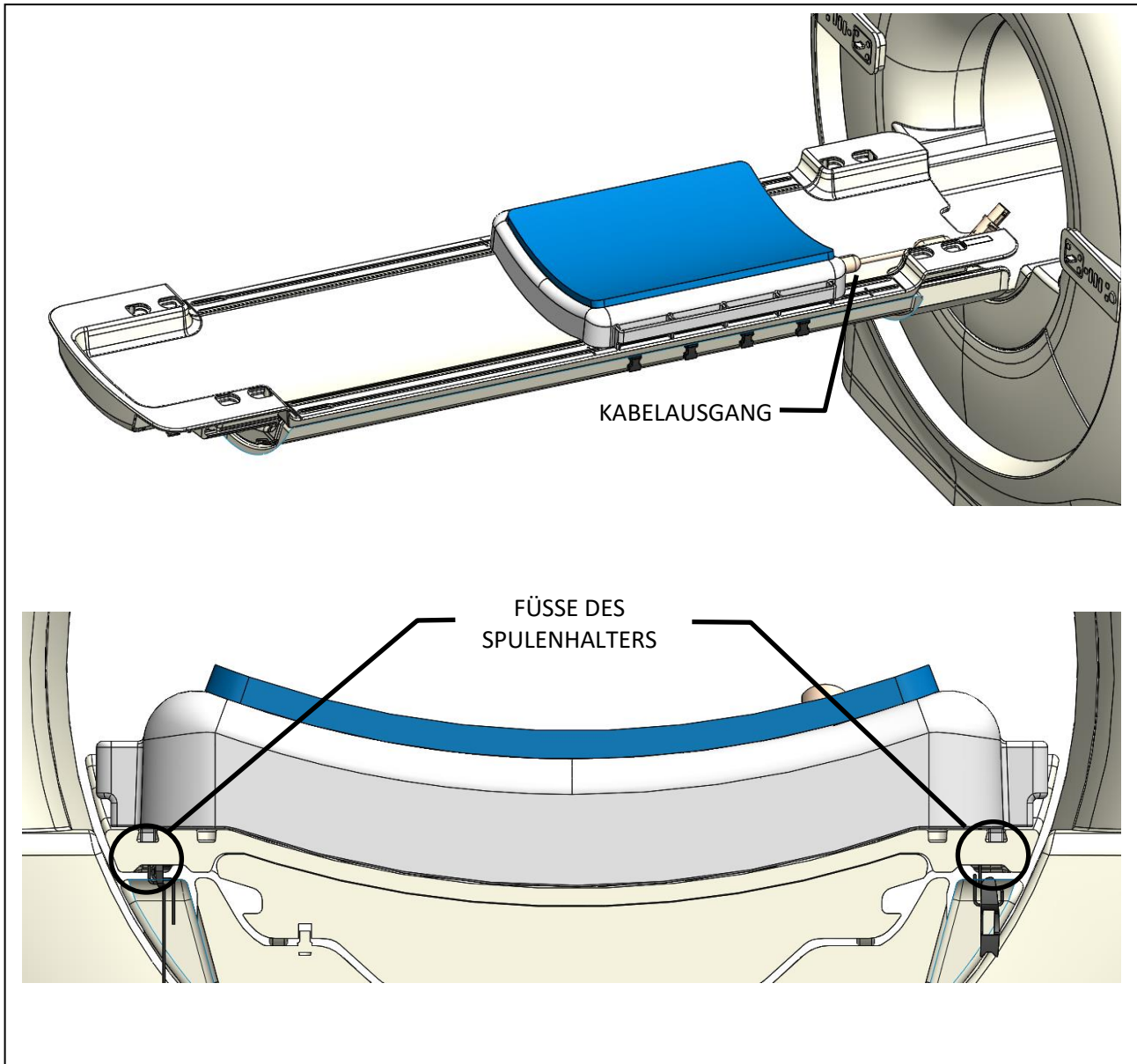


Abbildung 3: Positionierung der hinteren Spule auf der MRT-Liege



### 5.a.iii Montage von Basisplatte und Kopfpolster

1. Legen Sie die TulsA-PRO® Basisplatte für Ingenia auf die MRT-Liege. Die FüÙe der Basisplatte müssen an den inneren Schienen der Liege ausgerichtet sein (*Abbildung 4*).

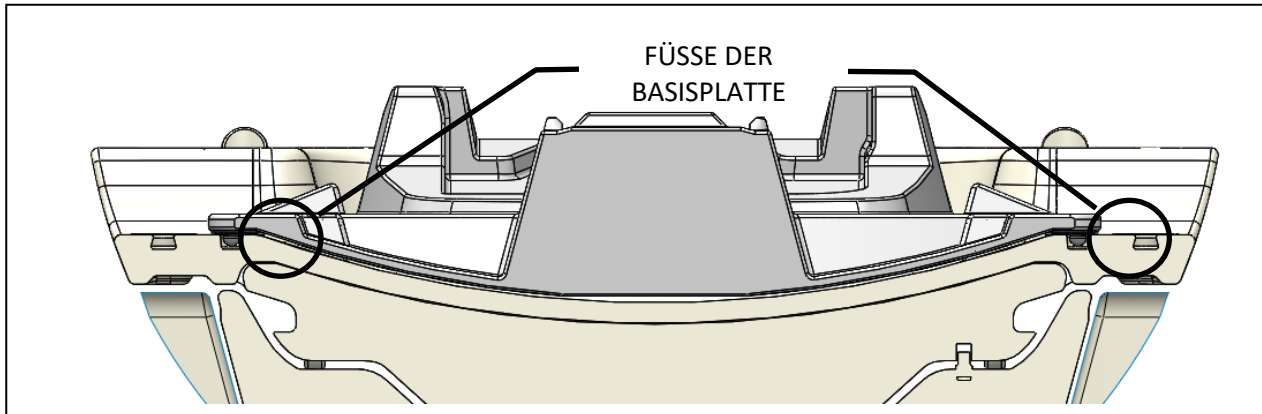


Abbildung 4: Positionierung der Grundplatte auf der MRT-Liege

2. Setzen Sie vier Basisplatten mit Schnappverschlüssen, zwei auf jeder Seite, in die äußeren Schlitze der MRT-Liege ein. Schieben Sie diese nach unten, um sie an den Gurtpunkten auf der Basisplatte auszurichten. Alle Schnappverschlüsse und Gurte sind im Zubehörsatz der Basisplatte enthalten (*Abbildung 5*).

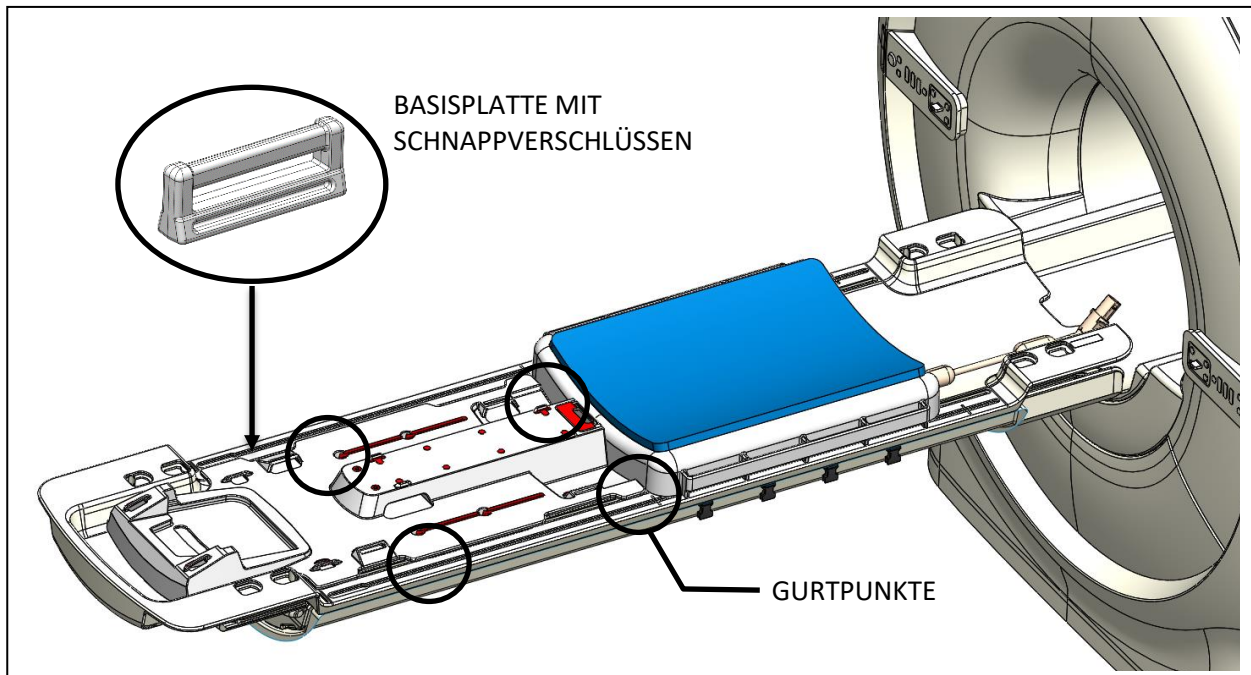


Abbildung 5: Einsetzen der Basisplatte mit Schnappverschlüssen

3. Befestigen Sie die Basisplatte mit den vier Gurten an der MRT-Liege (*Abbildung 6*).
4. Platzieren Sie das TulsA-PRO® Kopfpolster für Ingenia über dem Spulenhalter.

5. Decken Sie Basisplatte, Spulhalter und Kopfpolster mit Tüchern ab und legen Sie eine Saugeinlage auf das der Basisplatte am nächsten liegende Ende des Spulhalters.

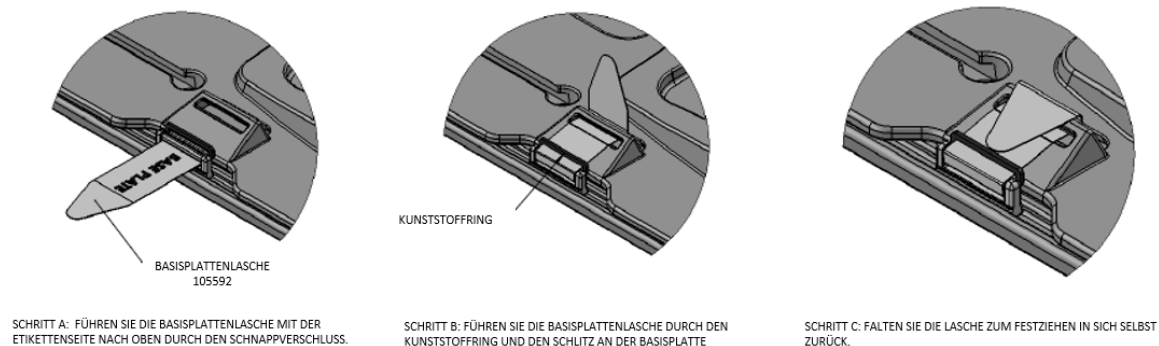


Abbildung 6: Anbringen der Gurte

### 5.a.iv Anschließen des Positionierungssystems (PS)

Das Positionierungssystem und die Schnittstellenbox des Positionierungssystems (PSIB) sind auf einer Arbeitsplatte oder Arbeitsfläche im MRT-Raum zu legen, bis der Patient auf dem MRT-Tisch positioniert ist. Bewegen Sie das PS mit der Verstellfreigabe manuell so weit wie möglich nach hinten. Stellen Sie die manuelle vertikale Achse des PS nahe am oberen Ende des Bewegungsbereichs ein, wobei der Neigungswinkel horizontal oder leicht nach unten geneigt sein muss.

Verbinden Sie das PS mit der PSIB über den Anschluss auf der Rückseite des PS. Schließen Sie das große weiße Kabel der Filterbox (an der Wand auf der Innenseite des MRT-Raums) an die PSIB an.



**Gehen Sie beim Installieren des Kabels zwischen Filterbox und PSIB vorsichtig vor. Die Kabelstifte müssen vorsichtig mit dem Buchsensteckverbinder verbunden und nicht mit Gewalt in Position gebracht werden. Zu viel Kraft beschädigt die Kabelstifte.**

## 5.b Einrichtung außerhalb des MRT-Raums

### 5.b.i Vorbereiten des Systemwagens

**MRT-MTRA:** Der Systemwagen enthält die Hardware des Flüssigkeitskreislaufs zur Kühlung des Ultraschallapplikators (UA) und des endorektalen Kühlgeräts (ECD). So bereiten Sie den Systemwagen vor:

#### **Wagen einrichten**

1. Um Zugang zu den Flüssigkeitsschläuchen zu erhalten, ist der Systemwagen je nach Raumaufteilung in der Nähe des Hohlleiters im Geräte- oder im Kontrollraum zu positionieren. Der Luftstrom vom hinteren Luftauslass darf nicht blockiert sein.
2. Arretieren Sie die Laufrollen an den Rädern, um den SW zu fixieren.

3. Drücken Sie gleichzeitig auf die Entriegelung der Stativklemme, und ziehen Sie die Stange des Gerätewagens in ihre vollständig ausgefahrene Position.

### **Flüssigkeitsvorbereitung**



**ECD-Flüssigkeitspräparate sind nicht trinkbar und dürfen nicht mit der Haut in Kontakt kommen. Tragen Sie bei der Handhabung Handschuhe, und nehmen Sie keine Flüssigkeit ein.**

Die Schlauchsätze für den Flüssigkeitskreislauf haben zur Unterscheidung farbkodierte Aufkleber und Luer-Anschlüsse: rot für den UA-Kreislauf und blau für den ECD-Kreislauf.

**Bereiten Sie zwei 1000-ml-Beutel steriles Wasser für den IV-Zugang vor:**

#### **1. Behandlung bzw. Doping des ECD-Kreislaufs:**

- a. Extrahieren Sie mit einer 20-ml-Spritze und einer 16-G-Nadel 5 ml ECD-Flüssigkeitszusatzlösung – Manganchlorid. Injizieren Sie diese Lösung über den Spritzenanschluss in den wassergefüllten 1000-ml-IV-Beutel. Dies ist der ECD-IV-Beutel.
- b. Entnehmen Sie 20 ml des ECD-Flüssigkeitszusatzes – Span & Tween. Injizieren Sie diese Lösung über den Spritzenanschluss in den ECD-IV-Beutel.



**HINWEIS:** Die Zusätze Manganchlorid und Span & Tween helfen dabei, Blasen innerhalb des ECD und der ECD-Flüssigkeitsleitung zu verhindern.

- c. Schütteln Sie den Infusionsbeutel 30 Sekunden lang oder bis die Lösung vollständig aufgelöst ist. Die Lösung muss milchig weiß aussehen, sodass sich der ECD-IV-Beutel vom UA-Beutel unterscheiden lässt. Beschriften Sie den ECD-Beutel mit einem weichen Marker.
  - d. Hängen Sie den ECD-IV-Beutel vom ECD-Gewichtssensorhaken an den Systemwagen.
2. **UA-Kreis:** Hängen Sie den anderen 1000-ml-IV-Beutel mit unbehandeltem, sterilem Wasser vom UA-Gewichtssensorhaken an den Systemwagen. Dies ist der UA-IV-Beutel.



**Injizieren Sie den ECD-Flüssigkeitszusatz nicht in den UA-Flüssigkeitsbeutel, da:**

- a. Die ECD-Flüssigkeitszusätze eliminieren das vom Wasser stammende und im UA-Akustikfenster angezeigte MRT-Signal, was während der *Ausrichtungphase* des TDC wichtig ist. Mit anderen Worten wird möglicherweise das UA-Akustikfenster nicht richtig identifiziert und deswegen könnte der UA in der TDC falsch ausgerichtet sein.
- b. Das Infektionsrisiko erhöht sich, wenn die behandelte Flüssigkeit aus dem UA austritt und in die Harnröhre eintritt.

### **Schlaucheinrichtung**

1. Entnehmen Sie einen (mit einem blauen Punkt gekennzeichneten) ECD-Schlauchsatz aus der Verpackung, und bringen Sie diesen am Systemwagen an:

- a. Legen Sie den leeren ECD-Reservoirbeutel auf die Tischplatte des Flüssigkeitskreislaufs. Vergewissern Sie sich, dass die Schlauchklemmen an den verschlossenen Enden des Schlauchsatzes geschlossen sind.
- b. Setzen Sie den Pumpenabschnitt des Schlauchsatzes in den ECD-Pumpenkopf und schließen Sie ihn.

Achten Sie darauf, dass der Pumpenabschnitt des Schlauchs nicht eingeklemmt wird, wenn Sie ihn in den Peristaltikpumpenkopf einsetzen. Achten Sie sowohl auf die Ober- als auch die Unterseite (Einlass und Auslass) des Pumpenkopfes.



**HINWEIS:** Wenn die Schläuche im Pumpenkopf eingeklemmt sind, könnten sie während einer Behandlung ausfallen und zu einem großflächigen Wasserauslaufen führen.

- c. Schließen Sie den ECD-Drucksensor an den entsprechenden Anschluss am Systemwagen an.
  - d. Setzen Sie den Dorn des leeren Beutels in den vorbehandelten ECD-IV-Beutel ein und vergewissern Sie sich, dass die Schlauchklemme am Dornanschluss geöffnet ist, damit der Inhalt des ECD-IV-Beutels in den ECD-Schlauchsatz laufen kann.
  - e. Wenn der gesamte Inhalt des ECD-IV-Beutels in den ECD-Reservoirbeutel gelaufen ist, schließen Sie die Schlauchklemme dazwischen.
  - f. Hängen Sie den ECD-Reservoirbeutel an den blauen Gewichtssensorhaken am Systemwagen.
2. Wiederholen Sie die obigen Schritte (1.a bis 1.f) für den UA-Kreislauf mit einem UA-Schlauchsatz (mit einem roten Punkt gekennzeichnet).
  3. Führen Sie die UA- und ECD-Schlauchsätze (mit Deckel) mit Hilfe einer Person im Magnetraum durch den entsprechenden Hohlleiter in den Magnetraum. Fixieren Sie die Schlauchsätze in der Nähe der MRT-Arbeitsfläche.

### 5.b.ii Anschließen der Systemelektronik

Das Gehäuse der Systemelektronik befindet sich in der Regel im MRT-Geräteraum auf dem Systemwagen und in der Nähe der Penetrationsplatte, an der die Filterbox fixiert ist. Ein großes, schwarzes Kabel verbindet die Filterbox mit der Systemelektronik. Systemelektronik, Filterbox und Kabel werden von Profound Medical installiert und können angeschlossen bleiben, wenn sie nicht in Benutzung sind.

Um die Systemelektronik für den Gebrauch vorzubereiten, müssen Sie sicherstellen, dass folgende Anschlüsse vorhanden sind:



**HINWEIS:** Wenn ein Kabel noch nicht angeschlossen ist, vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass es nicht beschädigt sind.

1. Das Kabel von der Elektronik des Flüssigkeitskreislaufs (unter der Wagentischplatte) zum Gehäuse der Systemelektronik.
2. Das große schwarze Kabel vom Gehäuse der Systemelektronik zur Filterbox.

3. Das Ethernet-Kabel vom Gehäuse der Systemelektronik zum Computer der Behandlungskonsole (TDC).
4. Das Gehäuse der Systemelektronik mit einem für die medizinische Nutzung zugelassenen geerdeten Netzkabel an einer Netzsteckdose. Verwenden Sie **keine** Verlängerungskabel.



**HINWEIS:** Das SE-Netzkabel ist mit einem verriegelbaren Anschluss arretiert; wenn Sie es abziehen, müssen Sie die beiden Laschen zusammendrücken, um das Kabel entfernen zu können.

Nach dem Herstellen aller Verbindungen können Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Gehäuses der Systemelektronik einschalten.

### 5.b.iii Registrierung eines neuen Patienten an der MRT-Konsole

1. Neue Patienten sind an der MRT-Konsole mit den zum Aufnahmezeitpunkt erhaltenen Informationen zu registrieren. Die Patientenlage sollte **Kopf zuerst – Rückenlage** sein.
2. Laden Sie die TULSA-PRO ExamCard.

### 5.b.iv Vorbereiten der Behandlungskonsole (TDC)

1. Vergewissern Sie sich, dass der TDC-Computer im Kontrollraum in der Nähe der MRT-Konsole aufgestellt und über Ethernet-Kabel mit der Systemelektronik und dem MRT-Host verbunden ist.
2. Schalten Sie Computer und Monitor des TDC ein.
3. Melden Sie sich bei Windows auf dem TDC-Computer an, wenn dieser hochgefahren ist. Nach Abschluss der Systemschulung erhalten Sie von **Profound Medical** Ihren Benutzernamen und ein Passwort.


### *Uhrzeitsynchronisation*

Die TDC-Software führt eine Reihe von Tests durch, die fehlschlagen und unnötige Verzögerungen während der Behandlungsplanung verursachen können, wenn die jeweilige Uhrzeit und/oder Zeitzone nicht ordnungsgemäß mit der des MRT-Hosts synchronisiert ist. Wenn sich die Zeitzone des TDC-Computers unterscheidet oder die Systemzeit über 60 Sekunden vor oder hinter der des MRT-Hosts ist, müssen Sie die Systemzeit des TDC-Computers durch Ausführen der folgenden Schritte anpassen:


1. Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf die Uhrzeit des Computers.




2. Klicken Sie im kleinen Kalenderfenster auf **Datums- und Uhrzeiteinstellungen ändern....**

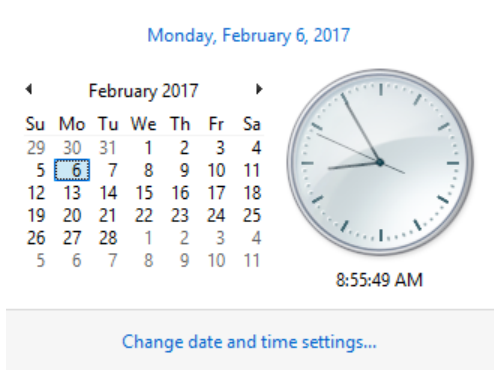

3. Klicken Sie im Dialogfeld „Datum und Uhrzeit“ auf **Zeitzone ändern**, und wählen Sie die gleiche Zeitzone wie der MRT-Host aus.

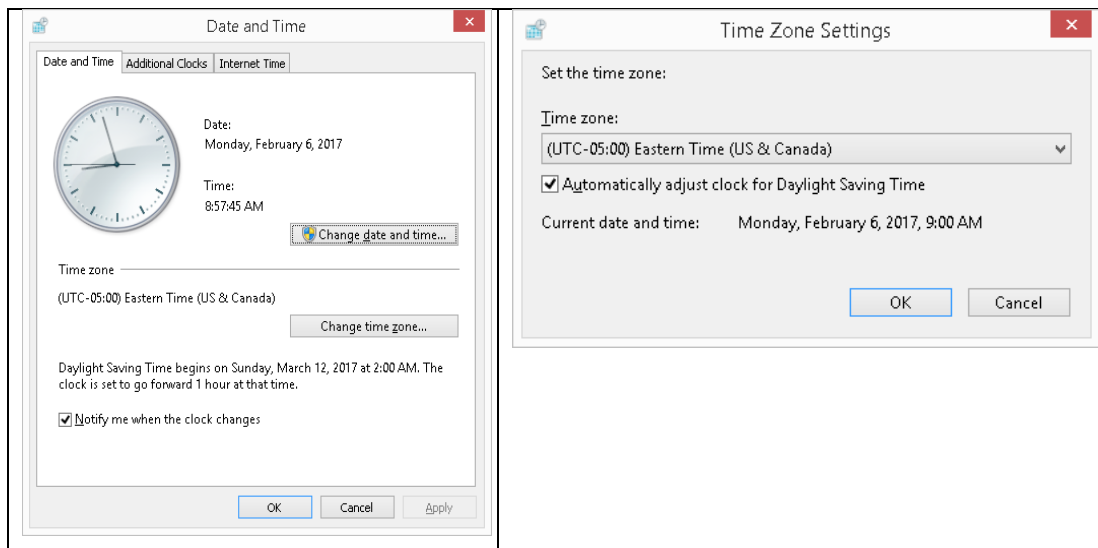

4. Auf **OK** klicken.
5. Klicken Sie im „Datum und Uhrzeit“ auf **Datum und Uhrzeit ändern**, und wählen Sie dasselbe Datum und dieselbe Uhrzeit wie der MRT-Host aus.

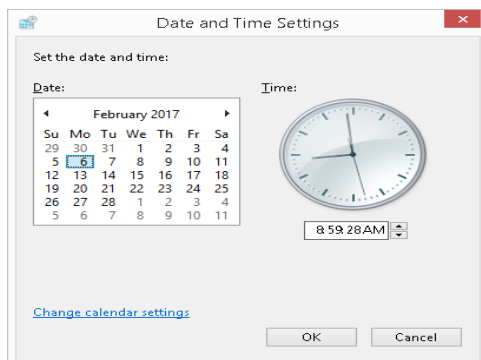

6. Klicken Sie in allen Dialogfeldern auf **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.

## Initialisieren der Behandlungskonsole (TDC)

1. Starten Sie die TDC-Software vom Desktop aus. Der Arbeitsbereich **Sitzungsdatenverwaltung** wird angezeigt. Klicken Sie auf **Neue Sitzung** (Abbildung 7).

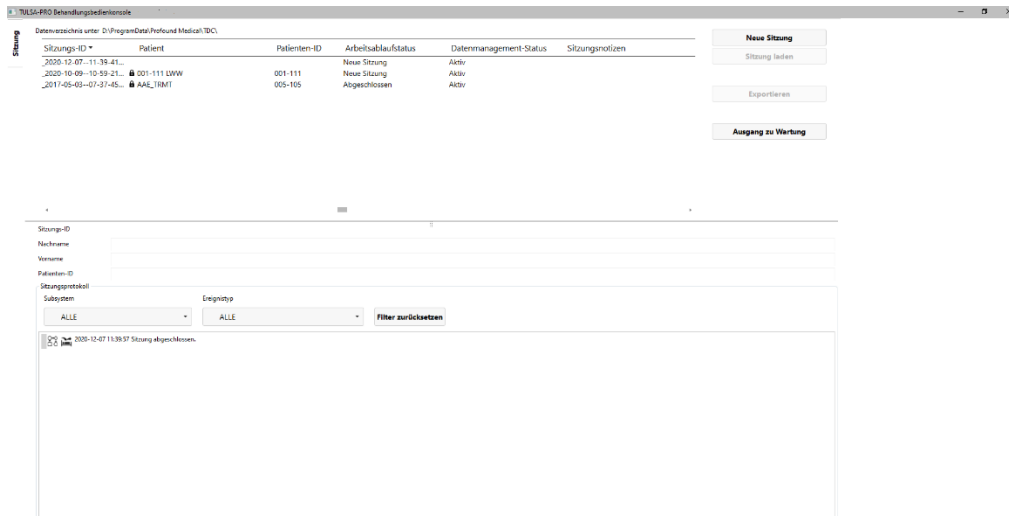


Abbildung 7: Arbeitsbereich „Sitzungsdatenverwaltung“ im TDC-Hauptmenü

2. Nach Auswahl von **Neue Sitzung** gelangen Sie in den Arbeitsbereich **Einrichtung** (Abbildung 8), in dem Sie vor dem Fortfahren kontrollieren können, ob alle Geräte ordnungsgemäß funktionieren.

Im MRT-Quadranten des Arbeitsbereichs „Einrichtung“ wird ein grünes Häkchen angezeigt, wenn TDC-Computer und MRT-Host miteinander kommunizieren können und ein Patient derzeit auf der MRT-Konsole mit der TULSA-PRO ExamCard geöffnet ist.



**HINWEIS:** TDC sperrt die Sitzung 12 Stunden nach dem Start automatisch und lässt keine weiteren Änderungen an der Sitzung zu.

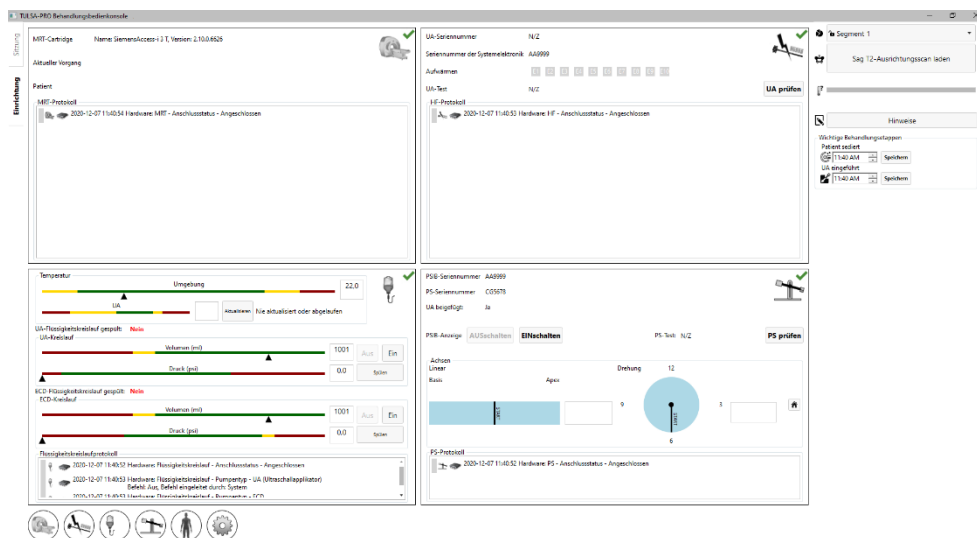




Abbildung 8: Arbeitsbereich „Einrichtung“ der TDC

3. Klicken Sie im Quadranten Positionierungssystem (PS) des Arbeitsbereichs „Einrichtung“ auf **EIN** neben **PSIB-Anzeige**.



**HINWEIS:** Auf jedem TDC-Bildschirm können Sie – außer während der Bestrahlung – F1 auf der Tastatur drücken, um das *TULSA-PRO® Benutzerhandbuch* zu öffnen und zu lesen. Klicken Sie in der oberen Ecke auf das Kreuzchen, um das Dokumentfenster zu schließen.

### **Wichtige Behandlungsetappen**

Verwenden Sie die Felder „Wichtige Behandlungsetappen“ auf der rechten Seite des TDC-Bildschirms, um Details zu bestimmten Behandlungsereignissen aufzuzeichnen. Sie können beispielsweise den Zeitpunkt aufzeichnen, zu dem ein Patient sediert wurde, und wann der UA eingesetzt oder entfernt wurde. Die Optionen für „Wichtige Behandlungsetappen“ ändern sich mit jeder Registerkarte des TDC-Arbeitsbereichs. Die von Ihnen aufgezeichneten Details zu den wichtigen Behandlungsetappen können später von *Profound Medical* analysiert werden, um die Leistung Ihrer *TULSA-PRO®* Installation zu bewerten, z. B. die durchschnittlichen Zeiten, die für die einzelnen Behandlungsschritte erforderlich sind.


## **5.c Durchführen von Gerätekontrollen vor der Behandlung im MRT-Raum**

### **5.c.i Vorbereitung von UA und ECD**



**Der Ultraschallapplikator (UA) ist zerbrechlich und sollte mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden. Sollte er herunterfallen oder grob gehandhabt werden, können interne Komponenten beschädigt werden, was für den Anwender nicht sofort erkennbar ist. Verwenden Sie einen UA nicht, wenn Sie eine Beschädigung vermuten.**

MRT-MTRA: Der ECD ist *nicht* steril und kann entsprechend gehandhabt werden. Der UA und der Inhalt in der UA-Verpackung **sind** steril. *Abbildung 9* zeigt den UA in seiner versiegelten und sterilen Verpackung. Es ist eine weitere Kunststoffabdeckung vorhanden, die den UA von der Spitze bis zur Oberseite des Griffs umschließt und UA-Kabel, Führungsdrahteingänge und Flüssigkeitsschläuche freilässt. Wenn Sie die Flüssigkeitsschläuche und das UA-Kabel anschließen, muss die sterile Barriere des UA durchbrochen werden. Halten Sie die innere Kunststoffabdeckung während der Vorbereitung über den UA, um eine Kontamination nur auf die Oberseite des UA-Griffs zu begrenzen.

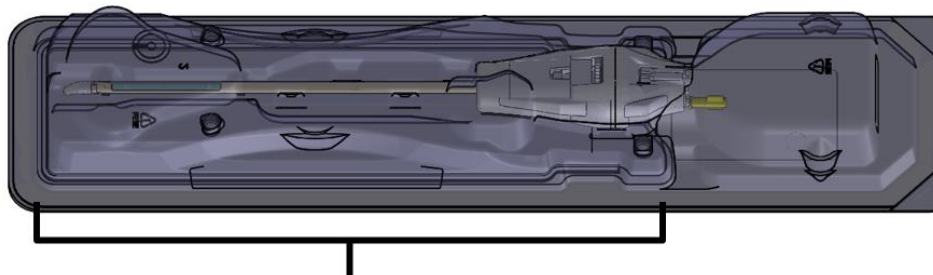

Von einer inneren Kunststoffabdeckung umgebener Bereich.

Abbildung 9: Innerhalb einer sterilen Verpackung eingeschlossener UA



Bereiten Sie UA und ECD auf einer sauberen Arbeitsfläche vor, und füllen Sie sie vor dem Einführen in den Patienten mit Flüssigkeit aus dem Flüssigkeitskreislauf vor. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen zum Befüllen von UA und ECD:

1. ECD: Öffnen Sie die ECD-Verpackung, aber entnehmen Sie das ECD nicht.



**HINWEIS:** Das ECD muss nicht mit sterilen Handschuhen gehandhabt werden.

2. ECD: Schließen Sie den ECD-Schlauchsatz an das ECD entsprechend der farbkodierten Anschlüsse an (z. B. blau an blau, gelb an gelb). Lösen Sie die Schlauchklemmen neben den Anschlüssen. Der hellblaue Schlauch dient zum Aufblasen des ECD-Ballons nach der Einführung in das Rektum des Patienten. In diesem Stadium der ECD-Vorbereitung keine Flüssigkeitsschläuche an den hellblauen Schlauch anschließen.
3. UA: Beginnen Sie mit dem Etikett „Peel Here“ (Hier abziehen) auf der Abdeckung und ziehen Sie die Tyvek-Abdeckung vollständig ab. Den Kunststoffeinsatz nicht entfernen und den UA vollständig in seiner Verpackung halten.
4. UA: Schließen Sie den UA-Schlauchsatz an den UA entsprechend der farbkodierten Anschlüsse an (z. B. rot an rot, weiß an weiß). Lösen Sie die Schlauchklemmen neben den Anschlüssen.



**HINWEIS:** Die UA-Flüssigkeitsschläuche müssen nicht mit sterilen Handschuhen gehandhabt werden.

5. Wählen Sie in der PSIB-Anzeige die Registerkarte **Flüssigkeitskreislauf** (Abbildung 10) und spülen Sie die UA- und ECD-Pumpen. Sie können dies auch vom TDC aus tun, indem Sie **SPÜLEN** neben dem Quadranten des Flüssigkeitskreislaufs (FC) drücken (Abbildung 11). Der Druck im UA- und ECD-Flüssigkeitskreislauf (wie auf der TDC-Softwareschnittstelle dargestellt) kann schwanken, wenn Luft aus den UA-Leitungen gespült wird. UA und ECD lassen sich gleichzeitig spülen. Das Spülen dauert etwa zwei Minuten.

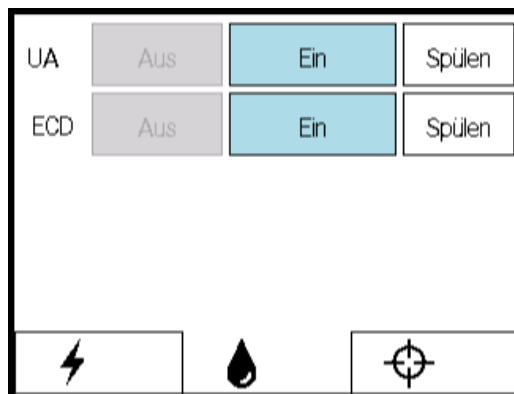


Abbildung 10: PSIB-Anzeige – Registerkarte „Flüssigkeitskreislauf“

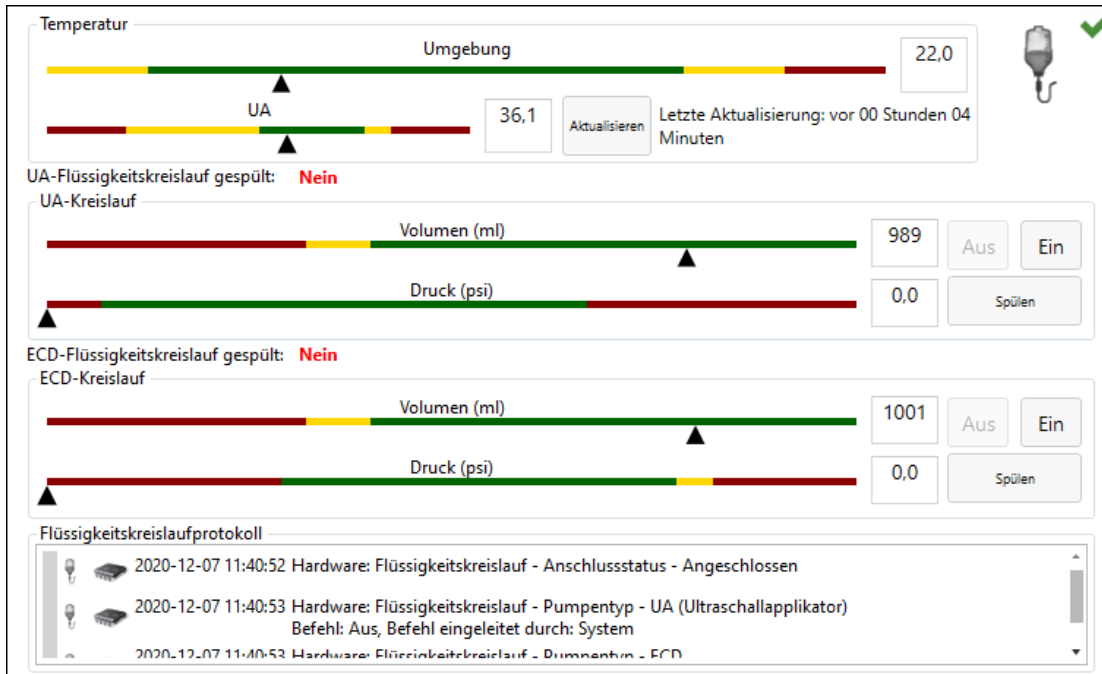


Abbildung 11: FC-Informationsbox im Arbeitsbereich „TDC Einrichtung“

6. Betreten Sie den MRT-Raum während der zweiminütigen Gerätespülung erneut, und kontrollieren Sie, ob Beschädigungen an UA/ECD und an den gesamten UA/ECD-Schlauchsätzen vorliegen.
  7. Spülen Sie alle Luftblasen aus dem ECD heraus.
    - a. Belassen Sie das ECD in seiner Verpackung, und richten Sie es so aus, dass das Kühlfenster nach oben zeigt. Luftblasen müssen sich 90 Sekunden nach dem Klicken auf **Spülen** verflüchtigt haben. Sie können auch leicht auf die Verpackung klopfen, um alle verbleibenden Blasen zu entfernen. Es dürfen keine sichtbaren Luftblasen im Kühlfenster vorhanden sein, wenn ordnungsgemäß gespült wurde.
    - b. Kontrollieren Sie das gesamte ECD und den ECD-Schlauchsatz auf Undichtigkeiten. Wenn Sie ein Leck in den Schläuchen feststellen, ist der Schlauchsatz auszuwechseln. Wenn Sie ein Leck im ECD feststellen, das ECD auswechseln. Zum Austauschen von Schlauchsatz bzw. ECD zu Schritt 1 in diesem Abschnitt zurückgehen und den Vorgang wiederholen.
    - c. Platzieren und fixieren Sie das ECD so lange auf der Arbeitsfläche, bis es in den Patienten eingeführt werden kann.
- WICHTIGER HINWEIS:** Falls sich der ECD-Schlauchsatz nach der ersten Befüllung und Spülung ablöst, müssen Sie das ECD wieder von Blasen freispülen.
8. Ausspülen aller Luftblasen aus dem UA
    - a. Wenn der Spülzyklus endet, bevor Sie die Schritte in diesem Prozess abschließen, kehren Sie zur PSIB-Anzeige (oder zum TDC-Fenster) zurück und schalten den

Spülvorgang durch Klicken auf **Ein** manuell ein. Die Flüssigkeitspumpen bleiben solange eingeschaltet, bis Sie auf **Aus** klicken (*Abbildung 12*).

The screenshot displays the control interface for manual flushing. At the top, the ambient temperature is 22.0. Below, the UA (Ultraschallapplikator) circuit is shown with a volume of 989 ml and 0.0 psi pressure. The ECD (Ejektorkreislauf) circuit is shown with a volume of 1001 ml and 0.0 psi pressure. A 'Spülen' button is present for both. Red boxes highlight the 'Ein' and 'Aus' buttons, with arrows pointing to the following text:

Klicken Sie auf „Ein“, um den Spülvorgang manuell zu aktivieren.

Klicken Sie auf „Aus“, um den Spülvorgang manuell auszuschalten.

Abbildung 12: Manuelles Spülen der Pumpe

- b. Belassen Sie den UA während dem Spülvorgang in der Verpackung. Achten Sie darauf, den UA-Griff nicht zu berühren, um die Sterilität des UA aufrechtzuerhalten. Kippen Sie die Verpackung in der senkrechten Lage nach oben (*Abbildung 13*).



Abbildung 13: UA-Verpackung in senkrechter Lage

- c. Neigen Sie die UA-Verpackung ungefähr 45° von der vertikalen gepunkteten Linie (*Abbildung 14*). Drehen Sie die Verpackung langsam (ca. 5 Sekunden lang) um etwa 360°.

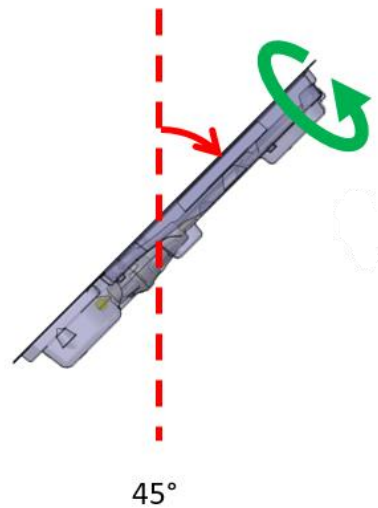


Abbildung 14: UA-Verpackung in 45°-Position

---

- d. Setzen Sie die Kippbewegung des UA in die Horizontale fort und wiederholen Sie den im vorherigen Schritt beschriebenen Drehzyklus (*Abbildung 15*).

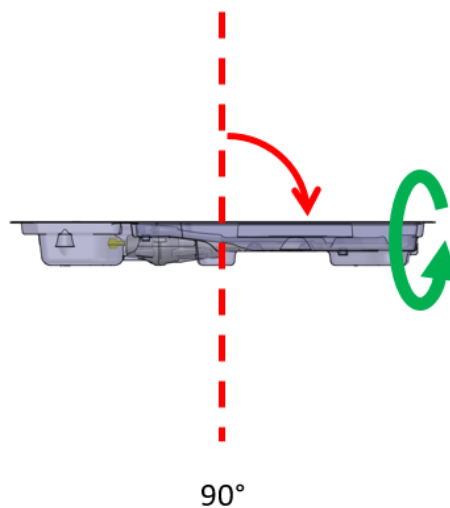


Abbildung 15: UA-Verpackung in horizontaler Lage

---

- e. Setzen Sie die Kippbewegung des UA in die 135°-Position fort und wiederholen Sie den im vorherigen Schritt beschriebenen Drehzyklus (*Abbildung 16*).

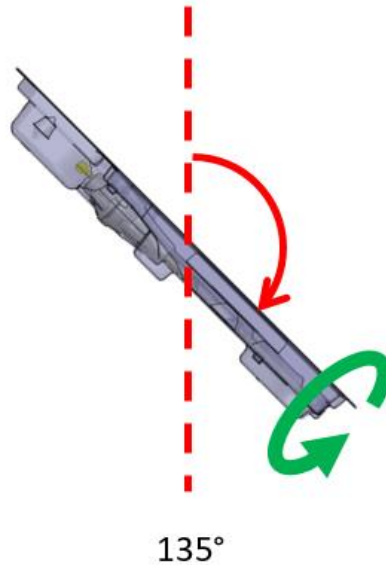


Abbildung 16: UA in 135°-Position

---

- f. Drehen Sie die UA-Verpackung so, dass die flache Seite nach unten zeigt oder sich in der 180°-Position befindet (*Abbildung 17*). Inspizieren Sie den UA sorgfältig durch die Kunststoffverpackung, und vergewissern Sie sich, dass sich in der Verpackung keine Wasserreste mehr befinden, die auf eine Undichtigkeit hindeuten würden. Wenn Sie Wasser sehen, ist der UA defekt und darf nicht verwendet werden. Nehmen Sie eine neue UA-Verpackung und wiederholen Sie die UA-Vorbereitung.

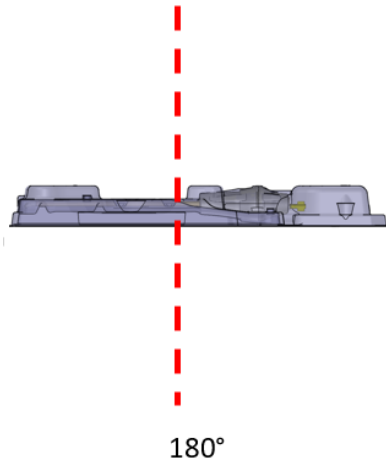


Abbildung 17: UA in 180°-Position

---

- g. Inspizieren Sie das UA-Fenster durch die Verpackung hindurch genau auf Luftblasen (*Abbildung 18*). Es dürfen **keinerlei** Luftblasen **jeglicher** Größe vorhanden sein. Klopfen Sie vorsichtig auf das Verpackungsende am UA-Fenster gegen die Arbeitsfläche, wenn Luftblasen zu sehen sind, um sie zu lösen. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt „a“, wenn immer noch Luftblasen zu sehen sind.

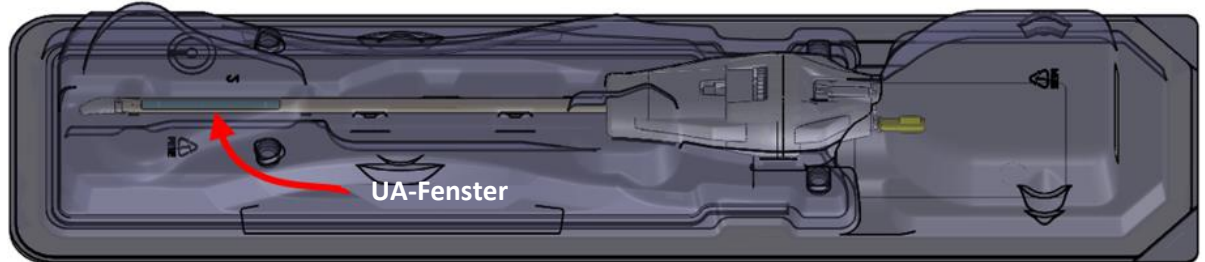


Abbildung 18: UA-Fenster

- h. Wenn die Spülpumpe noch eingeschaltet ist, diese über die PSIB-Anzeige (oder die TDC) ausschalten, indem Sie im UA-Kreislauf auf **Aus** klicken (*Abbildung 11*).
- i. Legen Sie das UA-Paket (mit der flachen Seite nach oben) auf eine Arbeitsfläche. Schließen Sie das UA-Kabel von der PSIB an den UA an, indem Sie das UA-Kabel drehen, bis der kodierte Schlitz des Steckers mit dem UA-Anschluss übereinstimmt.
- j. Platzieren und fixieren Sie das UA-Paket so lange auf der Arbeitsfläche, bis es in den Patienten eingeführt werden kann.

**WICHTIGER HINWEIS:** Falls sich der UA-Schlauchsatz nach der ersten Befüllung und Spülung ablöst, müssen Sie den UA wieder von Blasen freispülen.

9. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, sobald UA und ECD von allen Luftblasen frei gespült wurden und für den Einsatz im Patienten bereit sind.

### 5.c.ii Gerätekontrollen vor der Behandlung

Die TDC-Software wurde unter dem Gesichtspunkt entwickelt, dass der Anwender Gerätekontrollen vor der Behandlung vornehmen kann, bevor der Patient eintrifft. Diese Kontrollen stellen sicher, dass vor Beginn der Patientenbehandlung alle Geräte korrekt eingerichtet wurden und ordnungsgemäß funktionieren.

#### **HF-Verbindungstest**

- Vergewissern Sie sich, dass der UA mit dem UA-Schlauchsatz verbunden ist und keine Luftblasen enthält (siehe *Ausspülen aller Luftblasen aus dem UA*).
- Ohne den UA aus der Verpackung zu nehmen, stellen Sie sicher, dass das UA-Kabel an der Rückseite des UA angeschlossen ist. Achten Sie darauf, dass der UA-Griff steril bleibt.
- Kontrollieren Sie, ob alle HF-Kabel angeschlossen sind und die Systemelektronikeinheit eingeschaltet ist.

- Klicken Sie auf der Registerkarte **HF** der PSIB-Anzeige (Abbildung 19) oder in der HF-Informationsbox im Arbeitsbereich *Einrichtung* (Abbildung 20) auf **UA prüfen**. Das System sendet kurze Leistungspakete an alle zehn UA-Elemente, um Kontinuität und Funktion aller zehn Kanäle sicherzustellen.

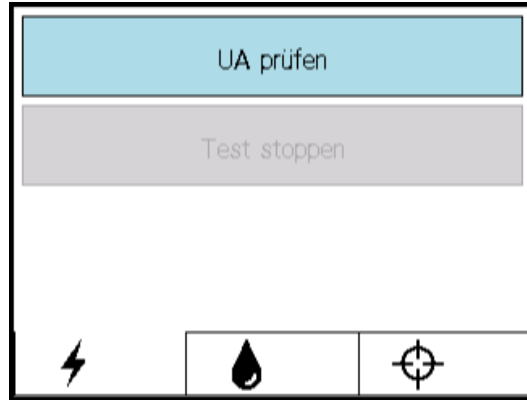


Abbildung 19: PSIB-Anzeige – Registerkarte „RF“ (HF)

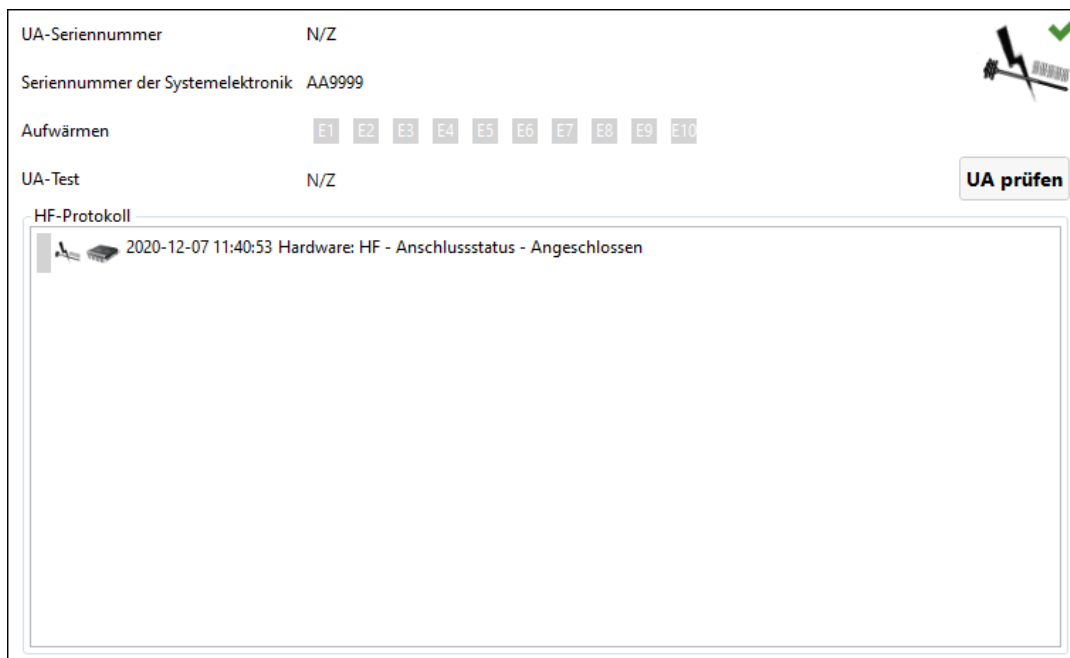


Abbildung 20: HF-Informationsbox im Arbeitsbereich „Einrichtung“

Nach Abschluss des HF-Leistungstests zeigt die PSIB eine kurze Meldung an (*Abbildung 19*). Detaillierte HF-Testergebnisse finden Sie in der HF-Informationsbox der TDC-Software (*Abbildung 21*).

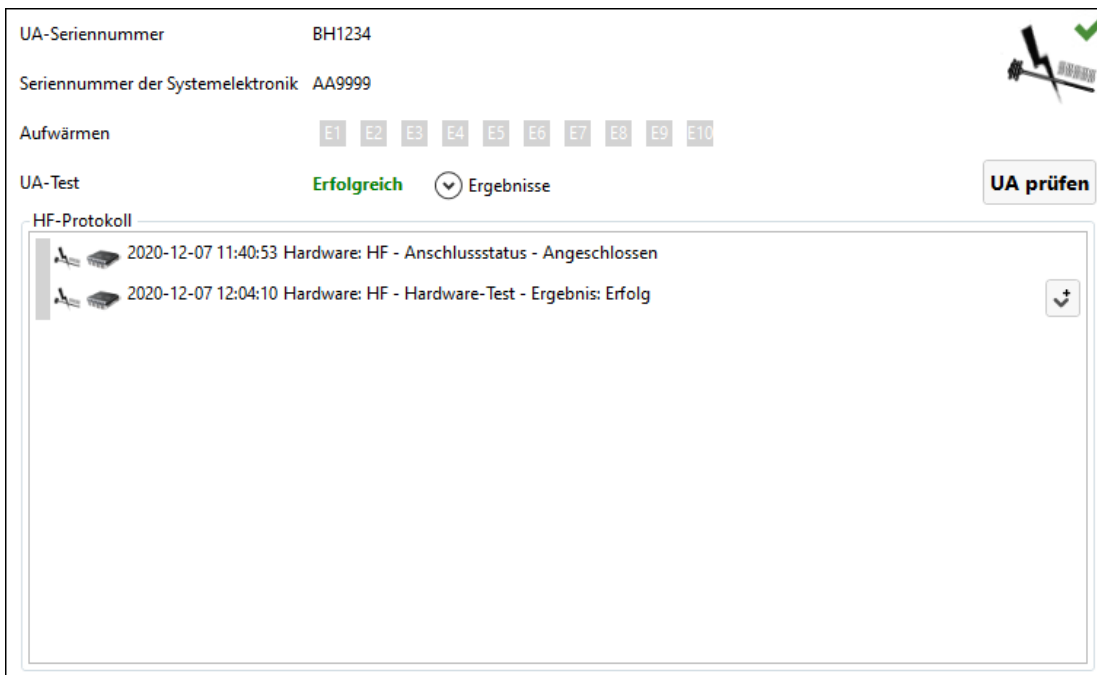


Abbildung 21: HF-Informationsbox nach erfolgreichem UA-Test



**HINWEIS:** Wenn Sie den UA nach Abschluss des UA-Tests austauschen, erkennt die TDC-Software die Änderung der Ausrüstung. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie die Einrichtungsphase mit **Entsperren** freischalten und den Test mit dem neuen UA durchführen.

Trennen Sie das UA-Elektronikkabel von der Rückseite des UA, um sich auf den Transport der Geräte zum MRT-Tisch vorzubereiten. Auch hier ist darauf zu achten, dass der UA-Griff steril bleibt.

### **PS-Test**

1. Wählen Sie auf der PSIB-Anzeige die Registerkarte **PS** aus. Am PS-Greifer darf kein UA befestigt sein. Kontrollieren Sie, dass das Kabel zwischen PS und PS-Schnittstellenbox (PSIB) nicht das Bewegen des PS entlang seiner Verschiebungsachse blockiert.
2. Klicken Sie in der PSIB-Anzeige auf **PS prüfen** (*Abbildung 22*). (Dies kann auch über den Arbeitsbereich TDC *Einrichtung* (*Abbildung 8*) in der PS-Informationsbox im rechten unteren Quadranten erfolgen *Abbildung 23*.)



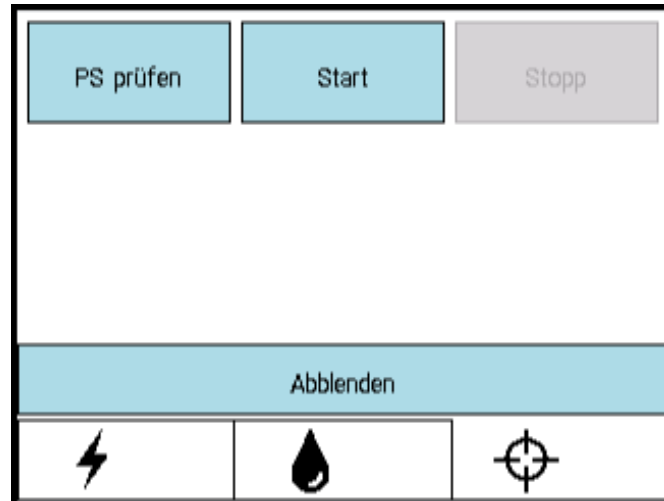


Abbildung 22: PSIB-Anzeige – Registerkarte „PS“

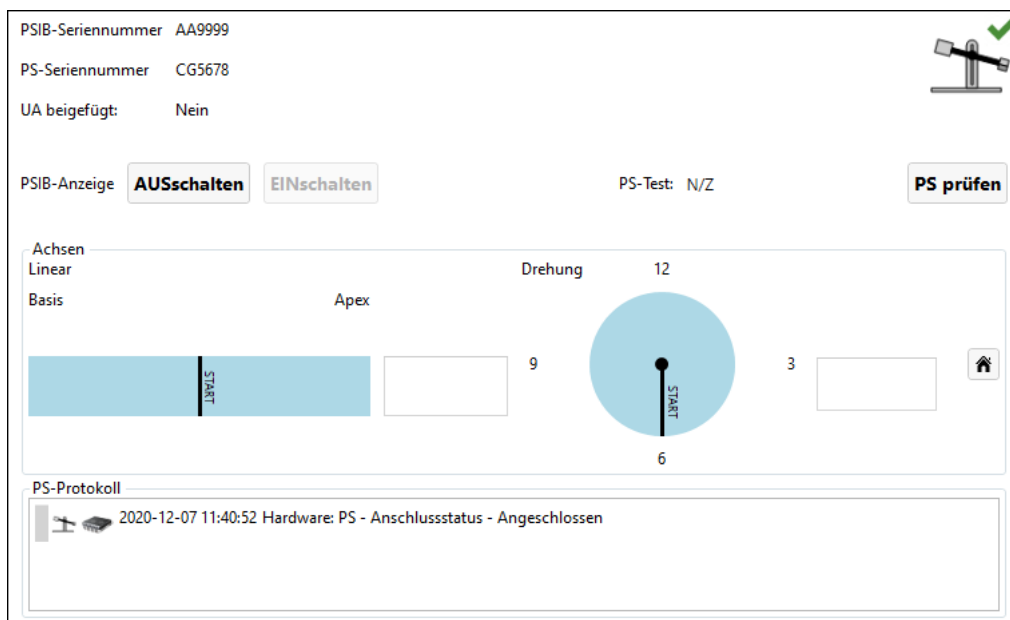


Abbildung 23: PS-Informationsbox im Arbeitsbereich „Einrichtung“

Das System überträgt die Vorwärts- und Rückwärtsfunktion des PS, um die Kontinuität und Funktion der Translationsachse sowie das Zentrieren des PS in der Translationsachse zu prüfen. Das System dreht auch die Rotationsachse im und gegen den Uhrzeigersinn, um die Kontinuität und Funktion der Rotationsachse zu prüfen.



**HINWEIS:** Falls Sie den PS nach Abschluss des PS-Tests austauschen, erkennt die TDC-Software die Änderung der Ausrüstung. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie die Einrichtungsphase mit **Entsperren** freischalten und den Test mit dem neuen PS durchführen.

## 6. Patientenpositionierung vor der Bildgebung

Die Patientenpositionierung vor der Bildgebung beinhaltet das Auflegen des Patienten auf den bereits vorbereiteten MRT-Tisch, das korrekte Positionieren über der Bildgebungsspule, das Fixieren mit Beinstützen und den entsprechenden Gurten sowie das Einleiten einer MRT-Anästhesie und Patientenüberwachung.

Dieser Schritt wird vom MRT-MTRA durchgeführt, wobei der Anästhesist spezifische Unterstützung liefert und alle Mitglieder des klinischen Teams physische Hilfe für einen sicheren Patiententransport leisten.

### MRT-MTRA:

1. Transportieren Sie den Patienten mit eingesetztem Führungsdraht auf einer MRT-kompatiblen Trage oder durch Abkoppeln der MRT-Liege in den MRT-Raum.
2. Legen Sie den Patienten in Rückenlage mit dem Kopf voran auf den Spulenhalter auf die MRT-Liege.
3. Stellen Sie sicher, dass sich die sagittale Mittellinie des Patienten genau in der Mitte des Tisches und der Behandlungsbereich in der Mitte der Spule befinden.
4. Bitten Sie eine helfende Person, die Beine des Patienten nacheinander anzuheben, während Sie die Beinstützen einrichten:
  - a. Die Beinstützen in die dafür vorgesehenen Schlitze der Basisplatte einsetzen. Die Stifte der Beinstützen dienen als Führung für die Platzierung in den Basisplattenschlitzen (*Abbildung 24*).

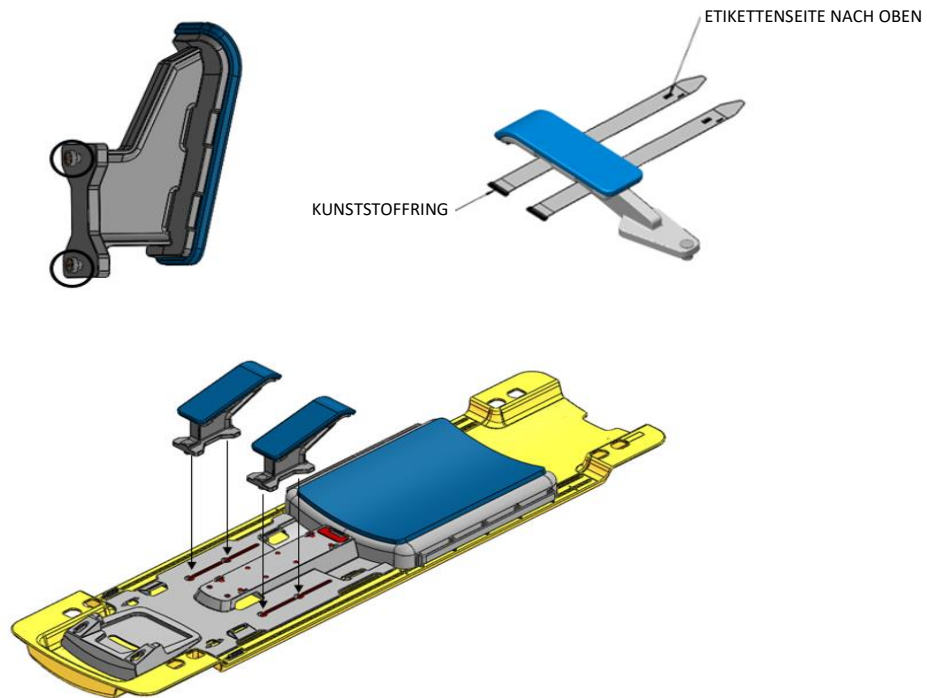


Abbildung 24: Beinstützen und Anbringen der Beingurte

---

- b. Passen Sie die Positionen der Beinstützen entlang der Schlitz in der Basisplatte an, um die Beine des Patienten in die Behandlungspositionen zu bringen (Abbildung 25).

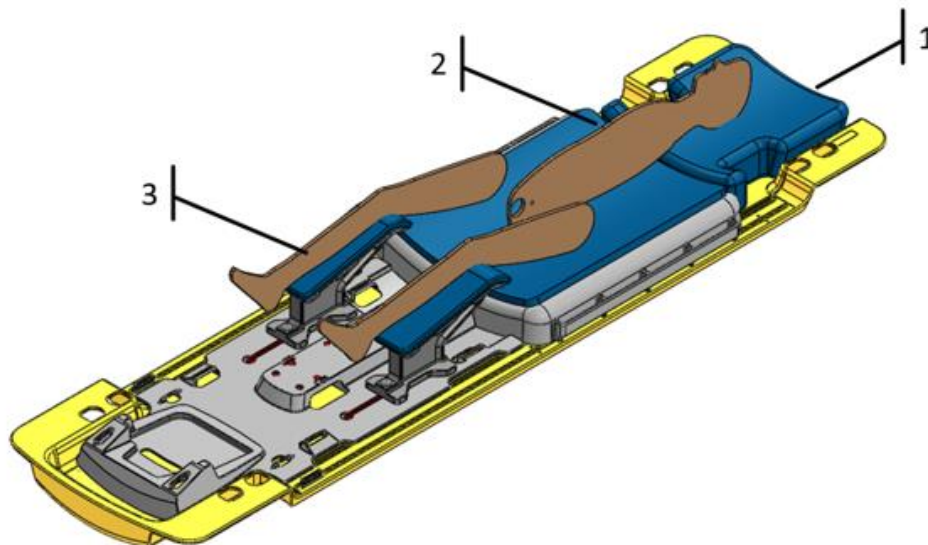


Abbildung 25: Positionierung des Patienten

---

- c. Führen Sie vier Beingurtzusätze lose ein, indem Sie den Gurt mit der Etikettenseite nach oben durch die Beinstützenschlitzte einfädeln (*Abbildung 26*).
- d. Stützen Sie die Beine des Patienten und passen Sie die beiden Beinstützen entlang der Schlitzte der Basisplatte in Abhängigkeit von der Position des Patienten an (*Abbildung 26*).
- e. Von den vier zuvor montierten Beinstützensgurten wickeln Sie jeweils einen Beinstützensgurt um das Bein des Patienten und führen Sie ihn durch den Kunststoffring. Klappen Sie dann jeden Gurt zurück, um ihn zu befestigen (*Abbildung 26*).

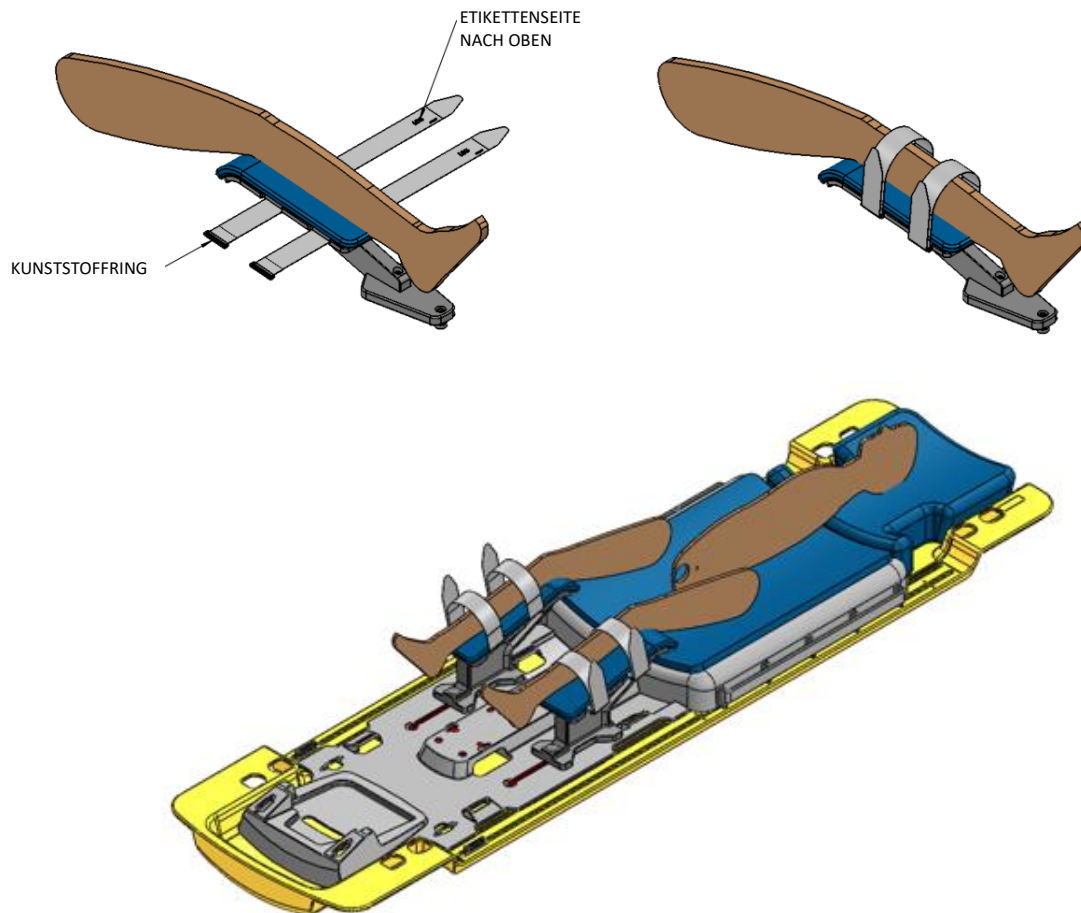


Abbildung 26: Anbringen der Beingurte

5. Schützen Sie den Patienten mit einem Gehörschutz auch dann vor MRT-bedingten Hörschäden, wenn er unter Vollnarkose steht.

#### Anästhesist:

Vergewissern Sie sich, dass die Anästhesie- und Überwachungsleitungen angebracht und ordnungsgemäß entlang des MRT-Tischs verlegt sind.

## 7. Einführen des Geräts

Der **Urologe** führt den Ultraschallapplikator (UA) und das endorektale Kühlgerät (ECD) mit Unterstützung des **MRT-MTRA** in den Patienten ein.

### 7.a Vorbereiten des UA

Vor dem Einführen des Ultraschallapplikators (UA) müssen Sie einen Abschlusstest auf Luftblasen bzw. Lecks durchführen.

1. **MRT-MTRA**: Spülen Sie den UA mit Wasser über die Registerkarte Flüssigkeitskreislauf (**FC**) in der PSIB-Anzeige (oder in der FC-Informationsbox des Arbeitsbereichs „Einrichtung“ in der TDC) durch Klicken auf **EIN**.
2. **MRT-MTRA**: Vergewissern Sie sich, dass das UA-Kabel nicht mit dem UA verbunden ist.
3. **MRT-MTRA**: Entfernen Sie die gelbe Kappe von der Rückseite des UA, und bewahren Sie diese zur späteren Verwendung auf. Die gelbe Kappe darf nicht abhandenkommen.
4. **MRT-MTRA**: Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung, die den UA in der Verpackung umschließt, ohne den UA zu berühren, um die Sterilität zu erhalten.
5. **MRT-MTRA**: Halten Sie die UA-Schalenverpackung an den langen Schalenkanten fest und biegen Sie die Schale nach außen, um den UA von den Schnappstellen zu lösen (*Abbildung 27*).
6. **Urologe**: Nehmen Sie den UA mit einer durch sterile Handschuhe geschützten Hand aus der Verpackung, indem Sie das Ende mit dem weißen Kunststoffgriff greifen.

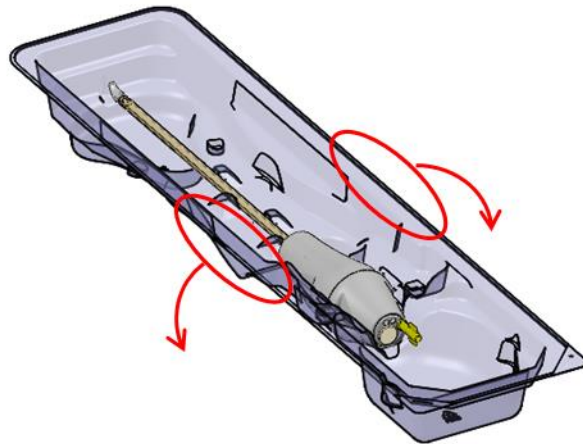


Abbildung 27: Herausnehmen des UA aus der Schalenverpackung

---

7. **Urologe:** Überprüfen Sie den UA entlang der Schaftlänge sorgfältig auf Wasserlecks und achten Sie dabei auf die in *Abbildung 28* dargestellten Bereiche. Wenn Sie Wasser sehen, ist der UA defekt und darf nicht verwendet werden.

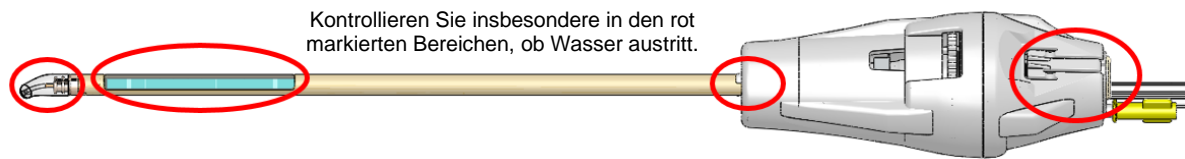


Abbildung 28: Bereiche, die auf Wasserundichtigkeiten im UA untersucht werden müssen

8. **Urologe:** Kontrollieren Sie das UA-Fenster sorgfältig auf Luftblasen jeglicher Größe. Klopfen Sie vorsichtig mit einem sterilen Handschuh neben das UA-Fenster, wenn Sie Luftblasen sehen, um diese zu lösen. Das Gerät darf erst dann eingeführt werden, wenn keinerlei Luftblasen mehr zu sehen sind.

## 7.b Einführen des UA

1. **MRT-MTRA:** Öffnen Sie steriles Gleitmittel und stellen Sie es dem Urologen bei Bedarf zur Verfügung
2. **Urologe:** Geben Sie steriles Gleitmittel direkt in die Harnröhre und auf das akustische Fenster des UA. Dabei dürfen keine Blasen entstehen.
3. **Urologe:** Fädeln Sie den Führungsdraht unter Benutzung steriler Handschuhe durch die Spitze des UA und führen Sie den UA mittels des Führungsdrahts in die Prostata ein.
4. **Urologe:** Vergewissern Sie sich, dass der UA in den Blasen Hals eingedrungen ist.
5. **Urologe:** Entfernen Sie den Führungsdraht, aber belassen Sie den UA an Ort und Stelle.
6. **MRT-MTRA:** Schalten Sie den UA-Fluss an der PSIB aus.



**Vergewissern Sie sich vor Beginn der MRT-Bildgebung mit dem Patienten, dass der Führungsdraht entfernt wurde. Der Führungsdraht wurde nicht auf Patientensicherheit während der MR-Bildgebung getestet.**

## 7.c Anbringen des Positionierungssystems am Ultraschallapplikator



**Für dieses Verfahren sind zwei Personen erforderlich: Eine Person hält den UA in einem natürlichen Winkel und der andere Anwender bewegt das PS in die gewünschte Position. Wenn Sie dieses Verfahren mit nur einer Person durchführen, kann dies den Patienten physisch verletzen.**

1. **Urologe:** Halten Sie den UA-Griff so, dass sich der UA in einem natürlichen Winkel im Patienten befindet, während der MRT-MTRA das PS installiert und justiert, um den UA im PS-Greifer zu erfassen.

2. **MRT-MTRA:** Legen Sie Positionierungssystem (PS) und PSIB auf die Basisplatte, die sich am Fuß des MRT-Tischs befinden muss. Das PS muss sich zwischen den Beinen des Patienten befinden.
3. **MRT-MTRA:** Befestigen Sie das PS mit den mitgelieferten Flügelschrauben an der Basisplatte (*Abbildung 29*). Bei Basisplatten mit Schnappverschluss ist das PS mit dem Schnappverschluss zu fixieren (*Abbildung 30*).

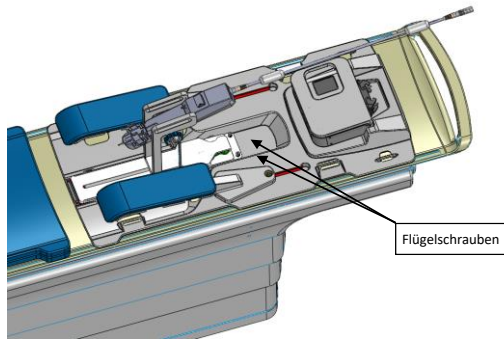


Abbildung 29: PS und PSIB auf der Basisplatte

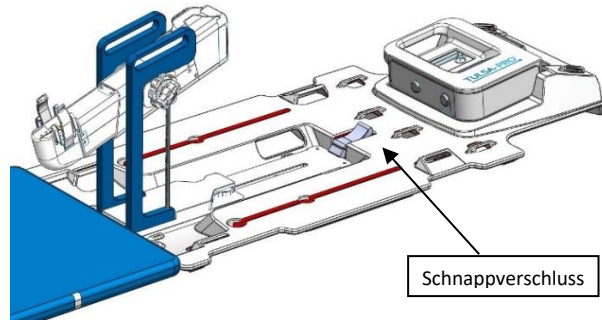


Abbildung 30: PS und PSIB auf der Basisplatte mit Schnappverschluss

4. **MRT-MTRA:** Das PS-Kabel darf das Bewegen des PS entlang seiner Verschiebungsachse nicht blockieren.
5. **MRT-MTRA:** Bringen Sie das PS manuell in Position, sodass der UA-Greifer im natürlichen Winkel des UA im Patienten ausgerichtet ist. Passen Sie die Basis des PS manuell in der Höhe und im Vorschub an, und neigen Sie die Linearachse des PS nach oben und nach unten (*Abbildung 31*).

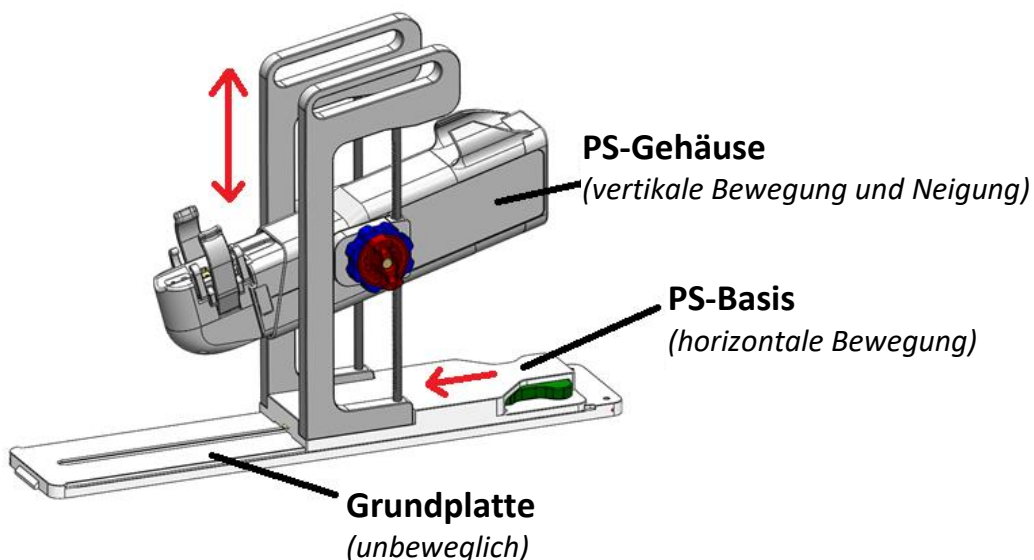


Abbildung 31: Einstellen des Positionierungssystems





**HINWEIS:** Drehknöpfe und Hebel des PS besitzen keine Farbkennzeichnung wie in *Abbildung 31* gezeigt. Sie sind hier lediglich zum Veranschaulichen dieser Anweisungen farblich gekennzeichnet.

- i. Stellen Sie die Basis des PS manuell ein. Drücken Sie dafür zunächst den **grünen** Hebel, um es von seiner Position zu lösen. Schieben Sie dann die Basis des PS in Position, und lassen Sie den **grünen** Hebel los, sodass er einrastet.
- ii. Stellen Sie die Linearachse des PS ein, indem Sie den **roten** Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, sodass die vertikale Achse und Neigung gelöst wird. Drehen Sie den **blauen** Knopf, um die Linearachse des PS in der Vertikalen zu bewegen, und drehen Sie dann die Linearachse des PS, um die gewünschte Neigung zu erreichen. Drehen Sie den **roten** Knopf im Uhrzeigersinn, um beide Achsen zu verriegeln.

Vor der Vor- und ZurückEinstellung der PS-Basis ist sicherzustellen, dass die entsprechende Verriegelung vollständig gelöst ist. Greifen Sie die Plattform neben der Freigabevorrichtung als Hebel, um sie vorwärts oder rückwärts zu bewegen.



**HINWEIS:** Die PS-Position darf nur in Vor- oder Rückbewegung eingestellt werden. Drücken Sie die automatische Linearachse nicht aus ihrer translationalen Ausgangsposition heraus.

6. **MRT-MTRA:** Halten Sie den UA-Griff im UA-Greifer des PS fest (*Abbildung 32*). Der UA darf nicht in seine Position „gezwungen“ werden. Sollte dies der Fall sein, den UA vom UA-Greifer lösen und die PS-Achsen anpassen, um eine bessere Ausrichtung mit dem UA zu erreichen. Vor dem Befestigen des UA im Greifer des PS ist sicherzustellen, dass die Auf- und Ab-Entriegelungsknöpfe und die Kipp-Entriegelungsknöpfe am PS verriegelt sind.
7. **MRT-MTRA:** Schließen Sie das UA-Kabel von der PSIB an der Rückseite des UA an. Der Anschluss ist codiert und passt nur in eine Richtung. Führen Sie das UA-Kabel und den UA-Schlauchsatz mit minimalem Verwickeln oder Verdrehen der Kabel durch die Kabelführung auf der Oberseite des PS. Die Kabelklemme muss in ihrer Aussparung am PS liegen.



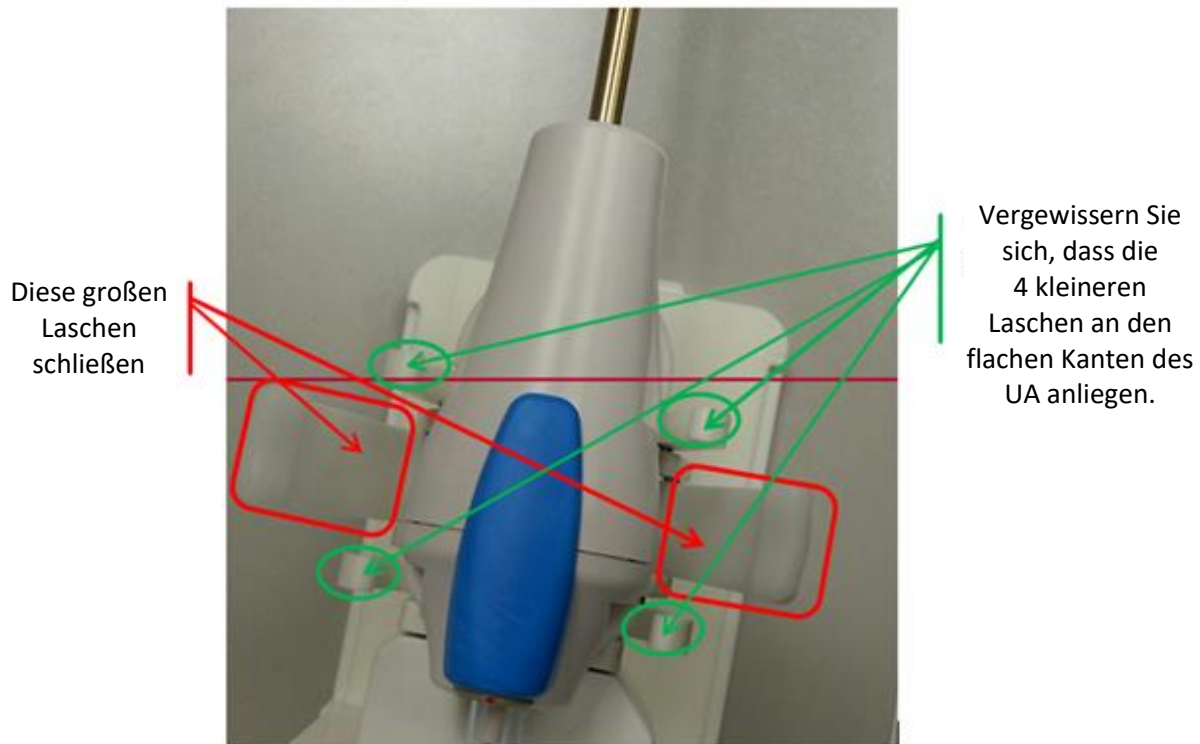


Abbildung 32: UA auf PS mit UA-Griff im UA-Greifer montiert

## 7.d Einführen des ECD

Der **Urologe** führt das endorektale Kühlgerät (ECD) mit Hilfe des **MRT-MTRA**, der dem **Urologen** ECD, Gleitmittel und Kochsalzspritze übergibt, ein.

### **So führen Sie das ECD zum ersten Mal ein:**

1. **Urologe:** Tragen Sie 5 bis 10 ml niedrigviskoses Gleitmittel auf Ihren Handschuh auf, und wischen Sie die vordere rektale Fläche ab.
2. **Urologe:** Tragen Sie 10 bis 15 ml des gleichen Gleitmittels auf das ECD auf. Vergewissern Sie sich, dass das Gleitmittel das Kühlfenster an der vorderen Oberfläche des ECD vollständig bedeckt.
3. **Urologe:** Wenn der Flüssigkeitsschlauch angeschlossen ist, das ECD mit einer Drehbewegung einführen. Beginnen Sie dabei mit der Ausrichtung des ECD-Fensters nach 9:00 Uhr und drehen Sie es im Uhrzeigersinn bis 12:00 Uhr, während Sie gleichzeitig Druck nach oben auf die vordere Rektumwand ausüben. Das ECD so weit wie möglich einführen, bis Sie einen Widerstand spüren.
4. **Urologe:** Das ECD-Kühlfenster muss sich neben der Prostata befinden und zur Prostata zeigen, wobei sich der ECD-Griffhals am Analrand befindet und die erhöhte, fühlbare Kante am ECD-Griff nach anterior zeigt.

5. **Urologe:** Den ECD-Ballon nach der Bestätigung der Ausrichtung mit 15 bis 20 ml Kochsalzlösung füllen, um den Aufwärtsdruck gegen die vordere Rektumwand aufrechtzuerhalten. Der ECD-Ballon hat eine maximale Kapazität von 30 ml. Unter Umständen muss der Ballon bei Bedarf weiter befüllt werden, bis das ECD sicher im Rektum positioniert ist.

In Abschnitt *Grobpositionierung* finden Sie Anweisungen zur Verwendung von MRT-Bildern, um die richtige Ballongröße und eine sichere ECD-Platzierung sicherzustellen.



**Das Überfüllen des Ballons im Analkanal bzw. Rektum kann insbesondere dann, wenn er für längere Zeit überfüllt ist, zur Dehnung und einem möglichen Trauma führen. Außerdem kann das Überfüllen des Ballons bis zum Bersten ebenfalls zu einem Gewebetrauma führen.**

**Bei unzureichendem Befüllen des Ballons besteht das Risiko, dass das ECD während der Behandlung herausgleitet. Dies würde zu einer unzureichenden Kühlung der Rektumwand und zu unbeabsichtigten thermischen Schäden am Rektum und möglicherweise zu Fisteln führen.**

6. Es gibt keine Komponente, die das ECD hält; daher müssen Sie sicherstellen, dass es während der MR-Bildgebung und -Behandlung fest sitzt und tief eingeführt ist.

***So passen Sie das ECD an:***

1. **MRT-MTRA:** Lassen Sie vorübergehend 5 bis 10 ml Kochsalzlösung aus dem Ballon ab.
2. **Urologe:** Drehen Sie das ECD nach links und rechts, während Sie gleichmäßig nach oben drücken.
3. **MRT-MTRA:** Wenn das ECD-Kühlfenster korrekt ausgerichtet ist, den Ballon erneut mit 10 bis 15 ml (idealerweise mit 5 ml mehr Flüssigkeit als bei der ersten Einführung) auffüllen.
4. Auch hier gibt es keine Komponente, die das ECD hält. Achten Sie daher darauf, dass es während der MR-Bildgebung und -Behandlung fest sitzt und tief eingeführt ist.



## 8. Patientenpositionierung für die MRT


Nachdem der Patient auf den MRT-Tisch umgelagert wurde und der Ultraschallapplikator (UA) und das endorektale Kühlgerät (ECD) eingesetzt wurden, sichert der MRT-MTRA die Patienten- und Bildgebungsspulen und kontrolliert, ob die Geräte für die Bildgebung bereit sind. Der Anästhesist führt eine abschließende Prüfung durch.

### 8.a Fixieren des Patienten


Der MRT-MTRA legt Fixiergurte um den Patienten, um eine Bewegung des Beckens während der MR-Bildgebung zu verhindern, und positioniert die vordere Spule.

1. Bringen Sie zwei Abdomen-Arm-Gurte an den in *Abbildung 33* gezeigten Stellen an. Das Anbringen der Abdomen-Arm-Gurte kann wie folgt erfolgen:
  - a) Führen Sie den Abdomen-Arm-Gurt mit dem Klettverschluss nach oben durch die Seitenschiene des Spulenhalters.
  - b) Fädeln Sie den Abdomen-Arm-Gurt durch den Kunststoffring, um ihn an der Schiene zu befestigen.
  - c) Wickeln Sie den Abdomen-Arm-Gurt um den Bauchbereich des Patienten. Führen Sie den Abdomen-Arm-Gurt durch die Seitenschiene des Spulenhalters auf der gegenüberliegenden Seite der MRT-Liege.
  - d) Befestigen Sie den Abdomen-Arm-Gurt abschließend an sich selbst, um ihn zu fixieren.

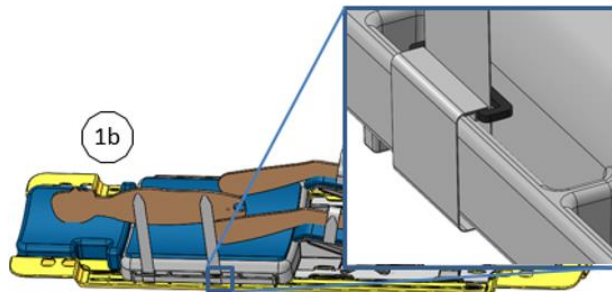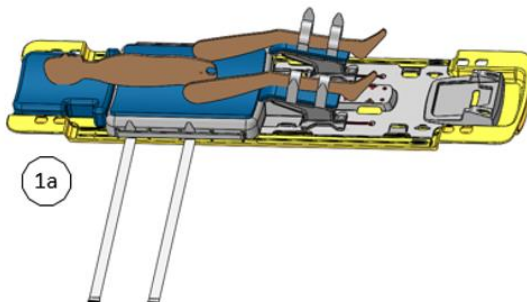

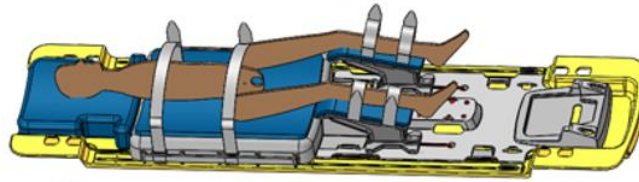

1c

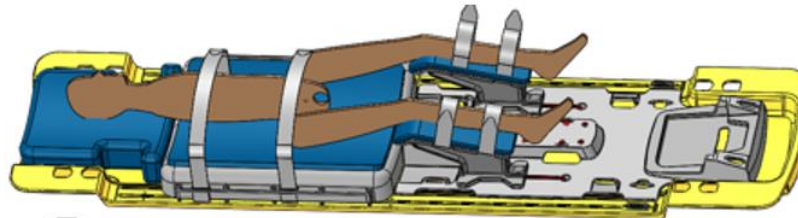


1d

Abbildung 33: Anbringen der Abdomen- und Armgurte

---

2. Legen Sie die vordere Bildspule über das Becken des Patienten. Die Spule muss die Prostata so abdecken, dass sie die Bewegung des Positionierungssystems nicht beeinträchtigt (Abbildung 34).

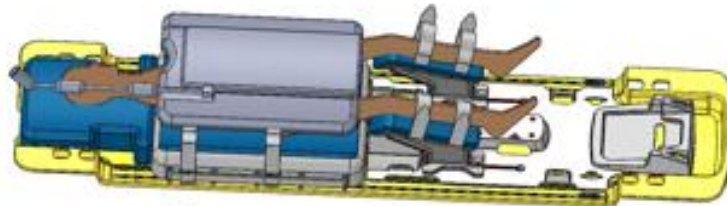

1

Abbildung 34: Platzierung der vorderen Bildspule

---

3. Bringen Sie zwei Vorderspulen-Gurte an den in *Abbildung 35* gezeigten Stellen an. Das Anbringen der Vorderspulen-Gurte kann wie folgt erfolgen:
  - a) Den Vorderspulen-Gurt mit dem Klettverschluss nach oben durch die Seitenschiene des Spulenhalters führen.
  - b) Führen Sie den Vorderspulen-Gurt durch den Kunststoffring, um ihn an der Schiene zu befestigen.
  - c) Wickeln Sie den Vorderspulen-Gurt um die Spule. Führen Sie den Vorderspulen-Gurt durch die Seitenschiene des Spulenhalters auf der gegenüberliegenden Seite der MRT-Liege.
  - d) Befestigen Sie den Vorderspulen-Gurt an sich selbst, um ihn zu fixieren.

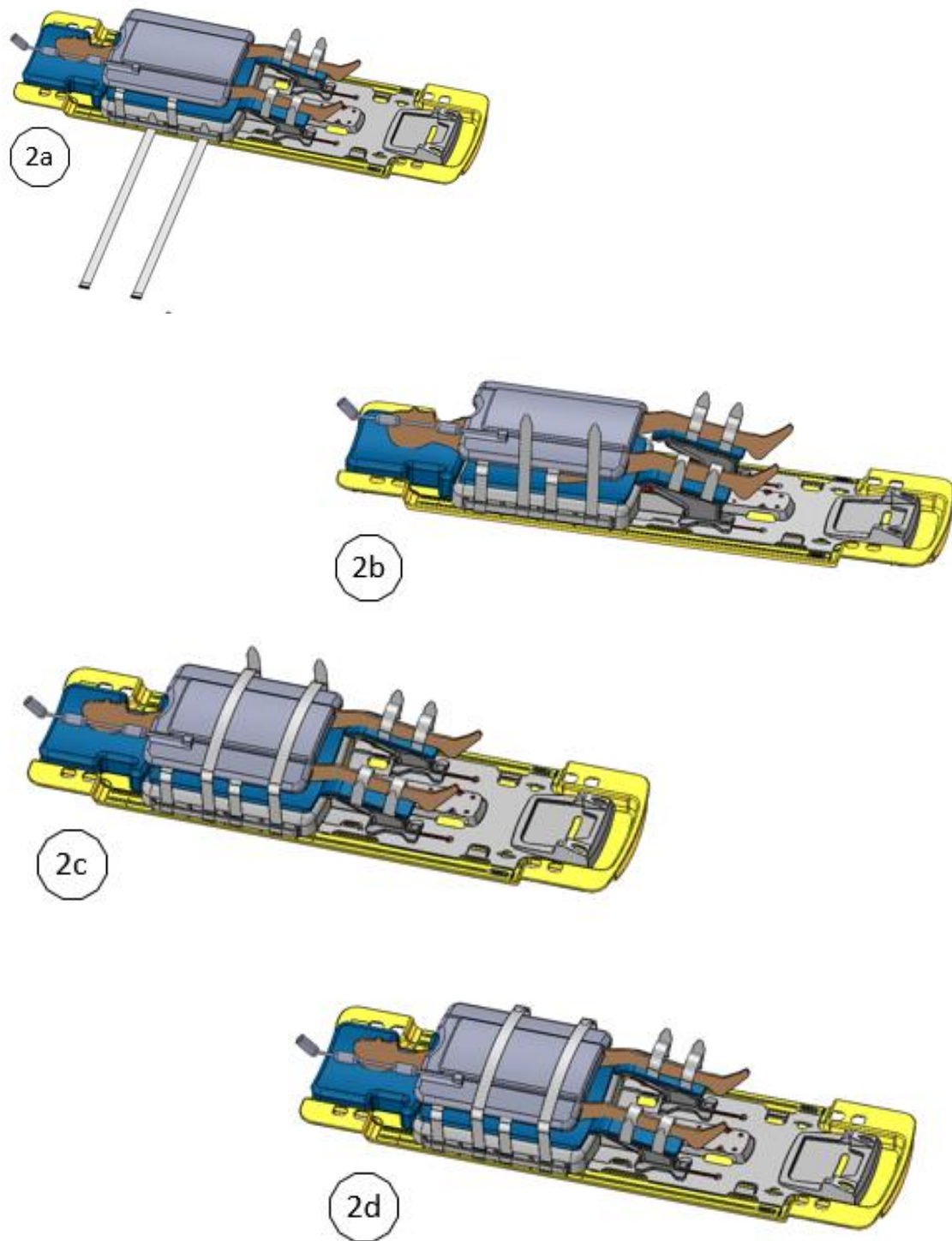


Abbildung 35: Anbringen der Vorderspulen-Gurte

4. Verwenden Sie für den Komfort des Patienten Laken, um ihn warm zu halten, und Polster, um Druckpunkte zu vermeiden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Haut des Patienten die Spulen oder die MRT-Öffnung nicht direkt berührt.
5. *Abbildung 36* Befestigen Sie zwei Schlauch-/Kabellaschen gemäß den Anweisungen in an den in *Abbildung 36* gezeigten Stellen.

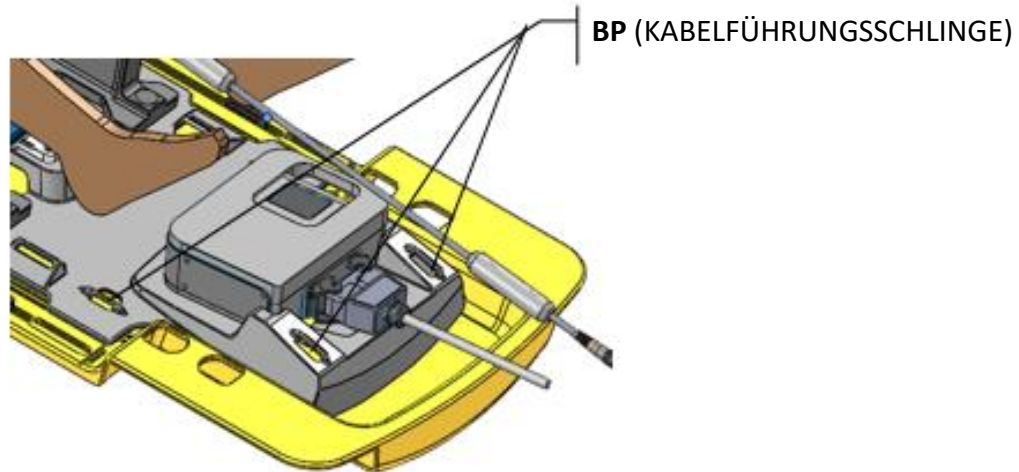


Abbildung 36: Lage der Schlauch-/Kabellaschen auf der Basisplatte

---

- a) Führen Sie zuerst die Schlauch-/Kabellasche mit der Etikettenseite nach oben durch die Kabelführungsschlinge auf der Basisplatte.
- b) Führen Sie die Schlauch- und Kabellasche durch den Kunststoffring, um sie an der Basisplatte zu befestigen.
- c) Falten Sie abschließend die Schlauch-/Kabellasche über die Kabel oder Schläuche und befestigen Sie diese an sich selbst. Verwenden Sie je nach MRT-Raumteilung ein Band zum Führen der Schläuche und ein weiteres Band zum Führen der Kabel, um zu vermeiden, dass man über Schläuche bzw. Kabel stolpert. Lassen Sie etwas Spielraum, damit die Kabel frei gleiten können.

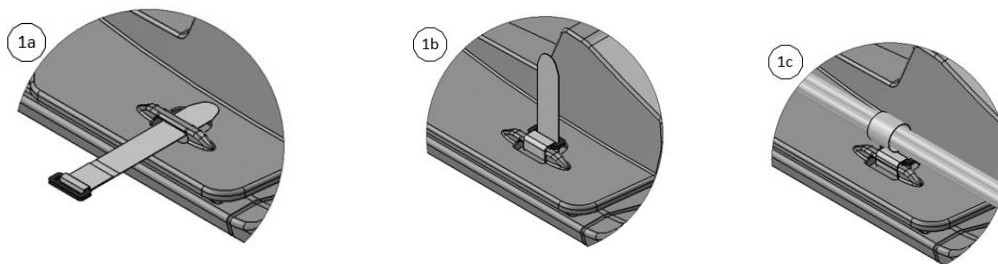


Abbildung 37: Befestigung von Schlauch-/Kabellaschen

---



- d) Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel, Schläuche oder andere Materialien eingeklemmt werden können, während der Tisch bewegt wird (*Abbildung 38*).

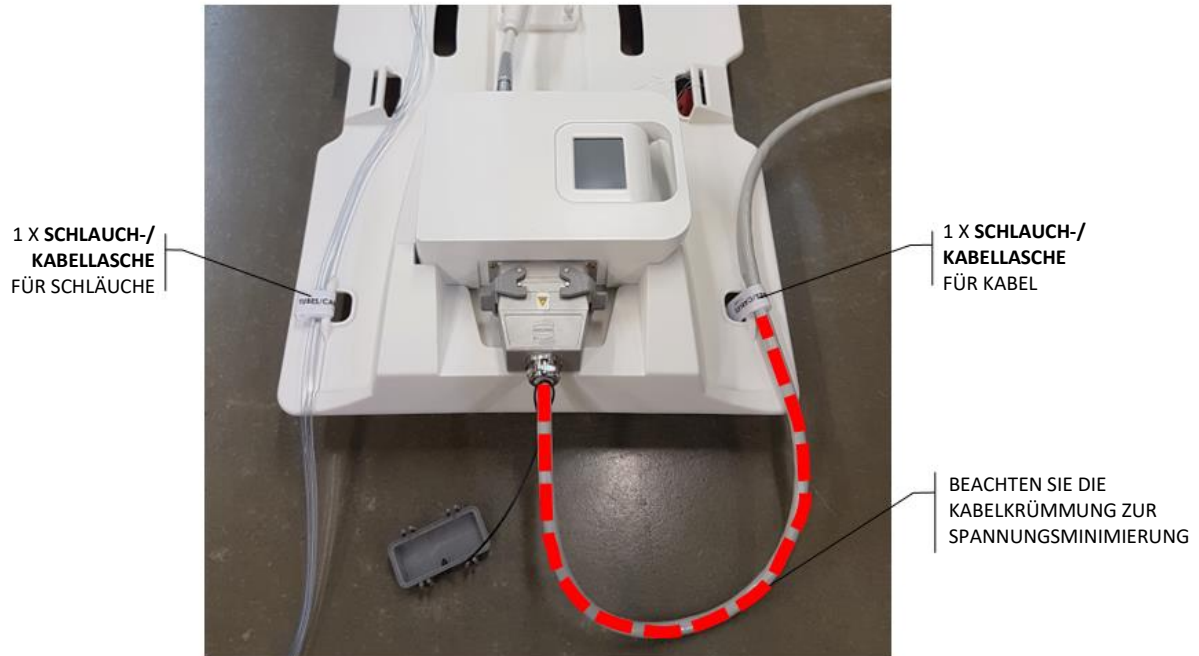


Abbildung 38: Schlauch- und Kabelführung

---

Anästhesist: Vergewissern Sie sich, dass die Leitungen frei sind und dass keiner der Gurte übermäßigen Druck auf Haut bzw. Gelenke des Patienten ausübt.

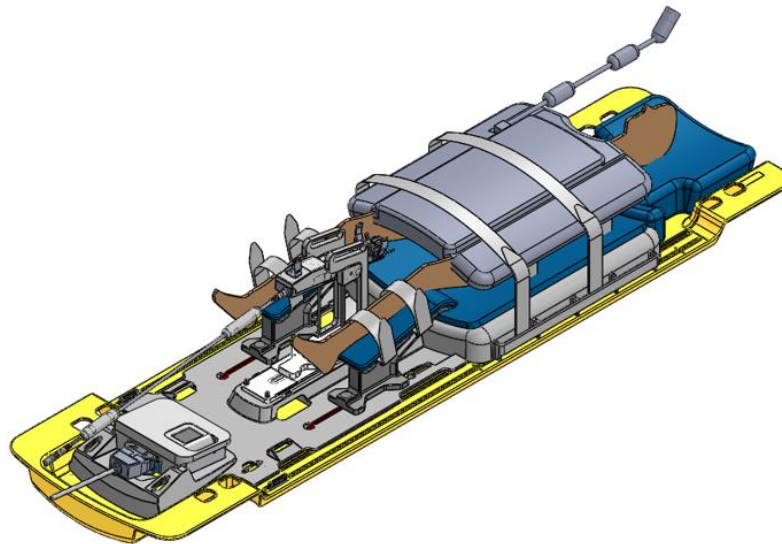



Abbildung 39: Abgeschlossene Patientenpositionierung

---

## 8.b Gerätekontrolle

Wenn der Patient für Bildgebung und Behandlung bereit ist, führt der MRT-MTRA eine Rotation des Ultraschallapplikators in die Ausgangsposition durch, überprüft, ob der Fluss zum UA und ECD ausgeschaltet ist, und schaltet den PSIB-Bildschirm aus.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte **PS** der PSIB-Anzeige auf  (Start). Das System dreht den UA im und gegen den Uhrzeigersinn, um die Ausgangsposition des UA zu finden, sodass das UA-Fenster nach unten zeigt (6:00). Kontrollieren Sie im MRT-Raum, dass die Rotationszentrierung ordnungsgemäß funktioniert.
2. Der UA- und ECD-Flüssigkeitsstrom sollte bereits ausgeschaltet sein oder kurz nach Ende der Referenzierung automatisch abschalten. Ist dies nicht der Fall, die UA- und ECD-Pumpen auf **AUS** schalten. Sie können die Pumpen über die TDC-Konsole (im Arbeitsbereich *Einrichtung*) oder über die PSIB-Anzeige steuern (die sich jedoch nach Abschluss der Referenzierung ebenfalls ausschalten sollte).
3. Vergewissern Sie sich, dass der PSIB-Bildschirm ausgeschaltet ist, indem Sie auf **Ausschalten** neben **PSIB-Anzeige** in der TDC (*Abbildung 23*) oder auf **Bildschirm ausschalten** im PSIB-Bildschirm drücken.

## 8.c Eingabe der „wichtigen Behandlungsetappen“

MRT-MTRA: Nach Abschluss der Referenzierung pulsieren die Symbole im Abschnitt „Wichtige Behandlungsetappen“ des TDC-Bildschirms, um Sie auf die Eingabe einiger Daten aufmerksam zu machen. Geben Sie vor dem Wechsel in die Behandlungsplanungsphase den Zeitpunkt, zu dem der Anästhesist den Sedierungsvorgang abgeschlossen, und den Zeitpunkt, zu dem der Urologe den UA eingeführt hat, ein. Die Aufzeichnung dieser Zeitpunkte ermöglicht eine bessere Schätzung der gesamten Dauer des Eingriffs und der gesamten Narkosezeit.

So zeichnen Sie diese Zeiten in der TDC auf:

1. Geben Sie im TDC-Arbeitsbereich *Einrichtung* unter **Wichtige Behandlungsetappen** (*Abbildung 40*) die Zeitpunkte für Sedierung und UA-Einführung ein.
2. Auf **Speichern** klicken. Der Bereich „Wichtige Behandlungsetappen“ wird grau, und die Schaltfläche **Speichern** wird durch **Bearbeiten** ersetzt.



Sie können diese Zeiten auch eingeben, nachdem die Behandlung abgeschlossen ist und der Bericht generiert wird.

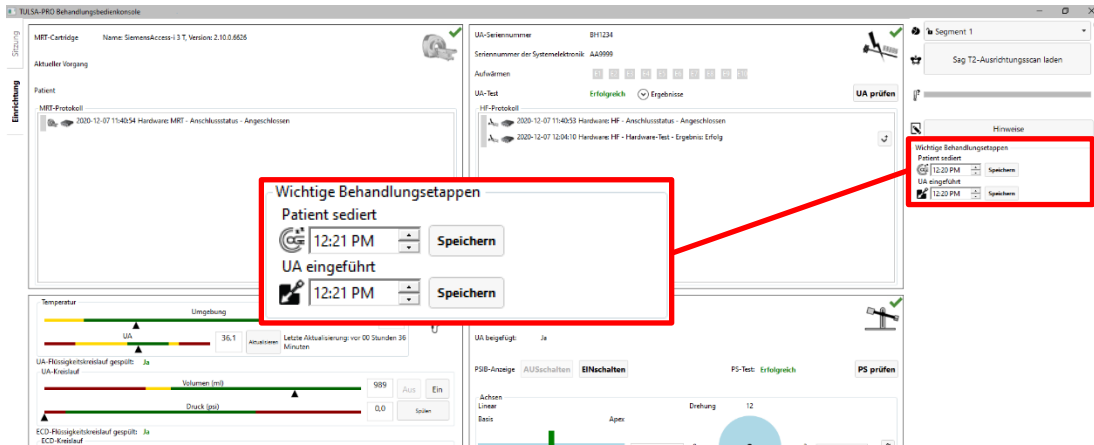


Abbildung 40: Eingabe der wichtigen Behandlungsetappen in den TDC-Arbeitsbereich „Einrichtung“

## 9. Behandlungsplanung

### 9.a Beginn der Bildgebung

Wenn der Patient für die Bildgebung positioniert ist, kann der MRT-MTRA die folgenden Anweisungen abarbeiten, um die Orientierungspunktposition festzulegen und mit der TULSA-PRO ExamCard Localizer-Bilder aufzunehmen.

In der folgenden Tabelle sind die TULSA-PRO® ExamCard-Sequenzen aufgeführt:

	Name der Messung	Zweck	TDC-Schritt
1	Localizer	Anfängliche MR-Planungssequenz	Einrichten
2	SAG B1 CAL	B1-Kalibrierung sagittal für SAG T2-Scan	Ausrichtung
3	SAG T2	Scan für die UA-Ausrichtung	Ausrichtung
4	AX B1 CAL	B1-Kalibrierung axial	Ausrichtung
5	AX THERM	Temperaturunsicherheit und Behandlungsverabreichung	Detailliert und Wärmezufuhr
6	AX T2	2D-Scan zur Prostata-Konturierung	Detailliert
7	AX T1	Kontrastverstärkter Scan	Nachbehandlung



**Stellen Sie vor dem Start sicher, dass die Eigenschaft „Tischverwendung“ in den ExamCard-Eigenschaften auf Ignorieren eingestellt ist**

1. Spulen und Patient sind so zu positionieren, dass die Prostata mit der Mitte der Spulen zentriert und in derselben vertikalen Linie ausgerichtet ist. Bei Bedarf die Position der anterioren MR-Bildgebungsspule einstellen.
2. Richten Sie das Laserfeld auf die Mitte der Spule aus, und legen Sie am MRT die Orientierungspunktposition fest.



**Befolgen Sie, wenn Sie den Patienten zurück in die Orientierungspunktposition der MR-Öffnung bewegen, stets die Anweisungen unter *Bewegen des Patienten in die Orientierungspunktposition***

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel und Schläuche in Kabellaschen am Ende der Basisplatte gesichert sind und der zum suprapubischen Katheter führende Urinsammelbeutel fixiert und unbehindert ist.
4. Achten Sie darauf, dass die hintere Spule in der aktuellen ExamCard abgekoppelt ist, bevor Sie den Patienten in die Magnetöffnung bewegen. Es ist wichtig, die hintere Spule **NICHT** zu verwenden. Bearbeiten Sie für das Abkoppeln der hinteren Spule die ExamCard-Eigenschaften, und ändern Sie die Einstellung „Abkoppeln der hinteren Spule“ von „Nein“ auf „Ja“ (Abbildung 41).

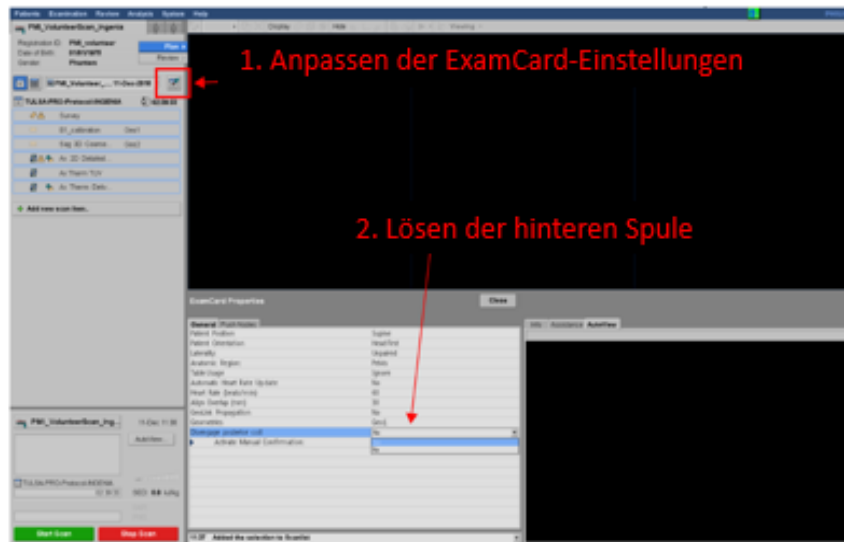


Abbildung 41: Ändern der Einstellung „Abkoppeln der hinteren Spule“ auf „Ja“

5. Öffnen Sie eine Sequenz, und navigieren Sie zur Registerkarte „Spulen“, um zu bestätigen, dass die hintere Spule abgekoppelt ist. Die dS Hintere Spule sollte ausgegraut sein und ein kleines Schloss anzeigen (Abbildung 42).

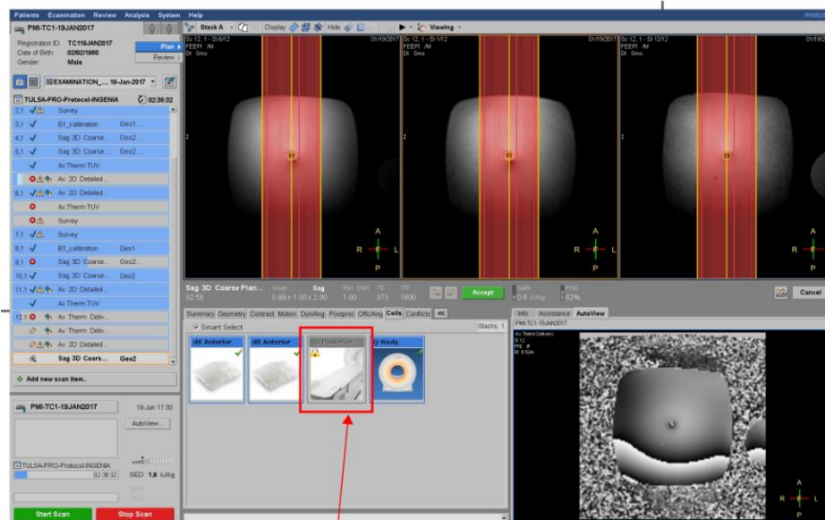


Abbildung 42: Abkoppeln der hinteren Spule

6. Den MRT-Tisch langsam zum Scannen vorschieben.
7. Führen Sie den **Localizer**-Scan aus.

### 9.a.i Bewegen des Patienten in die Orientierungspunktposition

Um die Ausrichtung der Scanbereiche zu gewährleisten, muss der Patient in der MR-Öffnung wieder an die gleiche mit einem Orientierungspunkt versehene Position bewegt werden. Drücken Sie dazu, wenn sich die MRT-Liege außerhalb der Magnetöffnung befindet, auf **Orientierungspunkt** am Scanner. Eine grüne LED leuchtet auf. Schieben Sie das Bett in die Magnetöffnung, indem Sie den Schiebeschalter nach oben drücken. Die Liege stoppt, wenn sie Orientierungspunktposition erreicht hat, woraufhin die grüne LED erlischt.

### 9.b Grobpositionierung

Der Radiologe bestimmt die Anfangspositionen des UA in der Prostata und des ECD im Rektum entweder anhand der Localizer-Bilder, einer schnellen sagittalen 2D T2-gewichteten (T2w) oder einer T1-gewichteten (T1w) Messung. Falls erforderlich, passt der Urologe die Gerätepositionen mithilfe des MRT-MTRA manuell an, um Luftblasen in oder um den UA und das ECD auf den MR-Bildern zu entfernen.

1. Radiologe: Zum Suchen nach Luftblasen im Rektum, die Bildgebung bzw. Ultraschallabgabe beeinträchtigen können, müssen Sie alle axialen und sagittalen Bilder durchgehen, die das UA-Fenster schneiden. Achten Sie dabei besonders auf den Einkerbungsbereich des ECD. Innerhalb des ECD bzw. zwischen ECD und Rektalwand neben der Prostata (im Ultraschallpfad) dürfen sich keine Luftblasen befinden.
2. Radiologe: Bestätigen Sie, dass die ECD-Platzierung optimal ist (*Abbildung 43*):
  - a. Das Kühlfenster muss die Prostata und den erwarteten Bereich der Ultraschallenergie abgabe des UA abdecken, wie auf der sagittalen MRT bestätigt.
  - b. Das Kühlfenster muss zur Prostata hin (anterior) ausgerichtet sein, wie auf der axialen MRT bestätigt.

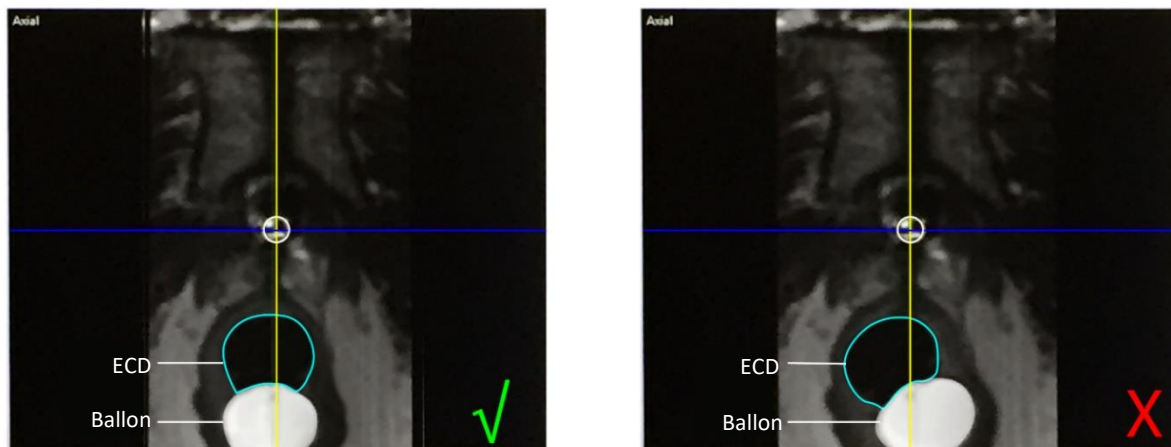



Abbildung 43: Mitte des Kühlfensters

3. Wenn die ECD-Platzierung nicht optimal ist oder sich das ECD verschoben hat, die ECD-Position im Rektum manuell anpassen und einen erneuten Scan durchführen, um die optimale Ausrichtung zu bestätigen:
  - a. Der **MRT-MTRA** bewegt den MRT-Patiententisch so weit aus der Magnetöffnung heraus, dass der Urologe das ECD einstellen kann.
  - b. Der **Urologe** passt die ECD-Position im Rektum manuell so an, dass das Kühlfenster zur Prostata zeigt, sich neben der Prostata befindet und den erwarteten Bereich der Ultraschallenergieabgabe des UA abdeckt.  
Um das ECD näher an die Prostata zu bringen bzw. Luftblasen aus dem Ultraschallpfad zu entfernen, können Sie den ECD-Ballon schrittweise in 5- bis 10-ml-Schritten bis zu einem Maximalvolumen von 30 ml mit Wasser oder Kochsalzlösung aufblasen.
  - c. Der **MRT-MTRA** fährt den MRT-Patiententisch vor und nimmt einen Localizer oder eine schnelle sagittale 2D T2- oder T1-Sequenz erneut auf, um Änderungen an der Gerätepositionierung zu überprüfen.
4. Wenn der Radiologe mit der Grobpositionierung des ECD zufrieden ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
5. **MRT-MTRA**: Öffnen Sie zur Bearbeitung SAG B1 CAL. Bewegen Sie das Sichtfeld nahe an die Mitte des UA-Fensters, und führen Sie den Vorgang aus.
6. **MRT-MTRA**: Öffnen Sie zur Bearbeitung SAG T2. Bewegen Sie das Sichtfeld nahe an die Mitte des UA-Fensters, und führen Sie den Vorgang aus. Wenn der Vorgang beendet ist, senden Sie die Bilder gemäß den nachstehenden Anweisungen an den TDC-Computer.

### 9.b.i Übertragen von Planungsbildern vom MRT zur TDC

**MRT-MTRA**: Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bilder (z. B. SAG T2, AX T2 und AX T1) an den TULSA-PRO® Netzwerkknoten zu übertragen.

1. Öffnen Sie die Patientenverwaltung, indem Sie **Patienten > Verwaltung** wählen.
2. Suchen Sie das Scanbild, das Sie an die Behandlungskonsole (TDC) übertragen möchten, und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie im Bereich Netzwerk aus der Dropdown-Liste die Option **PMICONSOLE** aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Netzwerk**, um Bilder an die TDC zu senden.

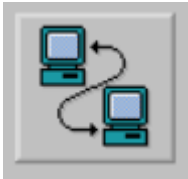

5. Klicken Sie in der TDC auf ... **Scan laden**, um die Bilder in die TDC zu laden. Gültige Scans werden in der Liste angezeigt. Es kann einige Sekunden dauern, bis die vollständige Liste angezeigt wird.

- Wählen Sie die entsprechende T2-gewichtete Planungssequenz aus, die dann in die TDC-Software geladen wird.



**Kontrollieren Sie stets, ob Sie die Bildsequenz des richtigen Patienten ausgewählt haben und ob sie nach der letzten Einstellung der Position aufgenommen wurde.**

## 9.c Ausrichtung

**Radiologe:** Bestimmen Sie mithilfe der TDC Position und Lagewinkel des UA. Eine genaue Ausrichtung ist entscheidend für eine sichere und effektive Wärmezufuhr innerhalb des gewünschten Gewebevolumens. Sie sollten die grafische Darstellung des UA (aus der TDC) mit dem tatsächlichen UA auf dem MRT-Bild abstimmen. Richten Sie die UA-Länge an sagittalen und koronalen Ausrichtungen aus und zentrieren Sie diese mit den transversalen Ausrichtungen. Der obere horizontale Rand des UA-Fensters auf der grafischen Überlagerung muss mit dem Rand des UA-Fensters auf den SAG T2-Bildern übereinstimmen, der als hell-zu-dunkel-Übergang sichtbar ist (hochgradig intensives Signal innerhalb des akustischen Fensters). Ebenso muss sich die kreisförmige grafische Überlagerung in der transversalen Ansicht vollständig mit dem Querschnitt des eigentlichen UA überlappen. Ein Beispiel für den UA in MR-Bildern vor und nach der Ausrichtung ist unten in *Abbildung 44* und *Abbildung 45* dargestellt.

Koronale und sagittale Schichten lassen sich durch Interaktion mit der blauen Kreisüberlagerung drehen. Senkrecht zu jedem Sonderelement stehende transversale Schichten werden in der linken Ansicht des Arbeitsbereichs *Ausrichtung* (E1 bis E10) angezeigt. Die Position der Mitte jedes Sonderelements wird auf der grafischen Darstellung des UA durch einen rosafarbenen Punkt dargestellt und muss innerhalb des UA in allen Bildern entlang der Länge der Vorrichtung zentriert werden. Wenn Sie mit der Ausrichtung der grafischen Darstellung des UA und dem UA im MRT-Bild zufrieden sind, klicken Sie auf **UA registrieren**, um zu **Grobe Planung** zu gelangen.

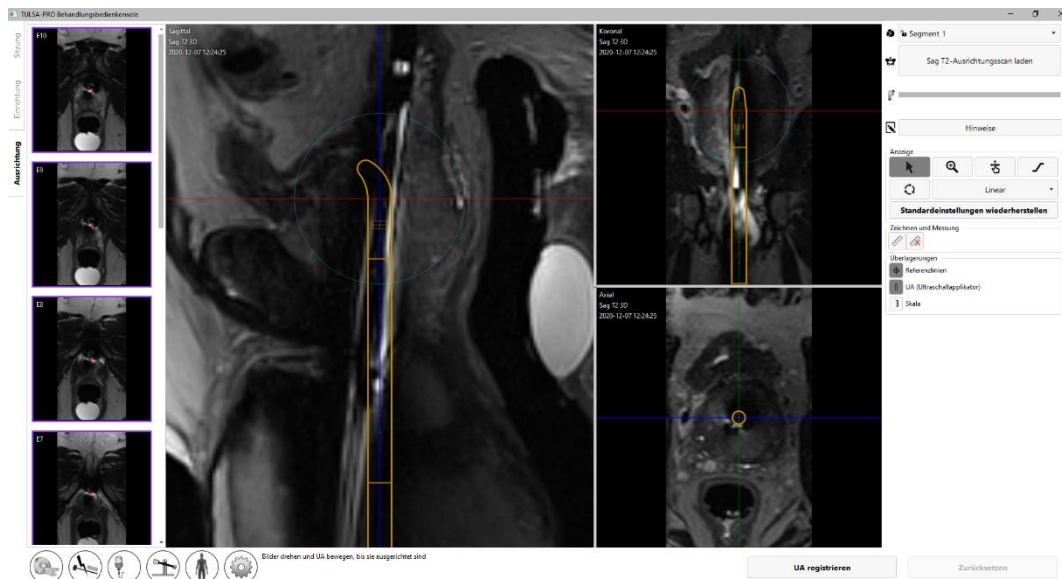


Abbildung 44: UA vor der Ausrichtung



Abbildung 45: UA nach der Ausrichtung

## 9.d Grobplanung

**Radiologe:** Definieren Sie das zu behandelnde Volumen so, dass es das Zielgewebe abdeckt und gleichzeitig kritische Strukturen schont. Passen Sie dazu die Position des UA in der Prostata an und wählen Sie aus, welche Schallkopfelemente aktiviert werden sollen.

Verschieben Sie zuerst die UA-Überlagerung in und aus der Drüse, um die vorgesehene UA-Position zu bestimmen, wobei Sie die aktiven Schallkopfelemente neben dem vorgesehenen Ablationsvolumen platzieren. Klicken und ziehen Sie die UA-Überlagerung, um sie innerhalb der Prostata in linearer Kopf-zu-Fuß-Richtung zu verschieben. Klicken Sie dann auf **Bewegen**, um dem Positionierungssystem mitzuteilen, dass der Applikator an die gewünschte Position vorgeschoben werden soll.

Wenn der UA während der groben Planung im Patienten bewegt wird, kann sich die Form der Prostata dadurch verändern. In der Folge muss der MRT-MTRA eine zusätzliche SAG T2-Messung erfassen und an die TDC senden. Der Radiologe muss dann die neue Messung laden und bestätigen, dass sich der UA am vorgesehenen Ort befindet, bevor er fortfahren kann.

Der Radiologe passt auch durch Aktivieren bzw. Deaktivieren der relevanten Ultraschallelemente in der TDC den Behandlungsbereich an. Bei der Feinabstimmung des Behandlungsvolumens erhalten Sie sofort eine Rückmeldung über die erwartete Ablationszone. Das Behandlungsvolumen wird durch das grüne Rechteck in der sagittalen und koronalen Ansicht hervorgehoben. Bereiche außerhalb der hellblauen Linie in den sagittalen und koronalen Ansichten sind anatomische Bereiche, die voraussichtlich vollständig von der Wärmekoagulation verschont bleiben (*Abbildung 46*). Der empfohlene Apex-Sicherheitsrand liegt am unteren Rand des grünen Rechtecks, dem 4-mm-Abstand zwischen dem Rand des grünen Rechtecks und der hellblauen Linie auf der Seite, die dem UA-Griff am nächsten und von der UA-Spitze am weitesten entfernt ist. Am oberen Rand des grünen Rechtecks, das der UA-Spitze am nächsten ist, muss die Anzahl der aktiven Sonderelemente an die Prostatabasis angepasst werden.



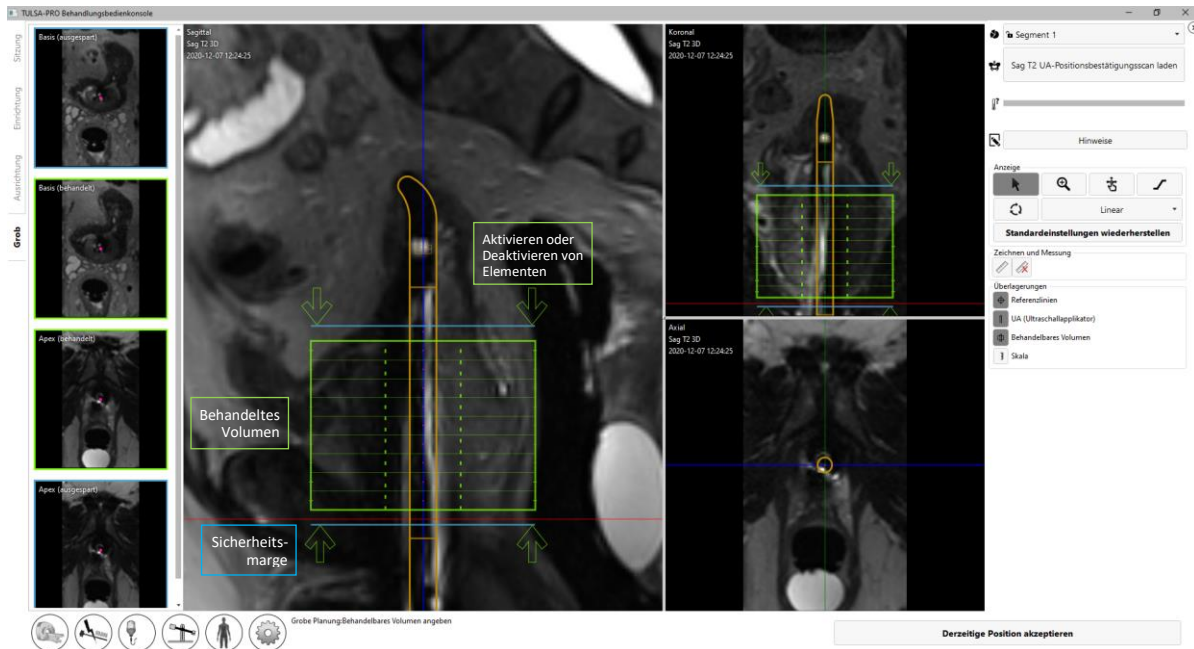


Abbildung 46: Arbeitsbereich „Grobe Planung“ in der TDC



**HINWEIS:** Bei der Bestimmung der UA-Position ist der externe Harnröhrenschließmuskel zu identifizieren. Falls der externe Harnröhrenschließmuskel nicht identifiziert werden kann, sollte er unmittelbar neben dem Prostataapex liegend angenommen werden. Platzieren Sie die den Rand des Apex-Sicherheitsrands bezeichnende hellblaue Linie auf dem äußeren Harnröhrenschließmuskel (Abbildung 46).

Klicken Sie auf **Derzeitige Position akzeptieren**, wenn Sie mit UA-Position und Anzahl der aktivierten Elemente zufrieden sind, um mit **Detaillierte Planung** fortzufahren.



**HINWEIS:** Platzieren Sie das erste Ultraschallwandlerelement (am Rand des grünen Rechtecks, das dem UA-Griff am nächsten und von der UA-Spitze am weitesten entfernt ist) in der Nähe des Prostataapex, getrennt vom externen Harnröhrenschließmuskel durch den empfohlenen Apex-Sicherheitsrand (Abstand zur blauen Linie Abbildung 46).

## 9.e Detailplanung

**Radiologe:** Nach der korrekten Positionierung des UA in der Grobplanung ist die Prostata für jedes aktive Ultraschallelement in der Transversalebene mit Hilfe einer hochauflösenden geräteaxialen T2-Sequenz (AX T2) und geräteaxialen EPI-Thermometriebildern (AX THERM), die vom MRT-MTRA aufgenommen wurden, zu konturieren. Diese Bilder werden in zwölf Schichten quer zum UA aufgenommen: zehn Bilder, die auf die einzelnen Ultraschallsondenelemente zentriert sind, und zwei weitere „Überwachungsbilder“ in der Nähe von Prostataapex und -basis.

**Anästhesist:** Unmittelbar vor der Aufnahme der Behandlungsplanungsbilder und vor Behandlungsverabreichung müssen Sie ein Magen-Darm-Krampf lösendes Medikament verabreichen, um die gastrointestinale Peristaltik zu reduzieren.



### 9.e.i Aufnahmen der Behandlungsplanungsbilder

**MRT-MTRA:** Arbeiten Sie auf der MR-Konsole diese Anweisungen ab, um vom Gerät ausgerichtete AX T2- und AX THERM-Bilder aufzunehmen.

1. **MRT-MTRA:** Zentrieren Sie die Ausrichtung von AX B1 CAL auf dem UA-Fenster in FK-Richtung, und führen Sie den Vorgang aus .
2. **MRT-MTRA:** AX THERM zur Bearbeitung auf der Registerkarte Isoztr.abst./Winkel, ändern Sie die AP-, RL- und FK-Werte sowohl für Stack Offc. als auch für Ang., damit diese mit den Werten in der TDC übereinstimmen. Das gleiche Verfahren für den Zwischenbereich durchführen. Wenn der Zwischenbereich mehr als nur die Patientenanatomie (z. B. Luft) umfasst, reduzieren Sie die Größe des Zwischenfelds (*Abbildung 47*).

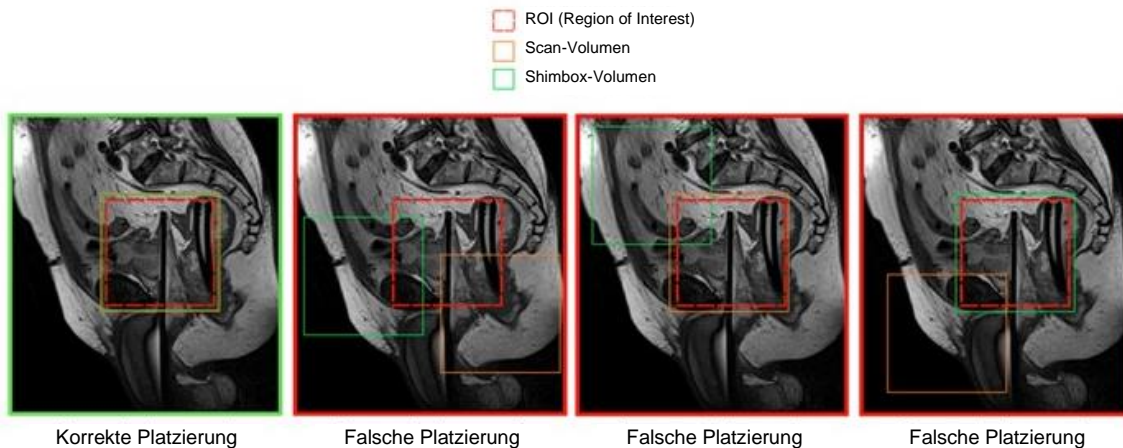


Abbildung 47: Beispiele für die korrekte und falsche Platzierung des Zwischenfelds

3. **MRT-MTRA:** Die Sequenz ausführen. Der TDC sollte die Thermometriebilder automatisch empfangen. Nach dem Laden der Thermometrie-Scans werden zum Erleichtern der Behandlungsplanung die Ansichten **Größe** und **Temperaturunsicherheit** angezeigt (*Abbildung 48*).

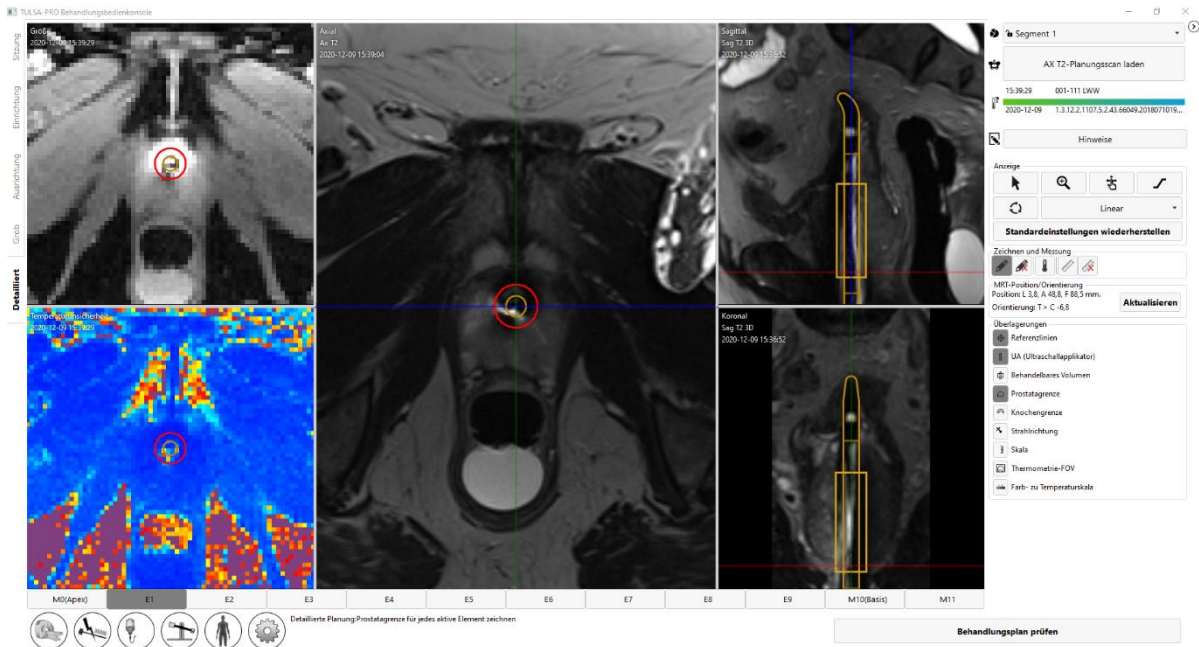


Abbildung 48: Arbeitsbereich „Detaillierte Planung“ mit Thermometriegröße und Temperaturunsicherheit

4. **MRT-MTRA:** Öffnen Sie AX T2. Da es sich auf derselben Geo wie AX THERM befindet, überprüfen Sie, ob die Koordinaten denen der Registerkarte „Isoztr.abst./Winkel“ entsprechen. Die Sequenz ausführen.
5. **MRT-MTRA:** Wenn der Scan abgeschlossen ist, senden Sie die AX T2-Bilder an die TDC (siehe *Übertragen von Planungsbildern vom MRT zur TDC*).
6. **Radiologe:** Verwenden Sie ... **Scan laden**, um das AX T2-Bild zu laden. Nach dem Laden der Thermometrie-Scans werden zum Erleichtern der Behandlungsplanung die Ansichten **Größe** und **Temperaturunsicherheit** angezeigt (Abbildung 48).

### 9.e.ii Prostatagrenzen zeichnen

**Radiologe:** Vergewissern Sie sich vor dem Zeichnen von Grenzen, dass die UA-Mittenüberlagerung auf AX THERM mit der UA-Mitte auf den Bildern ausgerichtet ist. Aufgrund der geometrischen Verzerrung bei AX THERM ist es möglich, dass die erste UA-Mittenausrichtung falsch ist und manuell nachgestellt werden muss. Zum Anpassen der UA-Mitte klicken und ziehen Sie die UA-Mittenüberlagerung auf dem Bild „AX THERM Größe“.

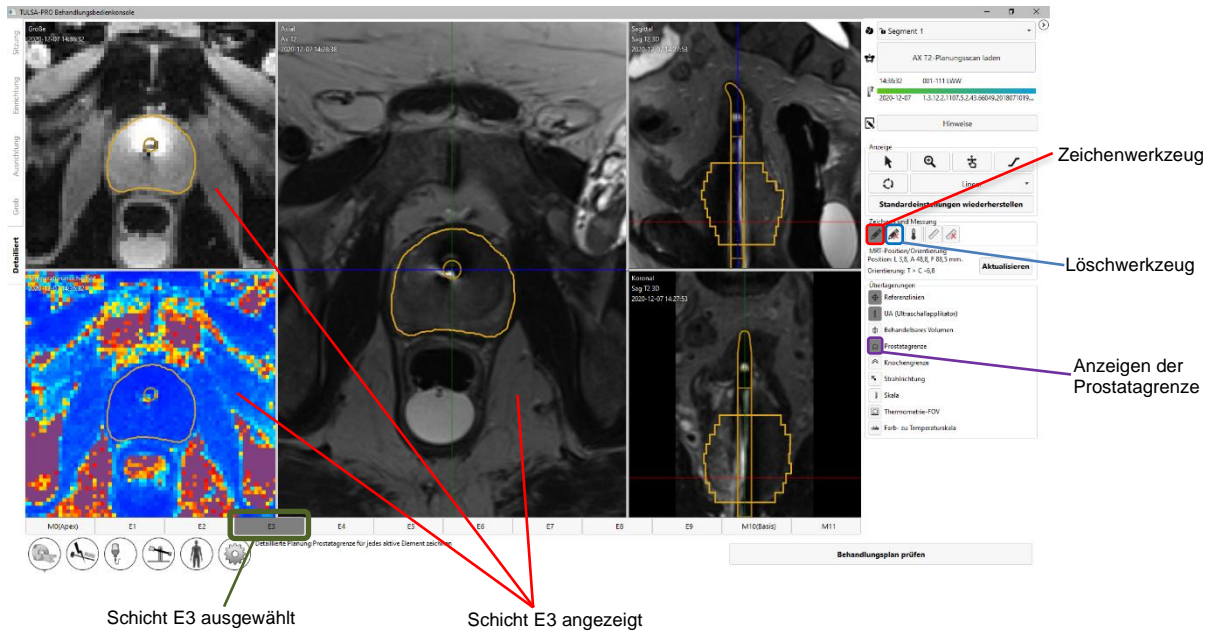


Abbildung 49: Detaillierte Planung nach dem Zeichnen der Grenzen

Um die Prostatagrenze zu zeichnen, wählen Sie das Zeichenwerkzeug aus und zeichnen eine zu behandelnde Schicht auf dem Bild „AX T2- oder THERM-Größe“ *Abbildung 49*. Sie können einzelne Schichten auswählen, indem Sie entweder auf eine Registerkarte klicken oder die Linkspfeil- und Rechtspfeiltasten auf der Tastatur verwenden.

Wenn die angezeigte Schicht nicht Teil des zu behandelnden Volumens ist, ist der Zeichencursor deaktiviert. Wenn Sie auf dieser Schicht zeichnen müssen, kehren Sie zur groben Planung zurück, klicken Sie auf **Entsperren**, und fügen Sie diese Schicht dem zu behandelnden Volumen hinzu.



**HINWEIS:** Wenn Sie die Begrenzung für eine aktuelle Schicht zeichnen oder die UA-Mitte neu positionieren, können Sie die Begrenzung auf eine vorherige Zeichnung zurücksetzen (rückgängig [Strg+z]) oder eine neue Begrenzungsänderung wiederherstellen [wiederholen STRG+y]), soweit erforderlich. Wenn Sie mit einer neuen Schicht arbeiten, können Sie Änderungen an vorherigen Schichten nicht rückgängig machen.

Die Farbe der Prostatagrenze weist auf mögliche Warnbedingungen hin.

- Eine goldene Grenze ist gültig.
- Eine rosafarbene Grenze ist gültig und der Ultraschall wird auf diese Bereiche gerichtet, geht aber über den erwarteten maximal behandelbaren Radius hinaus und die thermische Koagulation könnte die Prostatagrenze in diesen Bereichen unterschreiten.
- Eine rote Grenze stellt einen Bereich dar, der vom Prostatazielbereich ausgeschlossen wird, da er zu nahe am UA liegt.



**HINWEIS:** Sie können zu „Behandlung“ übergehen, wenn Teile der Grenze rot sind, jedoch wird die Ultraschallenergie nicht auf diese Bereiche geleitet.

- Eine violette Grenze stellt eine ungültige Grenze dar, da die Grenze in einem Bereich mit hoher Temperaturunsicherheit gezeichnet wurde.



**HINWEIS:** Sie können nicht zu „Behandlung“ übergehen, wenn Teile der Grenze violett sind.



**Neben jedem Bereich, in dem sich eine hohe Temperaturunsicherheit an der berechneten Grenze befindet, wird ein Warnsymbol angezeigt.**

---

Klicken Sie nach Abschluss und Kontrolle aller Planungsschritte auf **Behandlungsplan prüfen**, um fortzufahren.

### 9.e.iii Leitlinien für die Behandlungsplanung

**Radiologe:** Die Prostatagrenze ist in alle AX T2-Bilder einzuzeichnen, die für die Behandlung vorgesehene Prostatagewebe enthalten. Auf jeder Schicht mit Grenze muss die Prostatagrenze die UA-Mitte enthalten. Die Lage der UA-Mitte muss in allen Schichten gleich sein. Schichten ohne definierte Prostatagrenzen sind während der Behandlung nicht aktiv, d. h. von diesem Element wird keine Ultraschalleistung abgegeben. Zu nahe am UA liegende Grenzen werden rot angezeigt und nicht behandelt.




**HINWEIS:** Die Prostatagrenze darf niemals außerhalb der Prostata gezogen werden und darf keine Harnwegs- oder wichtige periprostatiche Anatomie wie Rektum, neurovaskuläre Bündel, den externen Harnröhrenschließmuskel, die Blasenwand oder den Beckenknochen enthalten. Die Aufnahme von Harnwegs- oder wichtiger periprostaticher Anatomie in die Prostatagrenze kann zu thermischen Behandlungsschäden an diesen Strukturen außerhalb der Prostata führen, wie z. B. rektale Fisteln, andere Darmkomplikationen, erektile Dysfunktion, retrograde Ejakulation, Harninkontinenz, andere urinöse Komplikationen oder Schädigung des Beckenknochens und/oder der Nerven neben dem Beckenknochen.



**HINWEIS:** Knochen weisen eine deutlich höhere Abschwächung und Absorption von Ultraschall auf als Weichgewebe, was zu einer signifikanten Erwärmung von Knochen und angrenzendem Weichgewebe führen kann. Da der Beckenknochen nur eine geringe Menge thermischer Schäden tolerieren kann und Weichgewebe neben dem Beckenbein oft wenig bedenklich sind, sollten das Volumen/der Bereich des gefährdeten Beckenbeins und seine Nähe zu anderen wichtigen Strukturen (z. B. Nerven) sorgfältig in Betracht gezogen werden.

- Der Knochen kann während der Behandlung einer signifikanten Erwärmung ausgesetzt sein, wenn er sich innerhalb von 32 mm von der UA-Mitte befindet und die definierte Prostatagrenze in diesen Bereichen größer als 14 mm ist (d. h. niederfrequente Ultraschallerwärmung).

- An Knochen angrenzende Weichteile können einer signifikanten Erwärmung ausgesetzt sein, wenn sie innerhalb von 40 mm von der UA-Mitte liegen und die definierte Prostatagrenze in diesen Bereichen größer als 14 mm ist (d. h. niederfrequente Ultraschallerwärmung).

Angesichts der oben genannten, mit der Knochenrand-Überlagerung () visualisierbaren Bedingungen wird die Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Erwärmung auf 25 % geschätzt. Nach Ermessen des Arztes lässt sich die Prostatagrenze in diesen Bereichen auf  $\leq 14$  mm (Hochfrequenz-Ultraschall) reduzieren, um irreversible thermische Schäden am Beckenbein und umliegendem Weichgewebe zu vermeiden.



**HINWEIS:** Anomalien in der Prostata (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zysten und Verkalkungen) müssen auf den Behandlungsplanungsbildern identifiziert werden. Die Prostatagrenze sollte mindestens 5 mm von diesen Anomalien entfernt sein. Das Risiko einer Erhitzung in Zystensektoren ist eine Überbehandlung außerhalb der Prostata aufgrund ihrer geringen Abschwächung/Absorption von Ultraschall. Im Gegensatz dazu besteht das Risiko einer Erwärmung in Sektoren mit Verkalkungen in der Unterbehandlung der Prostata aufgrund ihrer erhöhten Abschwächung/Absorption. Die definierte Prostatagrenze sollte folglich keine Zysten oder Verkalkungen enthalten.



**HINWEIS:** Bei einer partiellen Drüsenablation wird die gesamte Prostata in der **Detailplanung** konturiert. Verwenden Sie während der **Verabreichung** der Behandlung den Startwinkel, um festzulegen, wo die Ablation beginnen soll, und beenden Sie die Behandlung dann, wenn die thermische Abdeckung des gewünschten Winkelsegments erreicht ist.



## 10. Verabreichung

**Radiologe:** Starten Sie die Prostata-Ablation gemäß dem in **Detaillierte Planung** definierten Behandlungsplan. Klären Sie den Behandlungsplan mit dem **Urologen** ab, benachrichtigen Sie den **Anästhesisten**, damit der Patient für die Behandlung vorbereitet wird, und weisen Sie den **MRT-MTRA** an, die MR-Thermometrie zu starten.

Im Arbeitsbereich **Wärmezufuhr** werden zwei Zeilen mit 12 axialen Schichten angezeigt: 10 Schichten, die den Elementen (E1 bis E10) entsprechen, die Wärme abgeben können, und zwei zusätzliche Schichten, die den Überwachungselementen M0 und M11 entsprechen (**Abbildung 50**). Die Bilder werden während der Behandlung alle 5 bis 7 Sekunden aktualisiert, wenn neue Bilder vom MR-Scanner zu Temperaturinformationen verarbeitet werden.

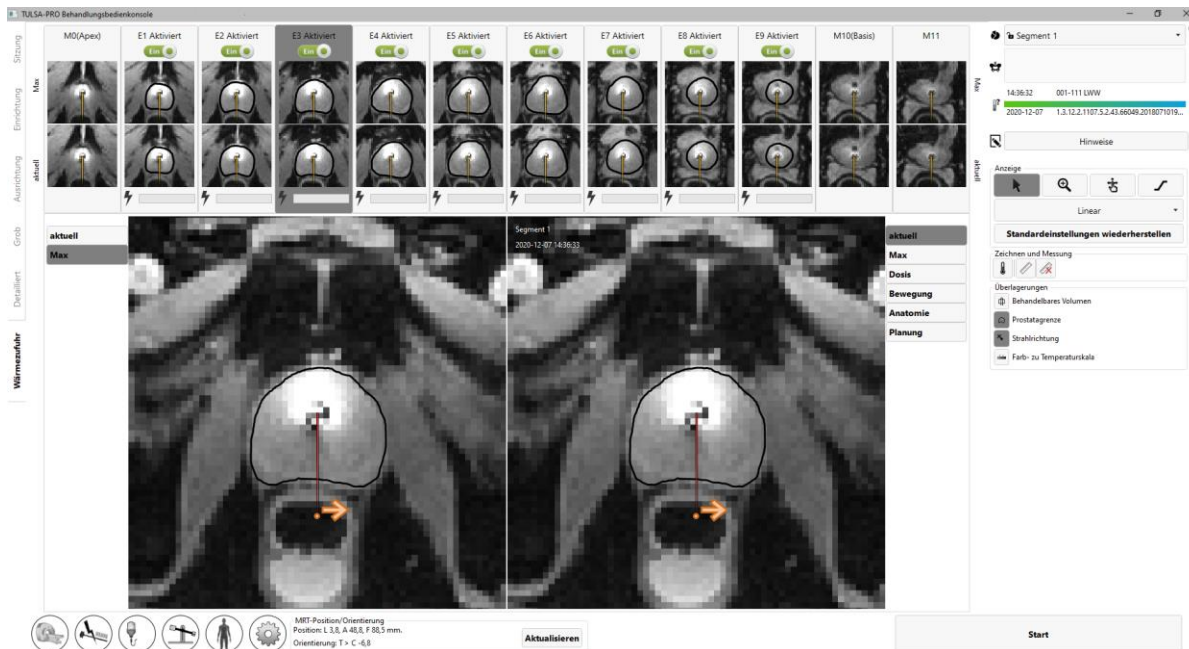


Abbildung 50: Arbeitsbereich „Wärmezufuhr“ der TDC

Das links vergrößerte Bild zeigt entweder die aktuelle oder die maximale Temperatur an. Das rechts vergrößerte Bild zeigt den ausgewählten Anzeigemodus.

Die obere Zeile enthält Miniaturansichten (Thumbnails) aller Schichten in dem Modus, der für das linke große Bild ausgewählt wurde. In der zweiten Zeile werden kleinere Ansichten aller Schichten im ausgewählten Anzeigemodus angezeigt. Klicken Sie auf eine beliebige Schicht, um unten vergrößerte Bilder anzuzeigen. Sie können auch zwischen einzelnen Schichten wechseln, indem Sie

die Linkspfeil- (←) und die Rechtspfeiltaste (→) auf der Tastatur verwenden.

Für das rechts vergrößerte Bild stehen die folgenden Anzeigemodi zur Verfügung:

1. Die Ansicht **Aktuelle Temperatur** zeigt eine farbige Darstellung des zuletzt erfassten Thermometriebildes.

2. Die Ansicht **Maximale Temperatur** zeigt eine farbige Darstellung der maximalen Temperatur ab Behandlungsbeginn.
3. In der Ansicht **Bewegung** wird der Unterschied zwischen dem zuletzt erfassten Bild der Größe und dem ersten Referenzbild gezeigt.
4. Die Ansicht **Anatomie** zeigt das zuletzt aufgenommene Bild der Thermometriegröße.
5. Die Anzeige **Planung** zeigt das zuletzt aufgenommene AX T2-Planungsbild.



**HINWEIS:** Planungsbilder werden während der Behandlung nicht dynamisch erfasst und spiegeln möglicherweise nicht die aktuelle anatomische Konfiguration wider, wenn während der Behandlung eine Bewegung auftrat.

6. Die Ansicht **Dosis** zeigt eine farbige Darstellung des kumulativen, quantitativen Maßes der Wärmedosis.

## 10.a Startposition und Drehrichtung

**Radiologe:** Stellen Sie vor Behandlungsbeginn auf der TDC-Registerkarte *Wärmezufuhr* Startposition und Richtung der UA-Rotation ein. Beginnen Sie nicht mit einer Ablationstherapie, wenn der UA auf empfindliche Strukturen wie z. B. neurovaskuläre Bündel oder das Rektum gerichtet ist. Klicken Sie einmal auf den orangefarbenen Pfeil, um die beabsichtigte UA-Bewegung zu Behandlungsbeginn im oder gegen den Uhrzeigersinn zu ändern. Passen Sie die Startposition des UA an, indem Sie auf den orangefarbenen Punkt neben dem Pfeil klicken und ihn ziehen (*Abbildung 51*). Klicken Sie nach dem Einstellen der gewünschten UA-Position und der Drehrichtung auf **Auf ####min drehen**, um den Befehl auszuführen. Alternativ können Sie auf **Zurücksetzen** klicken, um den Befehl abzubrechen.

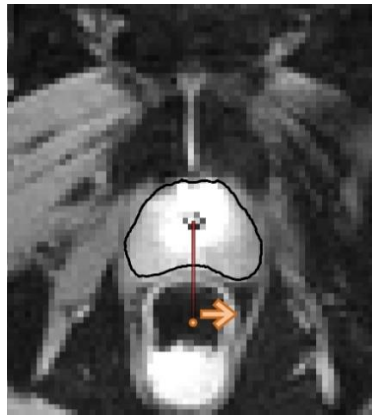


Abbildung 51: Startposition für die Ultraschallabgabe und die Rotation des Geräts

---

## 10.b Initialisieren der Behandlung

Radiologe: Weisen Sie den Anästhesisten an, eine zweite Dosis des Magen-Darm-Krampf lösenden Medikaments zu verabreichen, wenn Sie die Planung abgeschlossen haben und für den Behandlungsbeginn bereit sind. Das verringert die gastrointestinale Peristaltik während der Behandlung und erhält stabile Temperaturkennlinien aufrecht.

1. **MRT-MTRA:** Duplizieren Sie die AX THERM-Sequenz erneut auf der MRT-Konsole.
2. **MRT-MTRA:** Setzen Sie die Anzahl der Messungen auf die maximal zulässige Anzahl an Dynamiken.
3. **Radiologe:** Klicken Sie in der TDC auf **Behandlung starten**. Sie werden aufgefordert, vor dem Fortfahren die Körperkerntemperatur mit einem externen Temperaturmessgerät zu kontrollieren (*Abbildung 52*). Geben Sie die Temperatur in Grad Celsius ein, und klicken Sie auf „Bestätigen“. Die TDC wechselt dann in den Status **Behandlung Initialisierung** und ist nun zum Empfangen von Thermometriebildern bereit.
4. **MRT-MTRA:** Führen Sie auf dem MR-Host AX THERM aus.

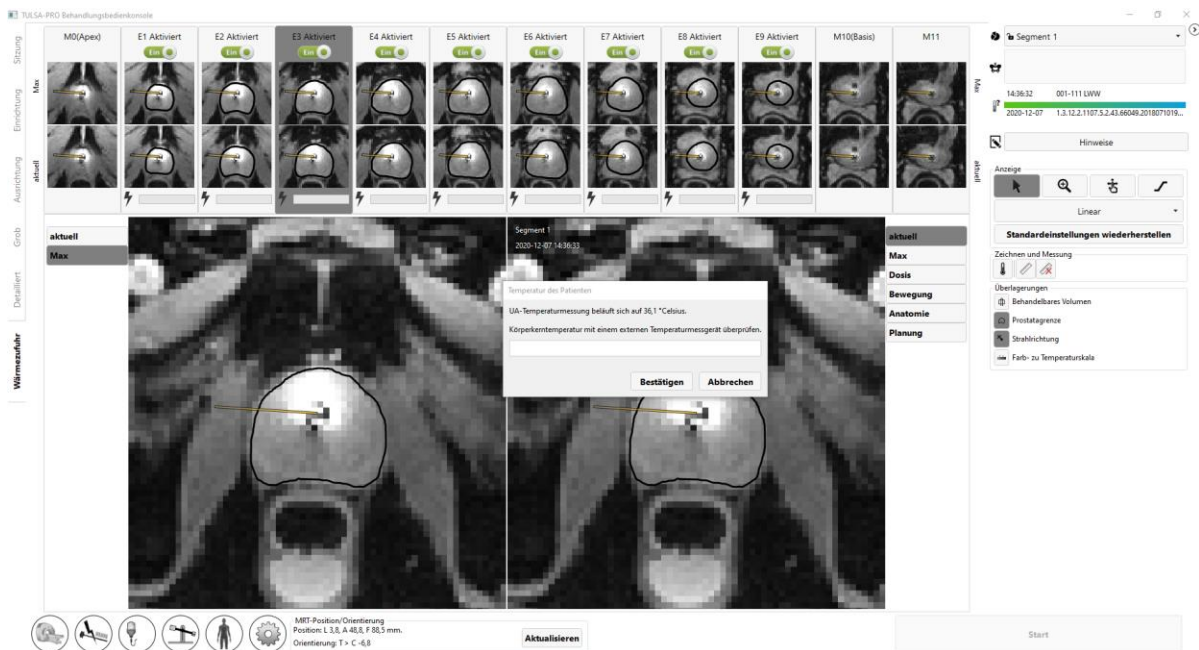


Abbildung 52: Der Benutzer muss die Körperkerntemperatur des Patienten eingeben, bevor er zu „Wärmezufuhr“ übergehen kann



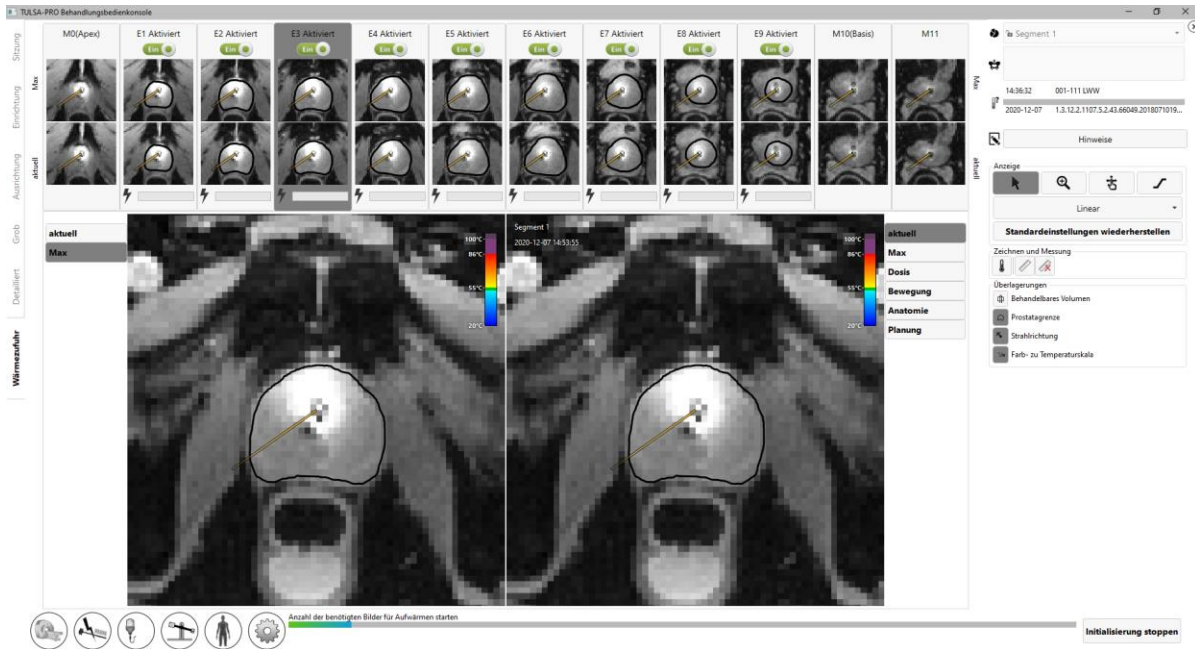


Abbildung 53: Status „Behandlung Initialisierung“

Die ersten 25 Bildgebungsdynamiken werden während des Status **Behandlung Initialisierung** (Abbildung 53) empfangen, wobei die gesamte Hardware für die Vorbereitung der Wärmeabgabe konfiguriert ist. Während dieses Schritts sollte der Radiologe die Stärke- und Thermometriebilder genau überwachen und auf die Schaltfläche **Initialisierung stoppen** klicken, sobald Anzeichen für schwerwiegende Thermometrieartefakte oder Patientenbewegungen vorliegen, die die Behandlung beeinträchtigen könnten.

## 10.c Verabreichung

Nach 25 Thermometriedynamiken beginnt die Erwärmung (Abbildung 54).

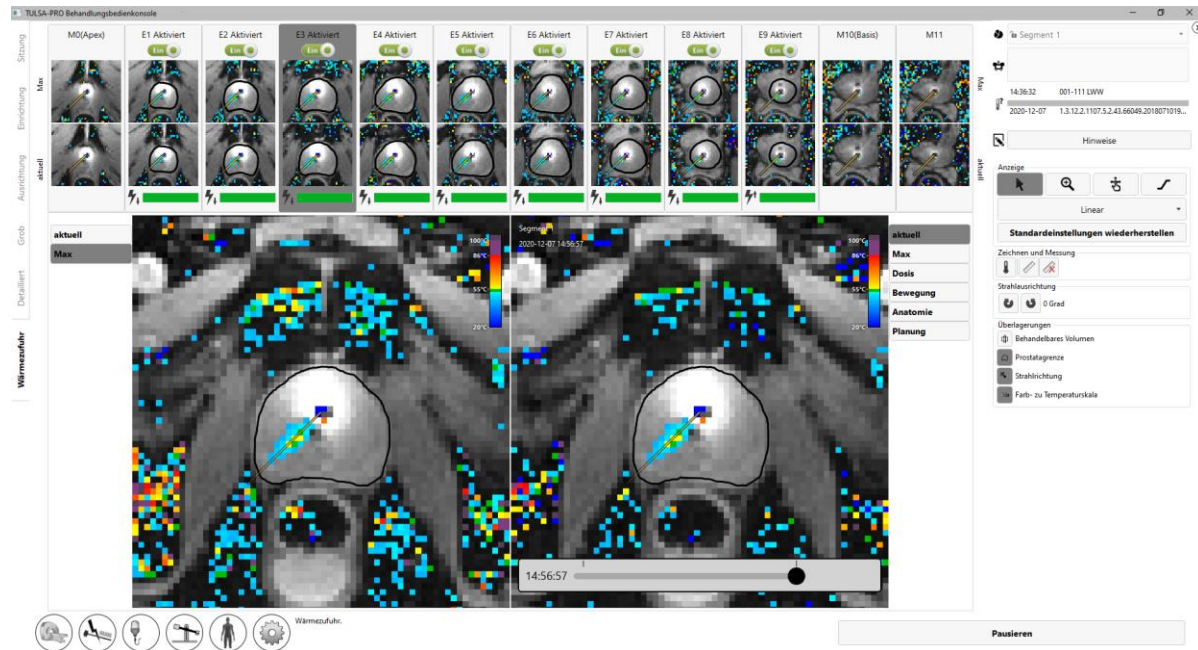


Abbildung 54: Ultraschallerwärmung hat begonnen

Die an jedem aktiven Element abgegebene Leistung und Frequenz wird für jede Schicht in Echtzeit durch einen durchgehenden, grünen Balken angezeigt. Setzen Sie den Cursor über die Leistungsleiste, um den tatsächlichen Wert der Frequenz und der abgegebenen Leistung anzuzeigen. Wenn eine unbeabsichtigte Erwärmung wichtiger Strukturen außerhalb der Prostata beobachtet wird, können Sie die Stromversorgung für das entsprechende Element mit dem Kontrollkästchen deaktivieren (Abbildung 55).

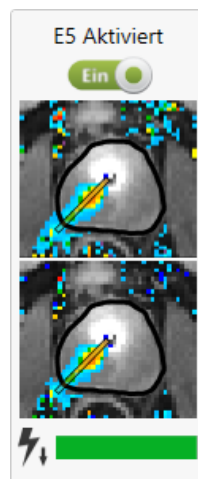


Abbildung 55: Aktives Element im Arbeitsbereich „Wärmezufuhr“  
(Der grüne Balken zeigt an, dass die Leistung von diesem Element geliefert wird.  
Der Pfeil nach unten zeigt an, dass das Element mit niedriger Frequenz betrieben wird.)

### 10.c.i Anpassen der Strahlausrichtung während der Behandlung

**Radiologe:** Zum Gewährleisten einer erfolgreichen TULSA-PRO® Behandlung muss die tatsächliche Richtung der Ultraschallerwärmung der in der TDC erwarteten Erwärmungsrichtung entsprechen. Die tatsächliche Richtung der Ultraschallerwärmung lässt sich direkt bestimmen, indem während der Ablation das Wärmemuster auf dem MRT-Thermometriebild geprüft wird.

Die in der TDC erwartete Wärmerichtung wird durch eine Funktion namens **UA-Strahlwinkel** (*Abbildung 56*) dargestellt, die das MRT-Thermometriebild visuell überlagert und als radial von der UA-Mitte nach außen verlaufende Linie angezeigt wird.

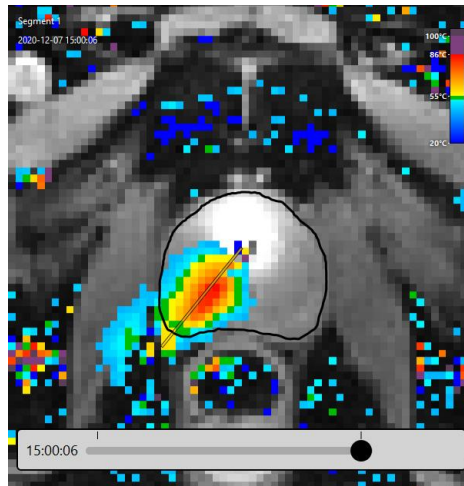


Abbildung 56: UA-Strahlausrichtungsüberlagerung

---

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass die in den Temperaturkennlinien beobachtete tatsächliche Richtung der Ultraschallerwärmung mit dem UA-Strahlwinkel zu Beginn der Abgabe übereinstimmt.



Wenn während der Behandlung beobachtet wird, dass die Richtung der Ultraschallerwärmung und der UA-Strahlwinkel in der Ansicht „Aktuelle Temperatur“ (Abbildung 57) nicht übereinstimmen oder nicht zueinander passen, müssen Sie den Strahlwinkel anpassen. Lässt sich das Problem durch die Anpassung nicht beheben, klicken Sie auf Pause und erstellen Sie ein neues Behandlungssegment (siehe *Erstellen eines neuen Behandlungssegments*), um die Ultraschallabgabe und die Thermometrieaufnahme anzuhalten. Betreten Sie den MRT-Raum, um sicherzustellen, dass der UA ordnungsgemäß mit dem PS verbunden ist. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter von Profound Medical, falls das Problem weiterhin auftritt.

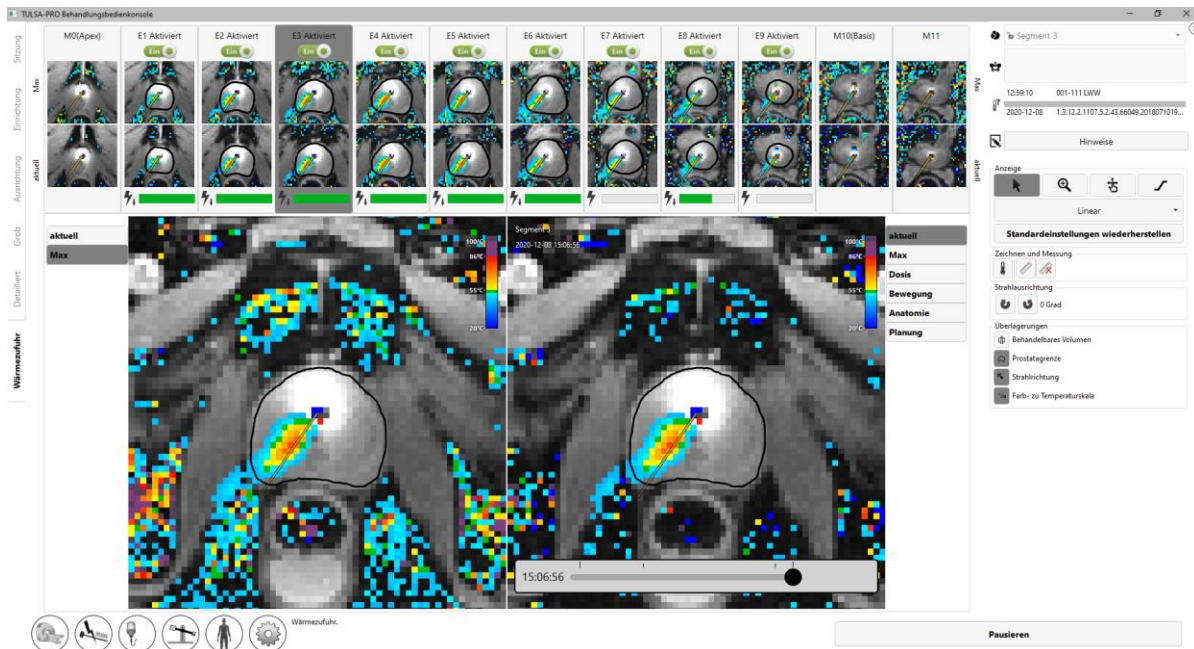





Abbildung 57: Falsche Ausrichtung der Ultraschallerwärmung und des UA-Strahlwinkels

Zum Anpassen des UA-Strahlwinkels klappen Sie das rechte Feld im Arbeitsbereich „Wärmefuhr“ auf, damit Sie Zugriff auf die Schaltflächen zur Strahlwinkelanpassung   erhalten. Klicken Sie auf die Schaltflächen, um den UA-Strahlwinkel in 1-Grad-Schritten im 


oder gegen  den Uhrzeigersinn bis zu maximal 5 Grad in beide Richtungen anzupassen. Es wird empfohlen, die Strahlausrichtung zu Behandlungsbeginn durchzuführen, wenn das Erwärmungsmuster des UA ein sich ausbildender schmaler Strahl ist. Da sich der UA während der Behandlung dreht, kann das zuvor erhitze Gewebe im Laufe der Behandlung noch heiß erscheinen und es schwierig machen, zu erkennen, wo die Wärme gegenwärtig abgegeben wird.

Abbildung 58 zeigt ein Beispiel für einen vom Wärmemuster der Temperaturverteilung abweichenden UA-Strahlwinkel. Anschließend können Sie den UA-Strahlwinkel mit den Tasten zur Einstellung des Strahlwinkels zurück zur Mitte des Wärmemusters drehen. Nach Abschluss der Einstellung ist der UA-Strahlwinkel im Wärmemuster mittiger positioniert.



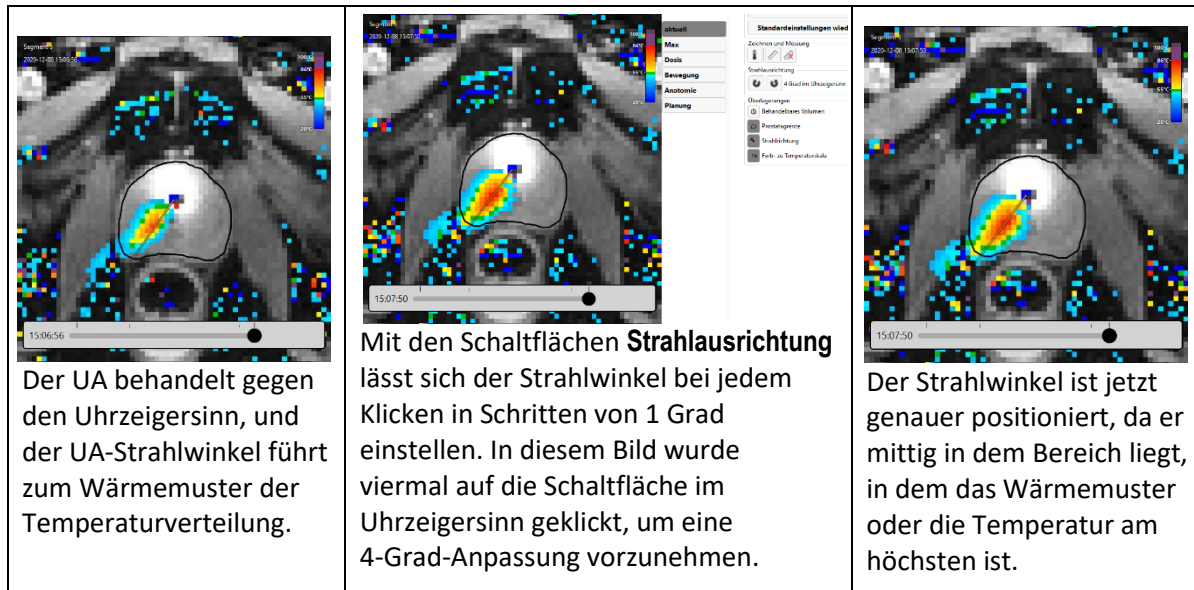


Abbildung 58. Einstellung des Strahlwinkels

### 10.c.ii Verabreichung pausiert

Radiologe: Sie können während der Verabreichung jederzeit auf **Pause** in der unteren rechten Ecke des Bildschirms klicken (siehe *Abbildung 54*). Im angehaltenen Zustand wird die gesamte UA-Erwärmung ausgesetzt, während die Thermometrieaufnahme weiterläuft (*Abbildung 59*).

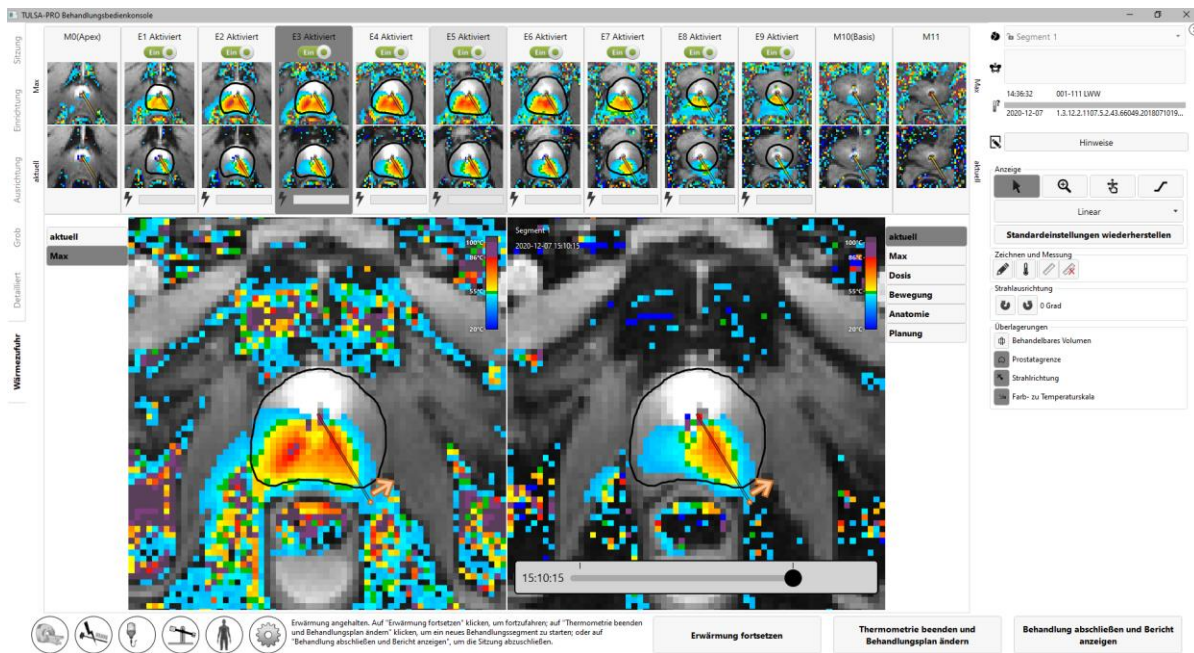


Abbildung 59: Arbeitsbereich „Wärmefuhr“ mit pausierter Behandlung und Erwärmung

Das Anhalten der Behandlung aktiviert die folgenden Optionen:

- **Drehen des UA in eine neue Position und/oder Ändern der Richtung der Behandlungsrotation.** In einigen Fällen kann der Benutzer den UA auf eine neue Position setzen und/oder die Rotationsrichtung der Behandlung ändern. Zum Ausführen dieses Befehls arbeiten Sie die Schritte im Abschnitt *Startposition und Drehrichtung* ab. Wenn das System zum Fortsetzen der Behandlung bereit ist, klicken Sie auf **Erwärmung fortsetzen**.
- **Bearbeiten der Prostatagrenzen.** In einigen Fällen kann die Patientenanatomie im Laufe der Zeit vom ursprünglich geplanten Zielbereich abweichen. Durch Bearbeiten der Prostatagrenzen kann der Benutzer geringfügige Änderungen am Zielbereich vornehmen, damit die aktuelle Anatomie besser wiedergegeben wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Bearbeiten der Prostatagrenze während der Behandlung*.
- **Beginnen eines neuen Behandlungssegments.** In einigen Fällen gelten die Temperaturverteilungen z. B. aufgrund großer Bewegungsartefakte nicht mehr. Dann muss der Benutzer das aktuelle Behandlungssegment beenden und durch Klicken auf **Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern** ein neues Segment erstellen. Das TULSA-PRO® System gewährt dafür eine Mindestwartezeit von 20 Minuten, bevor die Wärmeabgabe wieder aufgenommen werden kann, damit die Gewebe wieder die Grundtemperatur erreichen können. Während dieser Zeit kann der Benutzer den Behandlungsplan aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Erstellen eines neuen Behandlungssegments*.



**Wenn Sie während der Behandlung feststellen, dass die Temperaturverteilung nicht mehr gilt (z. B. aufgrund von Patientenbewegungen), müssen Sie das Behandlungssegment beenden, um neue Referenzbilder für die MR-Thermometrie zu erfassen.**

- **Fortsetzen der Behandlungsverabreichung.** Wenn der Benutzer die Behandlung wieder aufnehmen möchte (z. B. nach dem Drehen des UA an eine neue Position oder nach dem Bearbeiten der Prostatagrenzen), klicken Sie auf **Erwärmung fortsetzen**, um den Status „Pause“ zu verlassen und die Behandlung im Status **Wärmezufuhr** fortzusetzen.
- **Beenden der Behandlung.** Wenn Sie mit der auf den Zielbereich abgegebenen Wärme zufrieden sind, klicken Sie auf **Behandlung abschließen und Bericht anzeigen**. Nach dem Drücken dieser Taste fährt das TULSA-PRO System mit der Erfassung von Thermometriebildern und dem Pumpen von Kühlflüssigkeit durch UA und ECD während einer Abkühlphase nach der Verabreichung fort. Danach wechselt die TDC-Software in den Überprüfungsmodus, in dem der Benutzer die vorherigen Arbeitsbereiche („Einrichtung“, „Ausrichtung“, „Grobe Planung“, „Detaillierte Planung“ und „Wärmezufuhr“ zwar einsehen kann, jedoch nicht die Möglichkeit hat, sie für die Bearbeitung freizugeben.

### 10.c.iii Bearbeiten der Prostatagrenze während der Behandlung

**Radiologe:** In einigen Fällen kann sich die Patientenanatomie während der Behandlung im Laufe der Zeit vom ursprünglich geplanten Zielbereich ändern. Für geringfügige Änderungen lassen sich die Prostatagrenzen bei fortgesetzter Thermometrierfassung ändern. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Pausieren Sie die Behandlung.
2. Klappen Sie das rechte Feld im Arbeitsbereich „Wärmezufuhr“ nach dem Anhalten der Verabreichung auf, um das Zeichenwerkzeug für die Prostatagrenze auszuwählen (*Abbildung 60*).

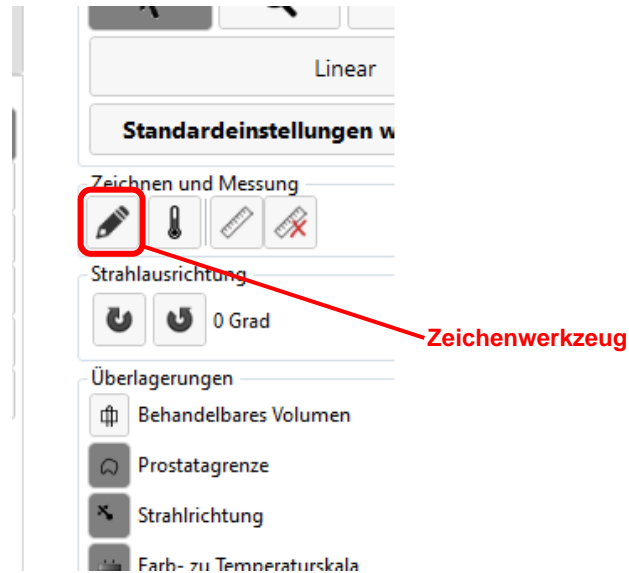


Abbildung 60: „Zeichenwerkzeug“ für die Prostatagrenze im Bildschirm „Wärmezufuhr“

3. Klicken Sie auf das Zeichenwerkzeug. In der TDC wird ein neues Feld mit der Kontur der Prostatagrenze und der Temperaturunsicherheit für die ausgewählte Schicht angezeigt (*Abbildung 61*).
4. Ändern Sie die Begrenzung bei Bedarf für jede Schicht. Wie bei den Bildern für die Temperaturunsicherheit in der Detailplanung sollten Sie auch hier vermeiden, die Grenze durch Bereiche mit hoher Temperaturunsicherheit zu ziehen.
5. Klicken Sie auf **Änderungen akzeptieren**, wenn Sie mit den geänderten Begrenzungen auf allen Schichten zufrieden sind. Die TDC überprüft die Änderungen an der Grenze und Sie können dann auf **Erwärmung fortsetzen** klicken, um die Behandlung fortzusetzen. Klicken Sie andernfalls auf **Änderungen verwerfen**, um die Bearbeitung von den aktuellen Begrenzungen aus erneut zu starten. Wenn keine der Änderungen akzeptabel ist, können Sie durch Klicken auf **Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern** ein neues Behandlungssegment erstellen.

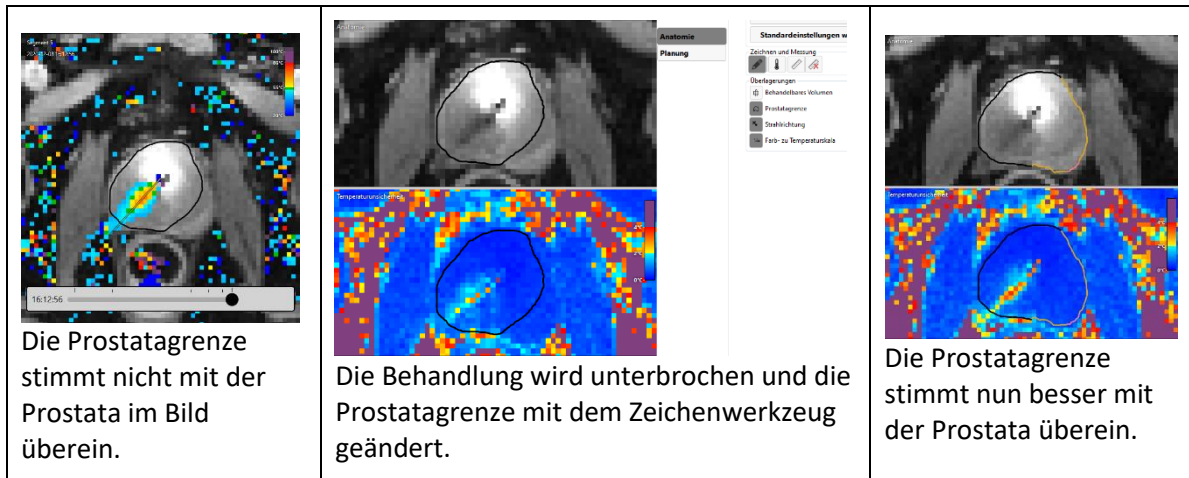


Abbildung 61: Bearbeiten der Prostatagrenze

### 10.c.iv Erstellen eines neuen Behandlungssegments

**Radiologe:** In einigen Fällen sind die aktuellen Temperaturverteilungen während der Behandlung möglicherweise nicht mehr gültig. Mit anderen Worten: Die Genauigkeit der Temperaturmessungen in der Nähe der Zielgrenze reicht nicht mehr für eine effektive Behandlung aus. Dies kann durch größere Bewegungsartefakte wie z. B. Bewegungen des gesamten Patienten, Artefakte durch nicht entfernte Luftblasen zwischen ECD und Rektumwand oder sogar eine Bewegung des Rektums in den geplanten Zielbereich verursacht werden. Alternativ könnte sich Wärme in unerwarteten Bereichen ansammeln (z. B. in falscher Richtung oder auf falschen Schichten).

In solchen Fällen muss der **Radiologe** die Situation erkennen und auf **Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern** klicken, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen. Anschließend ist mindestens 20 Minuten lang zu warten, damit die Gewebetemperaturen wieder den Ausgangswert erreichen, bevor eine neue Thermometrieaufnahme gestartet und die Wärmeabgabe wieder aufgenommen wird. Dies ist notwendig, da die aktuelle Thermometriesequenz unterbrochen wird und ein neuer Referenzbildersatz (bei Grundlinientemperatur) aufgenommen werden muss.

Während der Wartezeit wird empfohlen, Behandlungsplanungsbilder erneut aufzunehmen. Stellen Sie bei der Aufnahme neuer Behandlungsplanungsbilder sicher, dass der Arbeitsbereich, in dem das Bild in der TDC verwendet wird, entsperrt ist (z. B. Ausrichtung für SAG T2 und Detailplanung für AX T2). Klicken Sie dazu in der rechten unteren Ecke des entsprechenden Arbeitsbereichs auf **Entsperren**.

**MRT-MTRA:** Wenn der MR-Tomograph nach dem Beenden des Behandlungssegments in der TDC weiterhin Thermometriebilder aufnimmt, müssen Sie den aktuellen AX THERM-Scan auf der MR-Konsole stoppen. Duplizieren Sie eine der Planungssequenzen in die Warteschlange und arbeiten Sie die Anweisungen ab diesem Punkt im Arbeitsablauf (zwischen den Abschnitten *Grobpositionierung* bis *Verabreichung*) ab.



**Radiologe:** Arbeiten Sie je nach gewünschtem Teil der Behandlungsplanung die Anweisungen ab diesem Punkt im Arbeitsablauf (zwischen den Abschnitten *Grobpositionierung* bis *Verabreichung*) ab. Wenn beispielsweise ein neuer Satz AX T2-Bilder für die Detailplanung erfasst wird, sollten auf den neuesten Bildern Prostatagrenzen eingezeichnet werden. Beginnen Sie erneut mit *Initialisieren der* Behandlung, wenn die Behandlungsplanung abgeschlossen ist und seit dem Ende des vorherigen Behandlungssegments mindestens 20 Minuten vergangen sind.

### 10.c.v Verlaufs-Schieberegler

Mit dem Verlaufs-Schieberegler können Sie Behandlungsbilder von früheren Zeitpunkten anzeigen, um Folgendes zu beurteilen:

- Patientenbewegungs- und thermometrische Artefakte im aktuellen Bestrahlungssegment und
- Ablation in vorherigen Segmenten.

Der Verlaufs-Schieberegler wird unten im rechten Bildfenster des Arbeitsbereichs „Wärmezufuhr“ *Abbildung 62* angezeigt und ist während der laufenden Behandlung, bei Behandlungspausen und nach Abschluss der Behandlung verfügbar.

So verwenden Sie den Verlaufs-Schieberegler:

1. Wählen Sie die gewünschte Schicht und den gewünschten Anzeigemodus aus („Aktuelle Temperatur“, „Maximale Temperatur“, „Dosis“, „Bewegung“ oder „Anatomie“).
2. Klicken Sie auf den Verlaufs-Schieberegler, und ziehen Sie ihn, bis der gewünschte Zeitpunkt sowohl im rechten Bildfenster als auch in der entsprechenden zweiten Reihe von Miniaturbildern angezeigt wird.
3. Ein schneller Bildlauf durch sequenzielle Bilder in der Ansicht „Anatomie“ oder „Aktuelle Temperatur“ hilft, das Auftreten von starker Patientenbewegung und die Bewegung von Gas oder Stuhl im Rektum zu erkennen.
4. Blättern Sie weiter nach links, um die Ansichten für „Maximale Temperatur“ oder „Dosis“ anzuzeigen, die eine Beurteilung der Ablation aus früheren Bestrahlungssegmenten unterstützen.



**HINWEIS:** Wenn Sie Bilder von früheren Zeitpunkten betrachten, zeigt ein Rahmen um das rechte Bildfenster an, dass nicht die neuesten Bilder angezeigt werden (*Abbildung 63*). Eine gestrichelte Linie zeigt den Strahlwinkel zum vorherigen Zeitpunkt an. Um zum aktuellen Zeitpunkt zurückzukehren, klicken Sie auf **Live anzeigen** oder ziehen Sie den Verlaufs-Schieberegler, bis die gerahmte Nachricht verschwindet.

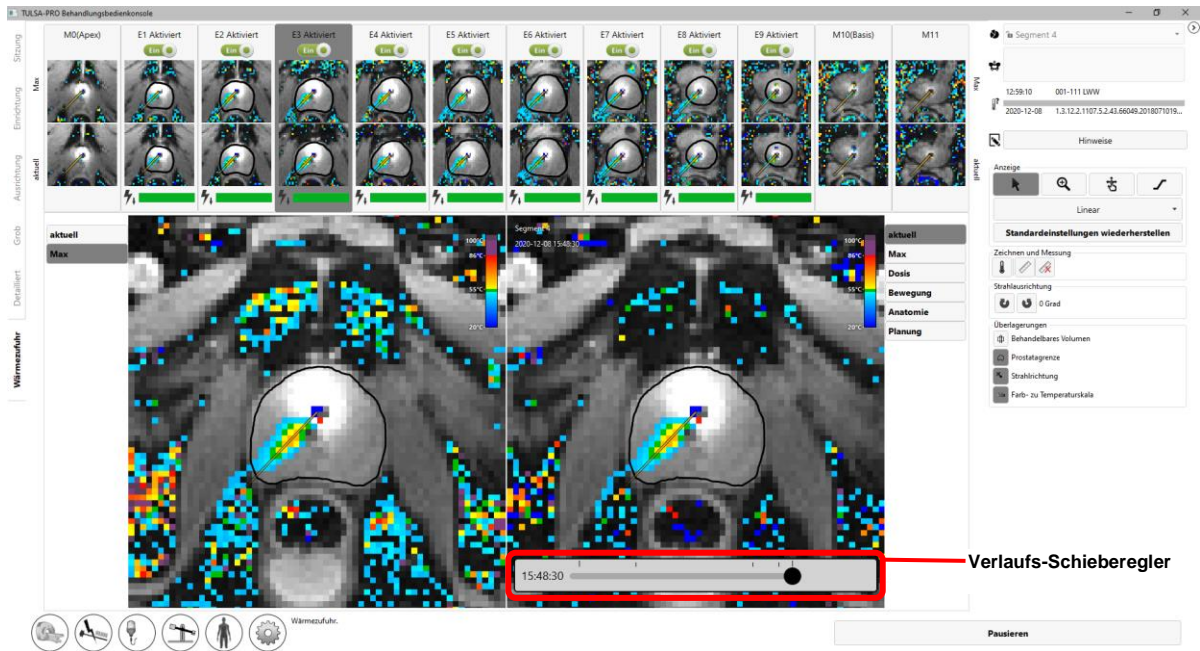


Abbildung 62: Verlaufs-Schieberegler im Arbeitsbereich „Wärmezufuhr“

Um zur aktuellen Dynamik zurückzukehren, klicken Sie auf **Live anzeigen**, oder ziehen Sie den Verlaufs-Schieberegler, bis die Nachricht „Dies ist nicht das aktuellste Bild“ verschwindet.

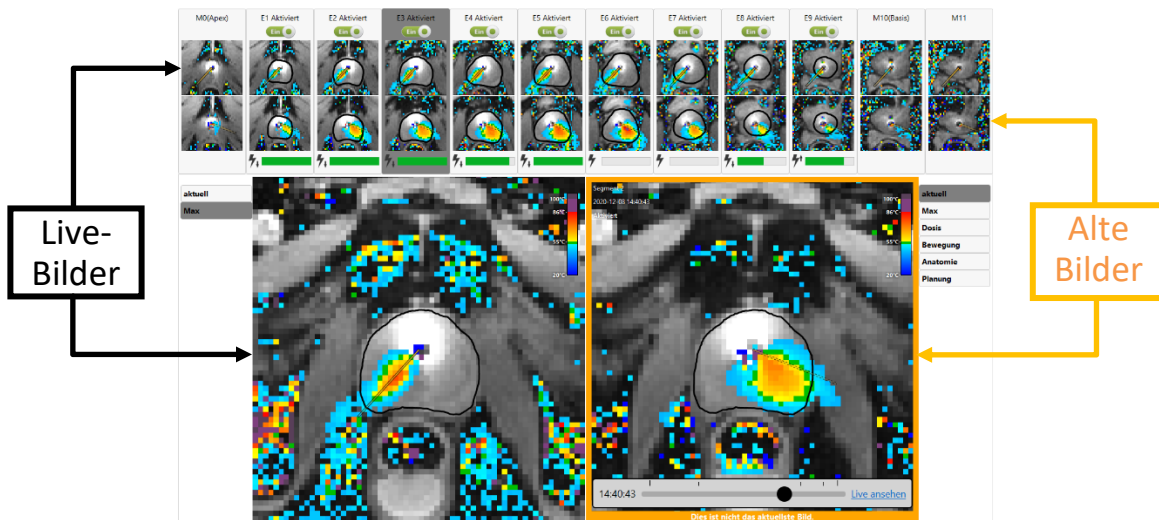


Abbildung 63: Nachricht „Dies ist nicht das aktuellste Bild“ unter dem Verlaufs-Schieberegler

# 11. Bildgebung nach der Behandlung und Berichte

Nach der Abkühlungszeit nach Behandlung wechselt die TDC-Software zum Arbeitsbereich *Berichte*, wo der MRT-MTRA Bilder nach Behandlung aufnimmt, Behandlungsberichte erstellt und Behandlungssitzungsdaten exportiert.

## 11.a Bildgebung nach der Behandlung

Nehmen Sie anhand der folgenden Schritte von der MR-Konsole aus kontrastverstärkte („Contrast enhanced“, CE) MR-Bilder auf, um das Ausmaß der akuten Wärmekoagulation zu beurteilen:

1. Öffnen Sie in der ExamCard die Sequenz „AX T1 pre“.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neueste AX THERM-Sequenz und wählen Sie **Sequenzparameter kopieren** aus.
3. Wählen Sie im neuen Fenster die Option **Zentrum der Schichten und Bereich einstellen** aus.
4. Klicken Sie auf **OK**, und führen Sie „AX T1 pre“ aus.
5. Injizieren Sie nach Abschluss von „AX T1 pre“ das Kontrastmittel in den Patienten.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 etwa 2 Minuten nach der Injektion, um einen übereinstimmenden Satz kontrastverstärkter Bilder (AX T1 post) aufzunehmen.

## 11.b Eingabe der „wichtigen Behandlungsetappen“

MRT-MTRA: Im Fenster „Wichtige Behandlungsetappen“ des Arbeitsbereichs *Berichte* können Sie Folgendes aufzeichnen:

- Den Zeitpunkt, zu dem der Urologe den Ultraschall-Applikator (UA) entfernt hat, und
- den Zeitpunkt, zu dem der Patient aus dem MRT-Raum in den Aufwachbereich gebracht wurde.

Nach dem Speichern jeder „wichtigen Behandlungsetappe“ wird der Bereich grau, und die Schaltfläche **Speichern** wird durch **Bearbeiten** ersetzt.

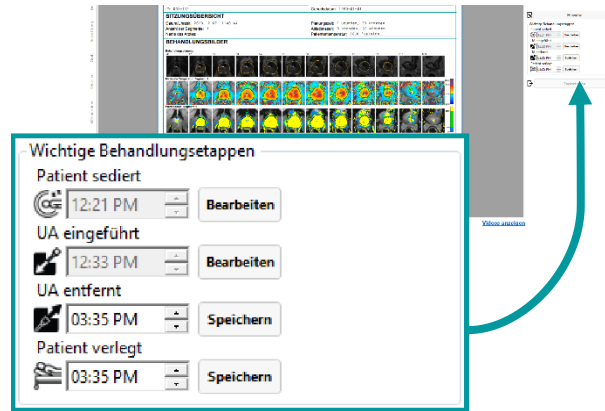


Abbildung 64: Fenster „Wichtige Behandlungsetappen“ im Arbeitsbereich „Berichte“

Die Aufzeichnung dieser Zeitpunkte ermöglicht eine bessere Schätzung der gesamten Dauer des Eingriffs und der gesamten Narkosezeit.

### 11.c Behandlungsberichte

Wenn die Behandlungskonsole (TDC) in den Arbeitsbereich *Berichte* wechselt, wird eine kurze Zusammenfassung der Behandlungssitzung angezeigt (Abbildung 65). Gleichzeitig beginnt die TDC mit der Erstellung von Videos der Behandlung, was einige Minuten dauern kann.

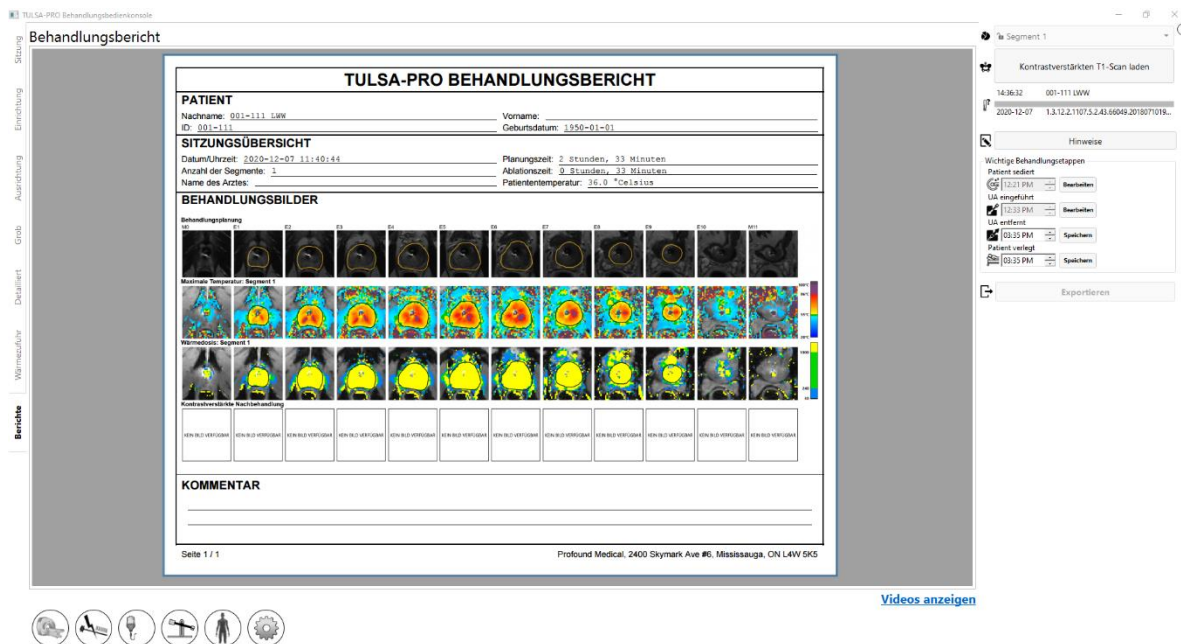


Abbildung 65: TDC-Registerkarte „Berichte“

Der Abschnitt **PATIENT** enthält den Namen, die ID und das Geburtsdatum des Patienten.

**SITZUNGSÜBERSICHT** zeigt einen Überblick über die durchgeführte Behandlung an, einschließlich:

- Datum und Uhrzeit der Sitzung
- Anzahl der Behandlungssegmente (einschließlich aller Segmente, an denen keine Behandlung durchgeführt wurde)
- Name des Arztes (falls für die MRT-Scans eingegeben)
- Schätzung der Gesamtdauer der Behandlung, unterteilt in zwei Zeiträumen:
  - **Ablationszeit:** Eine Schätzung der für die Behandlung in allen Segmenten aufgewendeten Zeit.
  - **Planungszeit:** Die verbleibende Zeit zwischen dem Beginn der Planung (Ausrichtung) und dem Ende der Behandlung.
  - Die Patiententemperatur zu Beginn des zuletzt behandelten Segments.

Der Abschnitt **BEHANDLUNGSBILDER** zeigt den AX T2-Scan für jede Schicht, wie er für die Planung verwendet wurde, gefolgt von der in jedem Behandlungssegment registrierten Maximaltemperatur sowie der geschätzten Wärmedosis. Wenn mehr als ein Behandlungssegment vorhanden war, gibt es für jedes Segment eine Serie von Maximaltemperatur- und Wärmedosisbildern.

Der Bericht zeigt auch jeden über die ganze Sitzung vorgenommenen **KOMMENTAR**.

Über die Registerkarte **Berichte** lassen sich kontrastverstärkte Bilder nach der Behandlung importieren, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.



**HINWEIS:** Die TDC kann nur axiale Bilder und dies nur innerhalb von 12 Stunden nach der Behandlung importieren.

**MRT-MTRA:** Befolgen Sie zum Importieren von Bildern die Anweisungen unter *Übertragen von Planungsbildern vom MRT zur TDC*.

Im Arbeitsbereich *Berichte* können Sie auch Bilder anzeigen, indem Sie die Registerkarte für einen beliebigen Behandlungsschritt auswählen, einschließlich „Sitzung“, „Einrichtung“, „Ausrichtung“, „Grobe Planung“, „Detaillierte Planung“ und „Wärmezufuhr“. Wenn Sie die Behandlungsnotizen auf einer Registerkarte ändern, wird der Behandlungsbericht mit Ihren Änderungen aktualisiert.

Sie können den Arbeitsbereich *Berichte* auch anzeigen, wenn Sie alte Behandlungssitzungen überprüfen. Die TDC-Software kann sogar einen Behandlungsbericht für Sitzungen generieren, die mit früheren Versionen der Software durchgeführt wurden. Jedoch werden einige Felder für alte Sitzungen möglicherweise nicht angezeigt, wenn die entsprechenden Daten nicht gespeichert wurden.

### 11.c.i Anzeigen von Behandlungsvideos

Wenn die TDC die Erstellung der Behandlungsvideos beendet hat, wird der Link [Videos anzeigen](#) unten im Arbeitsbereich *Berichte* angezeigt. Klicken Sie auf [Videos anzeigen](#). Die Behandlungsvideos werden dann im Berichtsbereich der Anzeige angezeigt (*Abbildung 66*).

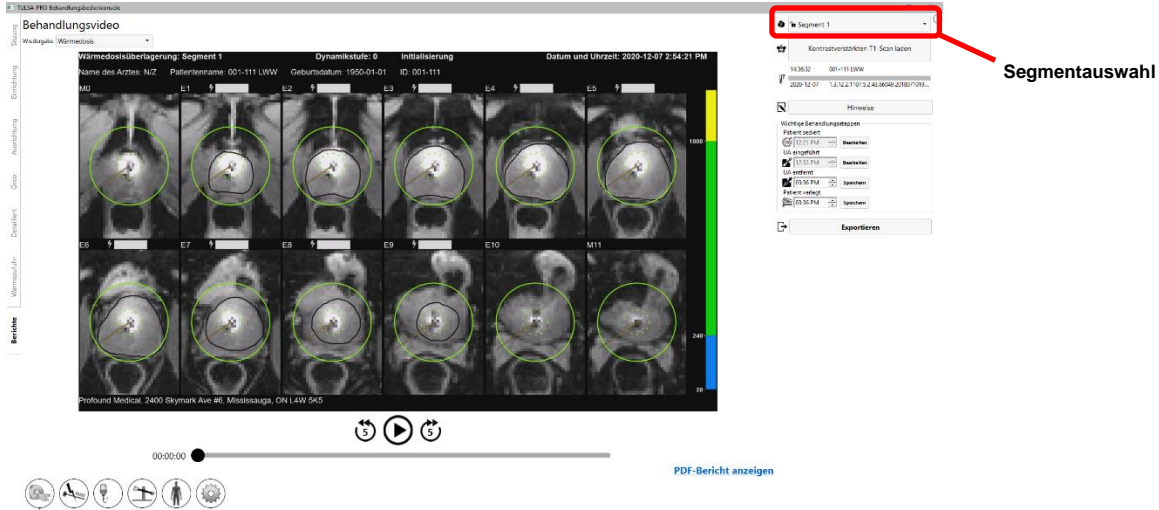


Abbildung 66: Behandlungsvideo wird im Arbeitsbereich „Berichte“ angezeigt

Sie können das Video für das Behandlungssegment wiedergeben (▶) oder (wenn die Sitzung mehrere Segmente hatte) mit der Segmentauswahl (*Abbildung 66*) ein einzelnes Segment selektieren und festlegen, ob die Anatomie mit einer Überlagerung der aktuellen Temperatur, der Maximaltemperatur oder der Wärmedosis angezeigt werden soll. Jedes Video zeigt auch die Prostatagrenze, die Richtung des Strahls in jedem Moment und die Intensität der Erwärmung.

### 11.c.ii Exportieren von Berichten und Videos

Sie können den Behandlungsbericht und die Videos auch auf der Festplatte des Computers oder einem beliebigen Speichermedium speichern. Schließen Sie das entsprechende Speichergerät an und klicken Sie auf **Exportieren**. Das System zeigt ein Fenster an, in dem Sie einen Speicherort für die Dateien auswählen und festlegen können, ob eine PDF-Datei des Berichts und Videos mit Überlagerungen (Wärmedosis, maximale Temperatur, aktuelle Temperatur oder Anatomie) exportiert werden soll (*Abbildung 67*).

Optional lassen sich zur Gewährleistung des Patientendatenschutzes persönliche Patientendaten aus dem PDF-Bericht eliminieren. Wählen Sie **Anonymisieren von Patientendaten**, um Patientendaten vom Export auszuschließen.



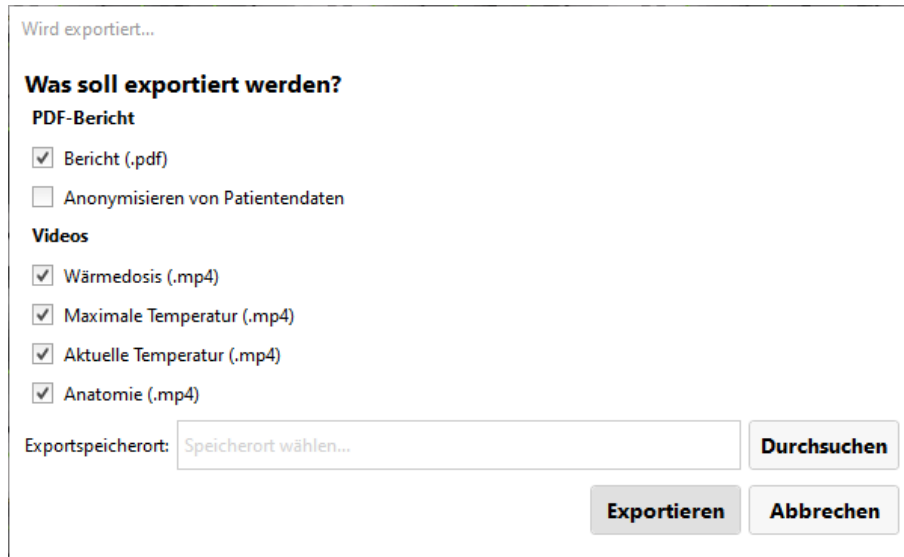


Abbildung 67: Exportieren von Behandlungssitzungsberichten und -videos


## 11.d Export der Nachbehandlungssitzung

MRT-MTRA: Über die Behandlungskonsole (TDC) können Sie die Sitzungsdaten eines Patienten exportieren, um:

- Sitzungsdaten zum Zweck der Fehlerbehebung an Profound Medical zu senden
- Sitzungsinformationen zu sichern, um sie später abrufen und verwenden zu können.

So exportieren Sie eine Patientensitzung:

1. Klicken Sie im TDC-Bildschirm **Sitzung** auf **Exportieren**.

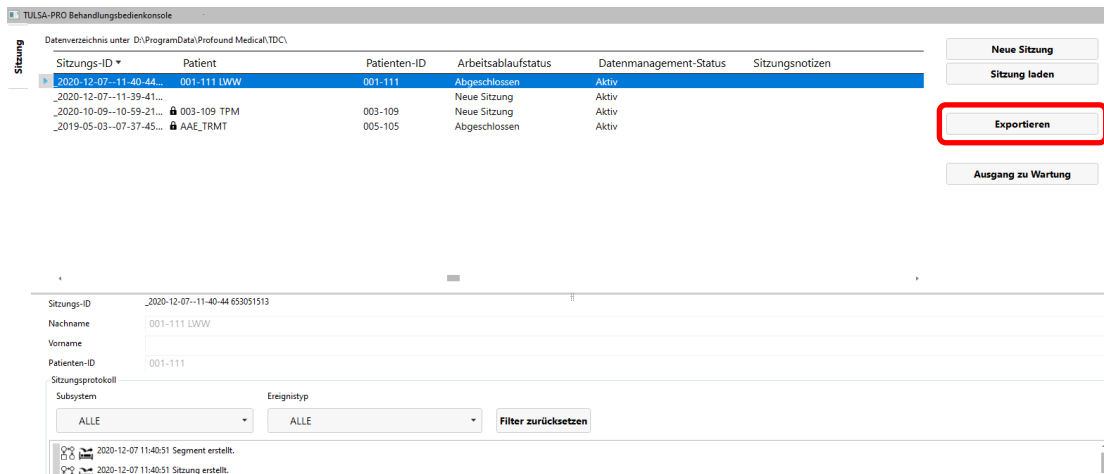

Der Bildschirm **Import/Export-Assistent** wird geöffnet.

2. Füllen Sie im **Import/Export-Assistent** die **Sitzungsexportoptionen** aus:

Import/Export-Assistent

**Sitzungsexportoptionen**

ZIP-Datei der Sitzung in Blöcke aufteilen:


Alle Behandlungs-Wärmebilder einschließen:

Anonymisieren von Patientendaten:

Alias-Name des Patienten (Vorname):

Alias-Name des Patienten (Nachname):

Exportspeicherort:

- i. Sie können die Softwareprotokolle der Sitzung und die zugehörigen Daten exportieren. Darüber hinaus lassen sich Temperaturverteilungsbilder während der Behandlung exportieren. Wählen Sie **Alle Behandlungs-Wärmebilder einschließen** aus, wenn Sie Bilder in den Export aufnehmen möchten.  
 **HINWEIS:** Wenn Sie nicht **Alle Behandlungs-Wärmebilder einschließen** auswählen, wird nur das letzte Bild exportiert.
- ii. Optional können Sie die persönlichen Daten des Patienten *anonymisieren* oder entfernen, um dessen Privatsphäre zu schützen. Wählen Sie **Anonymisieren von Patientendaten**, um Patientendaten vom Export auszuschließen.
- iii. Wenn Sie Patientendaten anonymisieren möchten, müssen Sie Folgendes eingeben:
  - **Alias der Sitzung** oder Referenzname
  - **Alias-Name des Patienten (Vorname)**
  - **Alias-Name des Patienten (Nachname)**
- iv. Geben Sie einen **Exportspeicherort** auf der Festplatte des Computers ein, an dem Sie die Sitzungsdaten speichern möchten. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um einen Ordner zu suchen, in dem Sie die Sitzung speichern möchten.
- v. Auf **Exportieren** klicken.



## 12. Entfernen des Geräts und Patientenerholung

Nach Abschluss der Behandlung und der Bildgebung nach der Behandlung baut der MRT-MTRA die Geräte ab, der Urologe entfernt den UA und das ECD und untersucht den Patienten, und der Anästhesist leitet die Erholung des Patienten ein.

### **Entfernen des Geräts**

1. **MRT-MTRA:** Schalten Sie die Systemelektronik aus.
2. **MRT-MTRA:** Fahren Sie den Patienten auf dem MRT-Tisch aus dem Magneten heraus.
3. **MRT-MTRA:** Trennen Sie das UA-Kabel.
4. **MRT-MTRA:** Schließen Sie die Leitungsklemmen an den UA- und ECD-Schlauchsätzen in der Nähe von UA und ECD.
5. **MRT-MTRA:** Entnehmen Sie die Kochsalzlösung mit einer Spritze aus dem ECD-Ballon.
6. **MRT-MTRA:** Trennen Sie die Flüssigkeitsschlauchsätze von UA und ECD. Lassen Sie dabei Vorsicht walten, da dabei Wasser auslaufen kann. Weitere Lecks an UA, ECD und Schlauchsätzen lassen sich durch Verbinden der entsprechenden Stecker- und Buchsenanschlüsse verhindern.
7. **MRT-MTRA:** Bereiten Sie einen Beutel für biologische Gefahrenstoffe für die Entsorgung von UA und ECD vor (siehe Abschnitt 12.a).
8. **MRT-MTRA:** Öffnen Sie den PS-Greifer, ohne den Patienten zu bewegen, um den UA vom PS zu trennen.
9. **Urologe:** Halten Sie den UA-Griff mit sterilen Handschuhen fest, während der MRT-MTRA das PS bewegt.
10. **MRT-MTRA:** Entriegeln und senken Sie das PS und schieben Sie es dann vom UA weg. Das PS trennen, PS und PSIB von der Basisplatte entfernen und auf die Arbeitsfläche im MRT-Raum ablegen.
11. **Urologe:** Entfernen Sie UA und ECD vom Patienten und entsorgen sie beides in den Beutel für biologische Gefahrenstoffe.
12. **MRT-MTRA:** Lösen und entfernen Sie die vordere Bildgebungsspule sowie alle um den Patienten herum angebrachten Gurte.

### **Patientenerholung**

1. **MRT-MTRA:** Legen Sie den Patienten mit Hilfe des klinischen Teams vom MRT-Tisch auf eine MRT-kompatible Trage um oder koppeln Sie den transportablen MRT-Tisch ab, um den Patienten damit zu transportieren (standortspezifisch).
2. **Urologe:** Untersuchen Sie den Patienten auf Anzeichen positionierungsbedingter Verletzungen.
3. **Urologe:** Wenn ein suprapubischer Katheter verwendet wurde, sollte er nach der Behandlung für einen Zeitraum von 1 bis 4 Wochen aufbewahrt werden. Wenn kein suprapubischer Katheter verwendet wurde, einen Foley-Katheter mit steriler Technik einführen, der mehrere Tage an Ort und Stelle verbleiben muss. Katheter (suprapubisch oder urethral) dürfen nur nach einer Entleerung entfernt werden, die nach Ermessen des verschreibenden Arztes erfolgreich war.
4. **Anästhesist:** Den Patienten in den Vorbereitungsbereich bringen und die Erholung des Patienten gemäß den Anästhesie-Versorgungsstandards einleiten.

### **MRT-MTRA: Geräteabbau**

1. Entfernen Sie die Basisplatte. Entfernen Sie die hintere Bildgebungsspule aus der Spulenhaltung. Entfernen Sie den Spulenhalter.
2. MR-Bilder jetzt bei Bedarf vom MRT-Konsolencomputer kopieren bzw. sichern.
3. Beenden Sie die MRT-Untersuchung (Patienten schließen).
4. Schalten Sie alle TULSA-PRO® Geräte aus: Fahren Sie den TDC-Computer herunter.
5. Führen Sie die Schlauchsätze zurück durch den Hohlleiter in den Geräteraum bzw. den Kontrollraum.
6. Nehmen Sie die Schlauchsätze aus dem Gerätewagen und entsorgen Sie sie gemäß Abschnitt 12.a.
7. Wickeln Sie alle getrennten Kabel auf, entfernen Sie alle TULSA-PRO® Geräte aus dem MRT-Raum, und bringen Sie den Systemwagen an seinen Aufbewahrungsort. Die Filterbox kann an ihrem Platz belassen und an der Penetrationsplatte befestigt werden. Falls die Filterbox entfernt werden muss, die Öffnung der Penetrationsplatte mit der mitgelieferten Abdeckplatte abdecken.
8. MRT-Liege, Basisplatte, Spulenhalter, Beinstützen, Kabel und Patientengurte mit einem Oberflächendesinfektionsmittel (z. B. Virox) abwischen. Sie können das PS und die PSIB ebenfalls mit einem Oberflächendesinfektionsmittel abwischen und dann im dafür vorgesehenen Aufbewahrungskoffer aufbewahren.

## **12.a Reinigung und Entsorgung**

Der Ultraschallapplikator (UA) und das endorektale Kühlgerät (ECD) berühren den Patienten während der Behandlung und werden mit Körperflüssigkeiten kontaminiert.

### **12.a.i Ultraschallapplikator (UA)**

- Tragen Sie beim Umgang mit einem gebrauchten UA Handschuhe, um eine Kontamination mit Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- Der UA ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Der UA darf nicht erneut verwendet werden.
- Entsorgen Sie Abfälle als biologische Gefahrenstoffe.

### **12.a.ii Endorektales Kühlgerät (ECD)**

- Tragen Sie beim Umgang mit einem gebrauchten ECD Handschuhe, um eine Kontamination mit Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- Das ECD ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Das ECD darf nicht erneut verwendet werden.
- Entsorgen Sie Abfälle als biologische Gefahrenstoffe.

### **12.a.iii Flüssigkeitsschläuche**

Die Schläuche des Flüssigkeitskreislaufs sind für den Einmalgebrauch bestimmt. Entsorgen Sie die Schläuche im normalen Müll. Wenn ein Teil der Schläuche sichtbar mit Körperflüssigkeiten verschmutzt ist, diesen als biologischen Gefahrenstoff entsorgen.

### **12.a.iv Positionierungssystem**

Positionierungssystem (PS) und Schnittstellenbox des Positionierungssystems (PSIB) sind nur für Oberflächen- und Hautkontakt vorgesehen. Durch die Nähe zum Patienten ist es jedoch möglich, dass sie während der Behandlung mit Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen. Wischen Sie die Außenflächen mit einem Tuch mit Standard-Desinfektionsmittel für Oberflächen (z. B. Virox) ab, um sichtbare Verunreinigungen zu entfernen. Zur besseren Reinigung können Sie bei Bedarf ein Desinfektionsmittel auf den Greifer sprühen.

### **12.a.v Systemwagen**

Der Systemwagen und seine Komponenten (Systemelektronik und Hardware des Flüssigkeitskreislaufs) müssen routinemäßig nicht gereinigt werden. Entfernen Sie Oberflächenschmutz oder Verunreinigungen durch Abwischen mit einem feuchten Tuch.

### **12.a.vi TDC-Computer**

Eine routinemäßige Reinigung des Computers der Behandlungskonsole (TDC) ist nicht erforderlich. Entfernen Sie Schmutz und Verunreinigungen auf der Oberfläche durch Abwischen mit einem feuchten Tuch.

# 13. Software-Alarmmeldungen

## 13.a Alarmanzeigen

Ein Bereich unten links auf dem Bildschirm der Behandlungskonsole (TDC) zeigt Alarmsignale an, wenn eine Sitzung läuft (Abbildung 68).

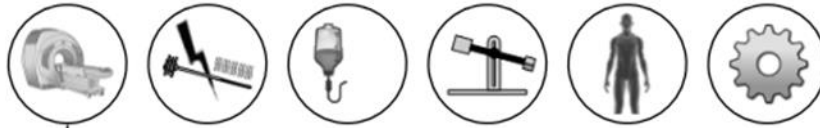








Abbildung 68: Alarmanzeigen (alle Anzeigen sind abgeschaltet)

In der folgenden Tabelle werden die verwendeten Symbole aufgelistet und beschrieben:

Tabelle 1: Alarmanzeigen

ANZEIGE	ALARM UND INFORMATIONEN IN BEZUG AUF ...	ALARMKLASSIFIZIERUNG
	...die Kommunikation zum verbundenen MRT-System und dessen Funktionalität oder um anzuzeigen, dass keine MRT-Verbindung besteht.	Technisch
	...den HF-Kreis.	Technisch
	...Flüssigkeitskreisläufe.	Technisch
	...das Positionierungssystem (PS).	Technisch
	...den Zustand des MRT-Sichtfeldes in Bezug auf beobachtete und vorhergesagte Temperaturen in der behandelten Region des Patienten.	Physiologisch
	...den Status des Computers der Behandlungskonsole (TDC).	Technisch

### 13.b Beschreibung der Alarmbedingungen

Obwohl die TDC-Software über fünf Anzeigen verfügt, die mit verschiedenen Hardwarekomponenten verbunden sind, und über eine einzige Anzeige, die mit physiologischen Parametern des zu behandelnden Patienten verknüpft ist, können für jede Anzeige mehrere Bedingungen als *Information* oder *Warnung* klassifiziert sein.

Eine **Informationsbedingung** tritt auf, wenn das entsprechende Subsystem eine geringfügige Abweichung von der normalen Funktionalität feststellt. Informationsbedingungen haben keinen Einfluss auf die normale Einrichtung, Planung oder den Behandlungsablauf des TDC; sie lenken nur die Aufmerksamkeit auf ein potenzielles Problem.

Ein **Warnzustand** tritt auf, wenn eine größere Abweichung bei einem Hardware- oder physiologischen Parameter vorliegt, die einen schnellen Eingriff erfordert. Je nach Zustand und aktuellem Status des Arbeitsablauf des Systems kann eine Warnbedingung den normalen TDC-Arbeitsablaufs beeinträchtigen.

Jede Informations- und Warnbedingung hat einen Fehlercode, der in der TDC am Ende der Fehlermeldung angezeigt wird. Der Anhang *Leitfaden zur Fehlerbehebung: Alarmsignale* enthält detaillierte Angaben zu Warnbedingungen, deren Verzögerungen und Auswirkungen auf den TDC-Arbeitsablauf sowie Tipps zur Fehlerbehebung. Die TDC-Warmmeldungen zeigen den Fehlercode mit einem Hyperlink an. Klicken Sie auf den Link, um den entsprechenden Abschnitt zur Fehlerbehebung im Anhang zu öffnen.

Wenn keine Informations- oder Warnbedingung mit einem Subsystem verknüpft ist, bleibt die entsprechende Untersystem-Alarmanzeige leer (*Abbildung 68*).

Wenn ein Subsystem eine **Informationsbedingung** erkennt, wird die Hintergrundfarbe der entsprechenden Anzeige **hellblau** dargestellt und oben rechts in der Anzeige ein zusätzliches Symbol (i) angezeigt (*Abbildung 69*).

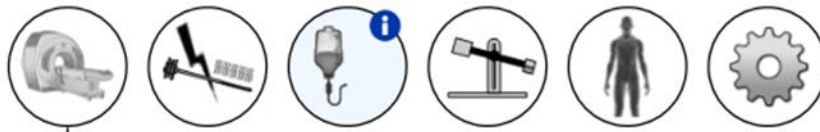


Abbildung 69: Beispiel einer Informationsbedingung

Wenn ein Subsystem einen Zustand der **Warnstufe** erkennt, wird die Hintergrundfarbe der entsprechenden Anzeige **orange** dargestellt und oben rechts in der Anzeige ein zusätzliches Symbol (!) angezeigt (*Abbildung 70*).

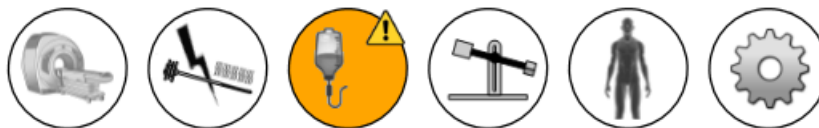


Abbildung 70: Beispiel für eine Warnbedingung

Sowohl die durch TDC erkannten Zustände der Informations- als auch der Warnstufe sind *nicht selbsthaltend*, d. h. die Zustandsanzeige wird gelöscht, sobald das entsprechende Problem behoben ist. Die Zustandsanzeige zeigt jedoch 10 Sekunden lang ihre Meldung an, auch wenn das Problem während dieser Zeit behoben wurde. Wenn das System beispielsweise einen ungewöhnlich hohen Druck in einem Flüssigkeitskreislauf aufgrund einer physischen Flusobstruktion erkennt, zeigt das System den entsprechenden Alarm für den Flüssigkeitskreislauf an. Sobald Sie das Hindernis beseitigen und das System eine Drucknormalisierung erkennt, kehrt die Alarmanzeige in einen normalen oder abgeschalteten Zustand zurück.



**HINWEIS:** Obwohl Anwender nicht mit der TDC interagieren müssen, um den Alarm und den entsprechenden Zustand zu löschen, müssen Sie möglicherweise den normalen Arbeitsablauf des TDC-Systems wiederherstellen. Wenn das oben beschriebene Szenario während der Behandlung auftrat, würde das System die Rotation und Wärme des Ultraschallapplikators (UA) stoppen. Nach der Beseitigung der Durchflussblockierung wird der Alarm gelöscht, aber die Wärme- und Rotationsbehandlung **beginnt erst**, wenn Sie in der TDC auf **Erwärmung fortsetzen** klicken.

Neben einer Änderung der Hintergrundfarbe einer Alarmanzeige wird neben der Anzeige eine Popup-Meldung mit Details angezeigt (*Abbildung 71*). Diese Meldung erscheint 10 Sekunden lang auf dem Bildschirm. Bewegen Sie den Cursor über die Alarmanzeige, um die Popup-Meldung erneut anzuzeigen.

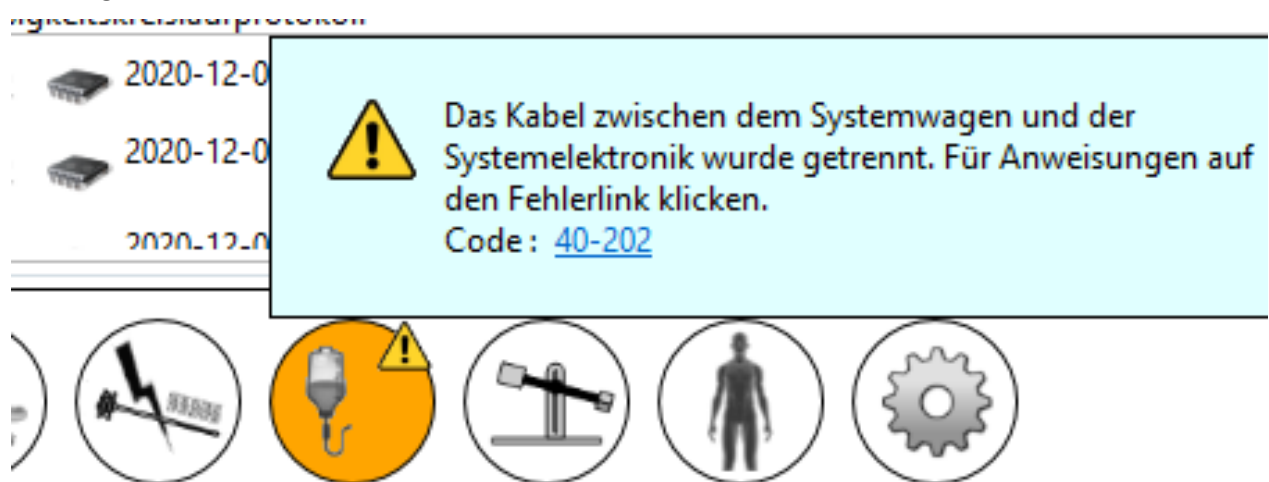





Abbildung 71: Beispiel für eine Meldung mit Alarmbedingungsdetails

### 13.c Mehrere Alarmbedingungen

Ein Subsystem kann mehrere Bedingungen auf Informations- und Warnebene erkennen. In der folgenden Tabelle wird das Verhalten der Subsystem-Alarmanzeige in Abhängigkeit von den Zustandsstufen beschrieben.

Tabelle 2: Beispiel für mehrere Subsystembedingungen

SUBSYSTEM VERBUNDEN	ES IST MINDESTENS EINE BEDINGUNG AUF WARNSTUFE VORHANDEN	ES IST MINDESTENS EINE BEDINGUNG AUF INFORMATIONSTUFE VORHANDEN	HINTERGRUND DER ANZEIGE	STATUSSYMBOL
Ja	Nein	Nein	Standardsystem	Kein Symbol
Ja	Nein	Ja	Hellblau	
Ja	Ja	Nein	Orange	
Ja	Ja	Ja	Orange	

Die entsprechende Subsystem-Popup-Meldung enthält alle Bedingungsbedingungen (Abbildung 72).

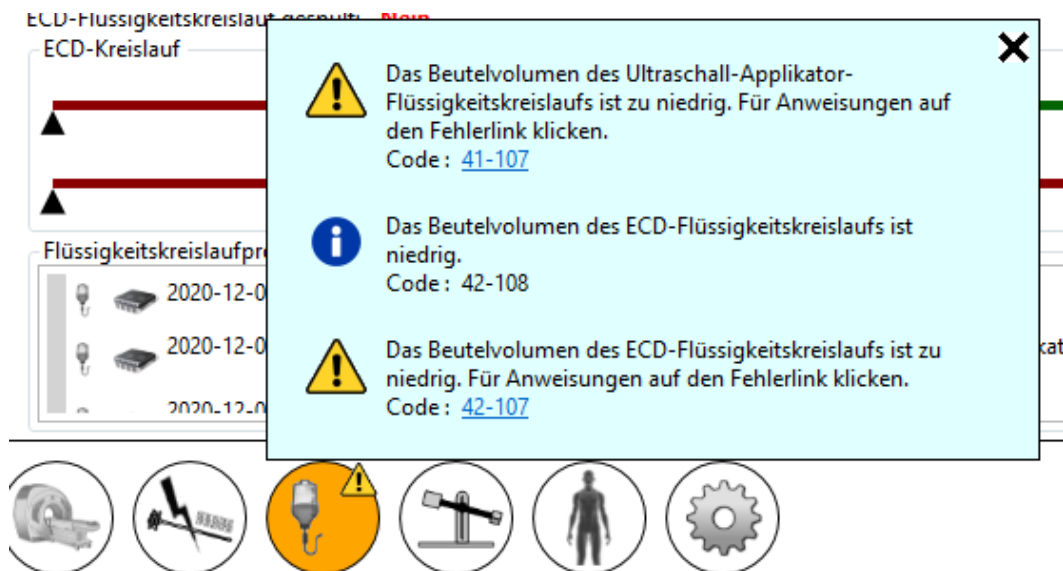


Abbildung 72: Mehrere Bedingungsbedingungen in der Popup-Meldung

### 13.d Alarmbedingungsprotokoll

Jede in einer Sitzung erkannte Warn- oder Informationsbedingung wird im Überwachungsprotokoll der Sitzung registriert und kann jederzeit während der Sitzung überprüft werden, indem zum Arbeitsbereich *Sitzung* gewechselt wird. Sie können die Bedingungen jedes Remote-Hardware-Subsystems (MRT, HF, FC und PS) einzeln anzeigen, indem Sie während der Sitzung jederzeit zum Arbeitsbereich *Einrichtung* wechseln. Die Bedingungen werden im entsprechenden Subsystemprotokoll angezeigt.



**HINWEIS:** Die Festplatte des Hostsystems erstellt ein Überwachungsprotokoll, sobald eine Warn- oder Informationsbedingung für ein Subsystem erkannt wird.

# A. TULSA-PRO® MRT Tipps zur Fehlerbehebung

## A.1. Probleme aufgrund von Patientenbewegung

Jede Bewegung beeinflusst die MR-Thermometrie der Prostata negativ. Nachfolgend sind die problemerzeugenden Schritte und entsprechende Abhilfemaßnahmen aufgeführt:

BEWEGUNGSPROBLEM	ABHILFEMAßNAHME...
<b>Atmung</b>	Die Spulen fest fixieren.
<b>Pulsieren von Venen bzw. Arterien</b>	Positionieren Sie den Patienten neu, um Winkel bzw. Position der Vene bzw. Arterie zu ändern.
<b>Gefüllte Blase</b>	Vor der Behandlung einen suprapubischen Katheter in den Patienten einführen.
<b>Stuhlsammlung</b>	Vergewissern Sie sich, dass der Patient eine vollständige Darmentleerung durchgeführt hat.
<b>Peristaltik</b>	Verabreichen Sie dem Patienten Spasmolytika.
<b>Blähungen</b>	

## A.2. Thermometrie und Temperaturunsicherheit

Um Temperaturänderungen in der Prostata adäquat anzeigen zu können, darf sich das Gewebe nicht bewegen und muss ein niedriges Fett/Wasser-Verhältnis aufweisen. Außerdem muss das Signal-Rausch-Verhältnis in den Untersuchungsbereichen hoch genug sein, da sonst die Temperatur in MR-Thermometriebildern falsch ausgewertet werden könnte. Verwenden Sie während der Behandlungsplanung die Temperaturunsicherheitsverteilung der MR-Thermometrie, um die Auswahl von Bereichen mit ausreichend hohem Signal zu unterstützen.

1. Fettprotonen tragen nicht zur Änderung des MR-Wärmesignals bei. Daher verwendet die MR-Thermometriesequenz eine im MR-Protokoll festgelegte Fettsättigungsmethode. Deswegen kann TULSA-PRO® die Temperatur nicht in Regionen außerhalb der Prostata messen, die überwiegend aus fetthaltigem Gewebe bestehen.
2. Falsche Temperaturmessungen können durch das Fehlen eines MR-Thermometriesignals, Bildverzerrungen aufgrund von Magnetfeldschwankungen oder anderen Artefakten verursacht werden. Die TDC-Software überwacht die Temperatur während der Behandlungsplanung und während der Behandlung. Wenn Temperaturunsicherheitsmessungen während der Validierung von Zielgrenzen außerhalb des zulässigen Bereichs liegen, wird Ihnen ein Fehler angezeigt, wenn Sie die Zielgrenze während der Planung definieren oder während der Behandlung ändern.



3. Temperaturen innerhalb eines MR-Thermometrie-Voxels (Auflösung in der Ebene und Schichtdicke) werden gemittelt. Die räumliche Auflösung der MR-Thermometriemessung wird sorgfältig ausgewählt, um genaue Temperaturmessungen zu gewährleisten. Das MRT-Protokoll legt eine Auflösung von 2 x 2 mm<sup>2</sup> in der Ebene und eine Schichtdicke von 4 mm fest.
4. Temperaturänderungen werden über die Erfassungszeit des MR-Thermometriebildes integriert. Zum Gewährleisten genauer Temperaturmessungen gibt das MR-Protokoll die Bildaufnahmezeit an, die zwischen 5 und 6 Sekunden liegen kann.
5. Die Ultraschallerwärmung bei Vorhandensein großer Zysten und Kalkablagerungen wurde mit TULSA-PRO® nicht validiert. Behandeln Sie keine Patienten mit dem TULSA-PRO® System, bei denen Zysten oder Kalkablagerungen innerhalb des Zielgewebereichs der Prostata auftreten, die größer als 1 cm sind.  
Kleinere Zysten bzw. Kalkablagerungen können behandelt werden, wenn sie im Inneren der Drüse liegen und nicht in der Peripherie, wo Temperatur-Feedback-Messungen berechnet werden. Seien Sie vorsichtig und wachsam, wenn Sie Gewebe in der Nähe solcher Anomalien behandeln.

### **A.3. Zugriff auf Benutzerdokumentation über die TDC**

Auf jedem TDC-Bildschirm und bei jedem Schritt – außer während der Bestrahlung – können Sie F1 auf der Tastatur drücken, um das *TULSA-PRO® Benutzerhandbuch* zu öffnen und anzuzeigen. Klicken Sie in der oberen Ecke auf das Kreuzchen, um das Dokumentfenster zu schließen.

## B. Leitfaden zur Fehlerbehebung: Alarmsignale

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie sich Probleme beheben lassen, die die Behandlung eines Patienten beeinträchtigen oder stoppen können.




**Es ist wichtig, dass alle Benutzer diesen Abschnitt lesen, um sicherzustellen, dass Patienten während eines Fehlerbehebungsprozesses nicht versehentlich verletzt werden.**

Dies geschieht in der Regel, wenn die Behandlungskonsole (TDC) ein Problem erkennt:

1. Es wird eine **Bedingung** erkannt, die eine Alarmauslösung erfordert.
2. Die **Alarmmeldung** wird in der TDC-Konsole angezeigt.
3. Das **TULSA-PRO® System reagiert**, indem es die entsprechenden Maßnahmen ergreift.
4. Der Benutzer **behebt die Ursache** für die Behebung des Problems.
5. Der Benutzer führt **zusätzliche Schritte** aus, um den Normalbetrieb wieder aufzunehmen.

Suchen Sie in diesem Abschnitt nach der entsprechenden Tabelle, wenn in der TDC-Konsole ein Alarm angezeigt wird, um herauszufinden, wie das Problem behoben werden kann.

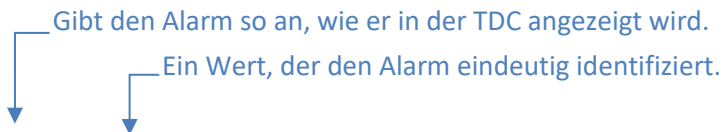

### Alarm [00-000]

<b>Bedingung</b>	Hier wird beschrieben, warum der Alarm ausgelöst wurde.
<b>Fehlercode</b>	Der mit der Bedingung verbundene von der TDC generierte Softwarecode. Dieser Code wird von autorisierten Servicetechnikern von Profound Medical bei der Lösung komplexer Probleme herangezogen.
<b>Verzögerung</b>	Gibt den Zeitraum zwischen dem Beginn des Problems und dem Zeitpunkt an, zu dem der Alarm ausgelöst wurde.
<b>Systemantwort</b>	Beschreibt die automatisch von der TDC ausgeführten Aktionen, wenn der Alarm ausgelöst wird. Während der Behandlung führt die TDC in der Regel folgende Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Behandlung pausieren:</b> Alle Erwärmungs- und Bewegungsvorgänge werden angehalten, oder</li> <li>- <b>Behandlung unterbrechen:</b> Alle Erwärmungs- und Bewegungsvorgänge werden gestoppt und nachfolgende Thermometriedynamiken ignoriert.</li> </ul>

<b>Behebung der Ursache</b>	Beschreibt die zum Löschen des Alarms erforderlichen Schritte. Bei der Fehlerbehebung wird empfohlen, die Empfehlungen in der angegebenen Reihenfolge auszuprobieren. Zum Beispiel: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diese Maßnahme zuerst ausführen. Wenn der Alarm dadurch nicht gelöscht wird, dann ...</li><li>2. Versuchen Sie es mit dieser Maßnahme.</li></ol>
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	Beschreibt zusätzliche Schritte zum Wiederherstellen des TULSA-PRO® Normalbetriebs.

Nach der Problembehebung müssen Sie den TDC-Arbeitsablauf möglicherweise bis zu *Wärmezufuhr* durchlaufen, um ein neues Behandlungssegment zu starten.

Wenn Sie das Problem ohne Verlassen des Arbeitsbereichs *Wärmezufuhr* lösen können, müssen Sie entscheiden, wie Sie fortfahren möchten:

- **Wenn die Behandlung pausiert wurde:**
  - i. *Erwärmung fortsetzen* mit dem aktuellen Segment.
  - ii. *Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern*, indem Sie ein neues Segment erstellen.
  - iii. *Behandlung abschließen und Bericht anzeigen* für die aktuelle Sitzung.
- **Wenn die Behandlung unterbrochen wurde:**
  - *Erwärmung fortsetzen* mit dem aktuellen Segment.
  - *Behandlung abschließen und Bericht anzeigen* für die aktuelle Sitzung.

Wenden Sie sich an einen autorisierten Profound Medical Servicetechniker, wie im Abschnitt „*Service und Wartung*“ der *TULSA-PRO® Bedienungsanleitung* beschrieben, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.

## B.1. Flüssigkeitswagen

### 40-201: Keine Netzwerkverbindung zwischen TDC und Systemwagen

<b>Bedingung</b>	Der Systemwagen hat die Netzwerkverbindung zum TDC-Computer verloren.
<b>Fehlercode</b>	40-201
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> UA- und ECD-Spülung werden abgebrochen. HF-Test kann nicht durchgeführt werden.</p> <p><b>Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>

<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Thermometriesequenz auf dem MRT ausgeführt wird und für den durchzuführenden Thermometrie-Scan genügend Dynamiken ausgewählt wurden. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Siemens: 26 Dynamiken für „Detailliert“, mindestens 800 Dynamiken für „Wärmezufuhr“</b></li> <li><b>Philips: 25 Dynamiken für „Detailliert“, mindestens 1200 Dynamiken für „Wärmezufuhr“</b></li> </ul> </li> <li>Vergewissern Sie sich durch Kontrolle des Status <i>des</i> MRT-Subsystems im Arbeitsbereich <i>Einrichtung</i>, dass MRT- und TDC-Computer weiterhin über ihre Netzwerkverbindungen kommunizieren können.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die entsprechende TULSA-PRO® Sequenz und die entsprechenden Parameter für die Thermometrieerfassung verwendet werden.</li> </ol>
-----------------------------	---

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu. Der Alarm wird gelöscht, sobald das neue Bild empfangen wird.
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu. Der Alarm wird gelöscht, sobald das neue Bild empfangen wird.</li> </ol>
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen.</li> <li>Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu. Der Alarm wird gelöscht, sobald das neue Bild empfangen wird.</li> </ol>


## 40-202: Kabel zwischen Systemwagen und Systemelektronik getrennt

<b>Bedingung</b>	Das Systemwagen (SW) und Systemelektronik (SE) verbindende Kabel ist nicht angeschlossen.	
<b>Fehlercode</b>	40-202	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> UA- und ECD-Spülung werden abgebrochen. HF-Test kann nicht durchgeführt werden.</p> <p><b>Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel zwischen Systemwagen und Systemelektronik angeschlossen ist.</li> <li>2. Ziehen Sie das Kabel von Systemelektronik und Systemwagen ab, falls der Alarm immer noch nicht behoben ist. Das Kabel wieder anschließen und eine Minute lang warten. Kontrollieren Sie, ob der Alarm nicht mehr angezeigt wird.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>2. Führen Sie nach dem Beheben des Alarms eine weitere UA- und ECD-Spülung durch.</li> </ol>
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>2. Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>3. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>4. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>5. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie in der TDC auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen.</li> <li>2. Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>3. Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>4. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>5. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>6. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>

## 40-206: Raumtemperatur für den Systemwagen zu hoch

<b>Bedingung</b>	Die Temperatur des Systemwagens ist größer als oder gleich 37 °C	
<b>Fehlercode</b>	40-206	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort. <b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht. <b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>Verringern Sie die Temperatur im Raum, in dem sich der Systemwagen befindet. Zum Beispiel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergewissern Sie sich, dass die Klimaanlage im Raum, in dem sich der Systemwagen befindet, eingeschaltet ist.</li> <li>2. Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nähe des Systemwagens eine Belüftung befindet.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet. Der Alarm verhindert zwar nicht, dass Sie zur nächsten Behandlungsphase übergehen, Sie können jedoch keine Ablation durchführen.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>2. Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>3. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>4. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>5. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>
<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie in der TDC auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen.</li> <li>2. Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>3. Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>4. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>5. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>6. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>	


## 41-107: Beutelvolumen des Ultraschallapplikator-Flüssigkeitskreislaufs zu niedrig

<b>Bedingung</b>	Das Volumen im Ultraschallapplikator-(UA)-Kreislauf ist kleiner oder gleich 400 ml.
<b>Fehlercode</b>	41-107
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> UA-Spülung wird abgebrochen. HF-Test kann nicht durchgeführt werden.</p> <p><b>Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Führen Sie eine Sichtprüfung der UA-Schläuche und aller Luer-Lock-Anschlüsse auf Undichtigkeiten zwischen Flüssigkeitsbehälter, Pumpe und UA durch.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass der Flüssigkeitsbehälter des UA mindestens 500 ml Flüssigkeit enthält. <ul style="list-style-type: none"> <li>Füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit in den Behälter ein.</li> </ul> </li> </ol> <p> <b>HINWEIS:</b> Möglicherweise muss ein neuer steriler 1-l-Wasserbeutel geöffnet werden.</p>

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Führen Sie eine weitere UA-Spülung durch.</li> <li>Nach dem Spülen führen Sie einen HF-Test durch.</li> </ol>
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>
<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen.</li> <li>Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>	



## 41-109: Pumpendruck des Ultraschallapplikator-Flüssigkeitskreislaufs zu niedrig


<b>Bedingung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Während der Reinigung des Ultraschallapplikators (UA): Der UA-Druck ist nach Abschluss des Spülzyklus kleiner oder gleich 3 psi.</li> <li>Im Normalbetrieb: Der UA-Druck ist kleiner oder gleich 3 psi, wobei die Pumpen mindestens 20 Sekunden lang eingeschaltet sind.</li> </ul>	
<b>Fehlercode</b>	41-109	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> UA-Spülung wird abgebrochen. HF-Test kann nicht durchgeführt werden.</p> <p><b>Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung wird angehalten.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass der UA-Drucksensor an den Systemwagen angeschlossen ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass der UA-Flüssigkeitsbehälter mehr als 400 ml Flüssigkeit enthält. Dies lässt sich anhand des UA-Kreislaufs – Volumen auf der Registerkarte <i>Einrichtung</i> in der TDC überprüfen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit in den Behälter (dieser muss mindestens 500 ml enthalten).</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p><b>HINWEIS:</b> Möglicherweise muss ein neuer steriler 1-l-Wasserbeutel geöffnet werden.</p> </div> </li> <li>Führen Sie eine Sichtprüfung der UA-Schläuche und aller Luer-Lock-Anschlüsse auf Undichtigkeiten zwischen Flüssigkeitsbehälter, Pumpe und UA durch.</li> <li>Prüfen Sie, ob der Anschluss des UA-Drucksensors richtig am Flüssigkeitswagen angeschlossen ist. Den UA-Drucksensor aus der Systemelektronik entnehmen und wieder einsetzen. Achten Sie dabei darauf, dass er vollständig in seinem Steckplatz sitzt.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Führen Sie eine weitere UA-Spülung durch.</li> <li>Anschließend einen HF-Test durchführen.</li> </ol>
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>

<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Klicken Sie in der TDC auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen.</li><li>2. Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li><li>3. Beheben Sie die Ursache des Alarms.</li><li>4. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li><li>5. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li><li>6. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li></ol>
-----------------------------------	---


## 41-110: Pumpendruck des Ultraschallapplikator-Flüssigkeitskreislaufs zu hoch

<b>Bedingung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Während der Einrichtung (Spülung): Der Druck des Ultraschallapplikators (UA) ist nach Abschluss des Spülzyklus größer oder gleich 30 psi.</li> <li>Während der Verabreichung (Initialisierung oder Ablation): Der UA-Druck ist größer oder gleich 30 psi, wobei die Pumpen mindestens 20 Sekunden lang eingeschaltet sind.</li> </ul>	
<b>Fehlercode</b>	41-110	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung (Spülung):</b> UA-Spülung wird abgebrochen. HF-Test kann nicht durchgeführt werden.</p> <p><b>Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unterziehen Sie die UA-Schläuche zwischen Flüssigkeitsbehälter, Pumpe und UA einer Sichtprüfung. Zum Beispiel: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass alle Klemmen der Flüssigkeitsleitung in UA-Nähe geöffnet sind.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch korrekt eingelegt und im UA-Pumpenkopf nicht abgeknickt ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die UA-Schläuche nicht unter einem Rad des Flüssigkeitswagens oder anderen Geräten in den MRT-/Technik-/Kontrollräumen liegen.</li> </ul> </li> <li>Unter Umständen ist die Temperatur des Raums, in dem sich der Systemwagen befindet, zu erhöhen. Dieser <i>ungewöhnliche</i> Alarm kann gelegentlich auftreten, wenn die Raumtemperatur, in der sich der Systemwagen befindet, zu niedrig ist.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Führen Sie eine weitere UA-Spülung durch, wenn die UA-Spülung noch nicht abgeschlossen ist. Starten Sie den HF-Test, wenn die Spülung abgeschlossen ist, der HF-Test jedoch noch nicht abgeschlossen wurde.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	Klicken Sie zum Fortsetzen der Behandlung in der TDC-Konsole auf <b>Erwärmung fortsetzen</b> .
<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>		

## 42-107: Beutelvolumen des ECD-Flüssigkeitskreislaufs zu niedrig

<b>Bedingung</b>	Das Volumen im ECD-Kreislauf ist kleiner oder gleich 400 ml.	
<b>Fehlercode</b>	42-107	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> ECD-Spülung wird abgebrochen. HF-Test kann nicht durchgeführt werden.</p> <p><b>Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ECD-Flüssigkeitsleitung und alle Inline-Luer-Lock-Anschlüsse auf Undichtigkeiten zwischen Flüssigkeitsbehälter, Pumpe und ECD kontrollieren.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass der ECD-Flüssigkeitsbehälter mindestens 500 ml Flüssigkeit enthält. <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn zusätzliche Flüssigkeit im Flüssigkeitsbehälter erforderlich ist, sicherstellen, dass dem Flüssigkeitsbehälter auch die entsprechende Menge MnCl und Span/Tween hinzugefügt wird.</li> </ul> </li> </ol> <p> <b>HINWEIS:</b> Möglicherweise müssen Sie eine neue Flasche Span/Tween, MnCl und einen sterilen 1-l-Wasserbeutel öffnen.</p>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Führen Sie eine weitere ECD-Spülung durch.</li> </ol>
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>
<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen.</li> <li>Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>	

## 42-109: Pumpendruck des ECD-Flüssigkeitskreislaufs zu niedrig

<b>Bedingung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Während der ECD-Spülung: Der ECD-Druck ist nach Abschluss des Spülzyklus kleiner oder gleich 13 psi.</li> <li>Im Normalbetrieb: Der ECD-Druck ist kleiner oder gleich 13 psi, wobei die Pumpen mindestens 20 Sekunden lang eingeschaltet sind.</li> </ul>	
<b>Fehlercode</b>	42-109	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> ECD-Spülung wird abgebrochen.</p> <p><b>Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass der ECD-Drucksensor an den Systemwagen angeschlossen ist.</li> <li>Unterziehen Sie die ECD-Flüssigkeitsleitung einer Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zwischen Flüssigkeitsbehälter, Pumpe und ECD.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass der ECD-Flüssigkeitsbehälter mindestens 500 ml Flüssigkeit enthält. Wenn zusätzliche Flüssigkeit im Flüssigkeitsbehälter erforderlich ist, sicherstellen, dass dem Wasser auch die entsprechende Menge MnCl und Span/Tween hinzugefügt wird.</li> </ol> <p> <b>HINWEIS:</b> Möglicherweise müssen Sie eine neue Flasche Span/Tween, MnCl und einen sterilen 1-l-Wasserbeutel öffnen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie den Anschluss des ECD-Drucksensors am Flüssigkeitswagen. Den ECD-Drucksensor entnehmen und wieder einsetzen. Achten Sie dabei darauf, dass er vollständig in seinem Steckplatz sitzt.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Führen Sie nach dem Beheben des Alarms eine weitere ECD-Spülung durch.</li> </ol>
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>

<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Klicken Sie in der TDC auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen.</li><li>2. Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li><li>3. Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li><li>4. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li><li>5. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li><li>6. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li></ol>
-----------------------------------	--

## 42-110: Pumpendruck des ECD-Flüssigkeitskreislaufs zu hoch

<b>Bedingung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Während der ECD-Spülung: Der ECD-Druck ist nach Abschluss des Spülzyklus größer oder gleich 37 psi.</li> <li>Im Normalbetrieb: Der ECD-Druck ist größer oder gleich 37 psi, wobei die Pumpen mindestens 20 Sekunden lang eingeschaltet sind.</li> </ul>
<b>Fehlercode</b>	42-110
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> ECD-Spülung wird abgebrochen.</p> <p><b>Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.</p>
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Unterziehen Sie die ECD-Schläuche zwischen Flüssigkeitsbehälter, Pumpe und ECD einer Sichtprüfung. Zum Beispiel: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass alle Klemmen der Flüssigkeitsleitung in ECD-Nähe geöffnet sind.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass der Flüssigkeitsschlauch korrekt in den ECD-Pumpenkopf eingelegt und nicht geknickt ist.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die ECD-Schläuche nicht unter einem Rad des Flüssigkeitswagens oder anderen Geräten in den MRT-/Technik-/Kontrollräumen liegen.</li> </ul> </li> <li>ECD-Flüssigkeit und Zusätze im ECD-Tank müssen ausreichend gemischt sein.</li> <li>Unter Umständen ist die Temperatur des Raums, in dem sich der Systemwagen befindet, zu erhöhen.</li> </ol> <p>Dieser <u>ungewöhnliche</u> Alarm kann gelegentlich auftreten, wenn die Raumtemperatur, in der sich der Systemwagen befindet, kalt ist.</p>

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Führen Sie nach dem Beheben des Alarms eine weitere ECD-Spülung durch.</li> </ol>
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Initialisierung stoppen</b>.</li> <li>Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>



<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Beheben Sie die Ursache des Alarms, sodass die Meldung verschwindet.</li><li>2. Klicken Sie zum Fortsetzen der Behandlung in der TDC auf <b>Erwärmung fortsetzen</b>.</li></ol>
-----------------------------------	--

## B.2. Magnetresonanztomografie

### 50-201: IP-Adresse oder der IP-Port für die MRT-Kassette falsch oder bereits belegt

<b>Bedingung</b>	Die von der MRT-Kassette angegebene IP-Adresse und der Port werden von einem anderen Programm verwendet.
<b>Fehlercode</b>	50-201
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	TDC empfängt in keiner Phase Thermometriebilder vom MRT.
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schließen Sie die TDC-Anwendung und starten Sie den TDC-Computer neu.</li><li>• Vergewissern Sie sich, dass kein anderer MRT-Client-Computer eingeschaltet ist.</li><li>• Wenden Sie sich an Ihr IT-Supportteam vor Ort, um Unterstützung anzufordern:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Vergewissern Sie sich, dass auf der TDC keine zusätzlichen Programme installiert wurden, die mit dem MRT-Host kommunizieren können.</li><li>○ Öffnen Sie in der TDC den <i>Wartungsmodus</i> und vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden <i>MRT-Konfigurationswerte</i> verwendet werden.</li></ul></li></ul>
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.

## 50-202: Keine Netzwerkverbindung zwischen TDC und MRT

<b>Bedingung</b>	Die TDC hat die Netzwerkverbindung zum MRT verloren.
<b>Fehlercode</b>	50-202
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob:</b> Der Benutzer kann kein SAG T2-Bild laden.</p> <p><b>Detailliert:</b> Der Benutzer kann keine AX T2-Bilder laden. TDC kann keine TUV-Bilder empfangen.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung kann nicht gestartet werden, oder die Initialisierung wird angehalten.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vergewissern Sie sich, dass der TDC-Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem entsprechenden Switch verbunden ist.</li><li>2. Pingen Sie vom TDC-Computer zum MRT-Host, und vergewissern Sie sich, dass eine Netzwerkverbindung besteht.</li><li>3. Das Ethernet-Kabel zwischen TDC und Switch abziehen, wieder anschließen und eine Minute lang warten, bevor Sie fortfahren.</li><li>4. Starten Sie den MRT neu, wenn alles andere fehlschlägt.</li></ol>
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	Gehen Sie zu jedem Zeitpunkt durch den normalen Arbeitsablauf.

## 50-203: Verzögerung beim Empfang des Thermometriebildes

<b>Bedingung</b>	Das Thermometriebild wird langsamer als normal empfangen (länger als die typischen 5 bis 6 Sekunden).	
<b>Fehlercode</b>	50-203	
<b>Verzögerung</b>	1,3-fache MR-Abtastperiode	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Detailliert:</b> TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergewissern Sie sich, dass TDC- und MRT-Host genügend Computerressourcen zur Verfügung haben, indem Sie alle nicht erforderlichen Programme bzw. Vorgänge wie z. B. Antivirenprogramme, Windows-Updates, Internetbrowser oder Bildabfragen beenden.</li> <li>2. <i>Bei MRT-Systemen von Philips müssen sowohl TDC- als auch MRT-Host vom Haupt-Krankenhausnetzwerk isoliert sein. Um dies zu kontrollieren, exportieren Sie das Planungsbild in das PACS und überprüfen Sie, ob dies fehlschlägt.</i></li> <li>3. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechende TULSA-PRO® Sequenz und die entsprechenden Parameter für die Thermometrieerfassung verwendet werden.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stoppen Sie die MRT.</li> <li>2. Starten Sie die Thermometriesequenz mit der entsprechenden dynamischen Anzahl neu. Der Alarm wird gelöscht, wenn der nächste Thermometriescan empfangen wird.</li> </ol>
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Initialisierung und MRT stoppen.</li> <li>2. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>3. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>4. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie zum Fortsetzen der Erwärmung auf <b>Erwärmung fortsetzen</b>. Der Alarm wird gelöscht, wenn der nächste Thermometriescan empfangen wird.</li> </ol>

## 50-204: TDC hat in den letzten 30 Sekunden keine neuen Thermometriebilder erhalten

<b>Bedingung</b>	In den letzten 30 Sekunden wurde kein neues Thermometriebild empfangen.
<b>Fehlercode</b>	50-204
<b>Verzögerung</b>	5-fache MR-Abtastperiode
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Detailliert:</b> TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT, und die Initialisierung wird beendet.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vergewissern Sie sich, dass die Thermometriesequenz auf dem MRT ausgeführt wird und für den durchzuführenden Thermometrie-Scan eine ausreichende Dynamik ausgewählt wurde. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Siemens: 26 Dynamiken für „Detailliert“, mindestens 800 Dynamiken für „Wärmezufuhr“</b></li> <li><b>Philips: 25 Dynamiken für „Detailliert“, mindestens 1200 Dynamiken für „Wärmezufuhr“</b></li> </ul> </li> <li>Vergewissern Sie sich, dass MRT- und TDC-Computer weiterhin über ihre Netzwerkverbindung kommunizieren können, indem Sie den Status des MRT-Subsystems im Arbeitsbereich <i>Einrichtung</i> überprüfen.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die entsprechende TULSA-PRO® Sequenz und die entsprechenden Parameter für die Thermometrieerfassung verwendet werden.</li> </ol>

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu. Der Alarm wird gelöscht, sobald das neue Bild empfangen wird.
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu. Der Alarm wird gelöscht, sobald das neue Bild empfangen wird.</li> </ol>
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen.</li> <li>Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu. Der Alarm wird gelöscht, sobald das neue Bild empfangen wird.</li> </ol>

## 50-209: Thermometriebilder nicht verwendbar

<b>Bedingung</b>	Die Thermometriebilder sind beschädigt und können nicht mehr verwendet werden. Es wird eine Patientenbewegung oder ein MRT-Artefakt vermutet.
<b>Fehlercode</b>	50-209
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob:</b> Entfällt. Bedingung und Alarm treten nicht auf.</p> <p><b>Detailliert:</b> TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT, und die Initialisierung wird beendet.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollieren Sie die THERM-Bilder auf Gewebeverschiebungen außerhalb des Behandlungsbereichs (z. B. Blasenfüllung, Stuhlgang, Blähungen).</li> <li>2. Vergewissern Sie sich, dass sich der Patient während der Verabreichung nicht bewegt hat. Klären Sie mit dem Anästhesisten ab, dass der Patient das richtige Medikament in ordnungsgemäßer Dosierung und zum richtigen Zeitpunkt erhalten hat. Der Anästhesist entscheidet über eine eventuell erforderliche Medikamentennachgabe.</li> <li>3. Vergewissern Sie sich, dass in den MRT-Bildern keine HF-Störungen auftreten (z. B. nicht-MRT-kompatible Geräte im Technikraum, intermittierende elektrische Verbindung)</li> <li>4. Prüfen Sie die THERM-Bilder auf Phasenumlauf in Richtung A&gt;P.</li> </ol> <p>Der Alarm wird gelöscht, sobald neue Thermometriebilder empfangen werden.</p>

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.	
	<b>AUSRICHTUNG</b>		
	<b>GROB</b>		
	<b>DETAILLIERT</b>	Nehmen Sie einen neuen Thermometrie-Scan auf.	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>2. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>3. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu. Der Alarm wird gelöscht, sobald das neue Bild empfangen wird.</li> </ol>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Bei Vermutung von Patientenbewegung, Gewebebewegung, Blasenfüllung, Darmgas oder Darmbewegung:	Wenn die Ursache des MRT-Störsignals HF war:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>.</li> <li>2. Gehen Sie zurück zu <i>Ausrichtung</i>.</li> <li>3. Entsperren Sie den UA.</li> <li>4. Nehmen Sie ein neues SAG T2-Bild auf.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>.</li> <li>2. Gehen Sie zurück zu <i>Detaillierte Planung</i>.</li> </ol>	

		<p>5. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf bis zu <i>Wärmezufuhr</i> fort.</p>	<p>3. Nehmen Sie TUV erneut auf. 4. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf bis zu <i>Wärmezufuhr</i> fort.</p>
--	--	---	---

In beiden Fällen wird der Alarm gelöscht, nachdem Sie auf **Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern** geklickt haben.



## 50-211: Thermometrie-Scan entspricht nicht der vorgeschriebenen Bildposition bzw. -ausrichtung

<b>Bedingung</b>	Es besteht eine Diskrepanz zwischen dem Ort, an dem die Thermometriemessung erfasst wurde, und dem Punkt, an dem die TDC eine vorgenommene Thermometriemessung annimmt.
<b>Fehlercode</b>	50-211
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Detailliert:</b> TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT, und die Initialisierung wird beendet.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Entfällt.</p>

**Behebung der Ursache** Vergewissern Sie sich, dass die Informationen zu Position und Ausrichtung der Temperaturmessung für den MRT-Scan korrekt eingerichtet wurden.



**HINWEIS:** Dieser Alarm wird nur angezeigt, wenn TULSA-PRO® mit einem Siemens MRT verwendet wird.

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	<p>Bestätigen Sie, dass der letzte Scan auf dem MRT mit dem in die TDC-Grobplanung importierten letzten Scan übereinstimmt.</p> <p><i>Bei nicht ordnungsgemäßer Durchführung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Importieren Sie das neueste SAG T2 in die Registerkarte <i>Ausrichtungsplanung</i> in der TDC.</li> <li>2. Passen Sie bei Bedarf durch Auswahl von <b>UA entsperren</b> die UA-Position an. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.</li> <li>3. Öffnen Sie die THERM-Messung mit der MRT-Software.</li> <li>4. Kopieren Sie die Tischposition aus dem zuletzt erfassten SAG T2-Scan.</li> <li>5. Klicken Sie in <i>Detaillierte Planung</i> auf <b>Aktualisieren</b>.</li> <li>6. Stellen Sie die Anzahl der Dynamiken auf 1 ein.</li> <li>7. Führen Sie die Thermometriesequenz aus.</li> <li>8. Wiederholen Sie die Sequenz und setzen Sie die Anzahl der Dynamiken auf 26.</li> <li>9. Vergewissern Sie sich, dass die aktivierten Spulen zwischen dem Referenzscan (1 dynamisch) und dem größeren dynamischen Scan identisch sind.</li> </ol> <p>Der Alarm wird gelöscht, wenn Bilder mit der richtigen THERM-Position und -Ausrichtung empfangen werden.</p>

	<p><b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie den THERM-Scan mit der Siemens MRT-Software.</li> <li>2. Kopieren Sie die Tischposition aus dem zuletzt erfassten SAG T2-Scan.</li> <li>3. Klicken Sie im Arbeitsbereich <i>Wärmezufuhr</i> auf <b>Aktualisieren</b>.</li> <li>4. Stellen Sie die Anzahl der Dynamiken auf 1 ein.</li> <li>5. Führen Sie die Thermometriesequenz aus.</li> <li>6. Wiederholen Sie die Sequenz und ändern Sie die Anzahl der Dynamiken auf den maximal verfügbaren Wert.</li> <li>7. Vergewissern Sie sich, dass die aktivierten Spulen zwischen dem Referenzscan (1 dynamisch) und dem größeren dynamischen Scan identisch sind.</li> <li>8. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>9. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>10. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu. Der Alarm wird gelöscht, sobald das neue Bild empfangen wird.</li> </ol>
	<p><b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b></p>	<p>Entfällt.</p>

## 50-212: Parameter der Thermometriesequenz geändert und außerhalb des Bereichs

<b>Bedingung</b>	Die Sequenzparameter der Thermometrie wurden geändert und entsprechen nicht mehr dem Standardwert.	
<b>Fehlercode</b>	50-212	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Detailliert:</b> TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT, und die Initialisierung wird beendet.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Entfällt.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laden Sie die Sequenz erneut von der ExamCard, um die ursprünglichen Standardwerte wiederherzustellen.</li> <li>2. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter von Profound Medical, falls das Problem weiterhin auftritt.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	Führen Sie die MRT-Sequenz erneut aus. Der Alarm wird gelöscht, sobald das erste Bild in der richtigen Sequenz empfangen wird.
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Entfällt.


### 50-213: Thermometriebilder nicht verwendbar

<b>Bedingung</b>	Die nach 100 Dynamiken berechnete Bildverschiebung ist für jede Schicht größer als 1 mm in Frequenzkodierichtung bzw. 2 mm in Phasenkodierichtung.
<b>Fehlercode</b>	50-213
<b>Verzögerung</b>	Alle 100 Bilddynamiken
<b>Systemantwort</b>	<b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert – Initialisierung:</b> Keine Systemantwort. <b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.
<b>Behebung der Ursache</b>	In jeder Phase: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollieren Sie die THERM-Bilder auf Gewebeverschiebungen außerhalb des Behandlungsbereichs (z. B. Blasenfüllung, Stuhlgang, Blähungen).</li> <li>2. Vergewissern Sie sich, dass sich der Patient während der Verabreichung nicht bewegt hat. Klären Sie mit dem Anästhesisten ab, dass der Patient das richtige Medikament in ordnungsgemäßer Dosierung und zum richtigen Zeitpunkt erhalten hat. Der Anästhesist entscheidet über eine eventuell erforderliche Medikamentennachgabe.</li> <li>3. Vergewissern Sie sich, dass in den MRT-Bildern keine HF-Störungen auftreten (z. B. nicht-MRT-kompatible Geräte im Technikraum, intermittierende elektrische Verbindung)</li> <li>4. Prüfen Sie die THERM-Bilder auf Phasenumlauf in Richtung A&gt;P.</li> </ol> Der Alarm wird gelöscht, sobald neue Thermometriebilder empfangen werden.

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.	
	<b>AUSRICHTUNG</b>		
	<b>GROB</b>		
	<b>DETAILLIERT</b>	Nehmen Sie einen neuen Thermometrie-Scan auf.	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	1. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b> . 2. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein. 3. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu. Der Alarm wird gelöscht, sobald das neue Bild empfangen wird.	
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Bei Vermutung von Patientenbewegung, Gewebebewegung, Blasenfüllung, Darmgas oder Darmbewegung: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>.</li> <li>2. Gehen Sie zurück zu <i>Ausrichtung</i>.</li> <li>3. Entsperren Sie den UA.</li> <li>4. Nehmen Sie ein neues SAG T2-Bild auf.</li> </ol>	Wenn die Ursache des MRT-Störsignals HF war: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>.</li> <li>2. Gehen Sie zurück zu <i>Detaillierte Planung</i>.</li> <li>3. Nehmen Sie TUV erneut auf.</li> </ol>

		5. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf bis zu <i>Wärmezufuhr</i> fort.	4. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf bis zu <i>Wärmezufuhr</i> fort.
		In beiden Fällen wird der Alarm gelöscht, sobald der Benutzer auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b> klickt.	

## 50-214: Für die Ausrichtung erforderlicher Anatomie-Scan ist älter als 2 Stunden

<b>Bedingung</b>	Nur wenn <b>nicht</b> in <b>Wärmezufuhr – Ablation</b> : Das zum Festlegen der Position des Ultraschallapplikators (UA) verwendete SAG T2-Behandlungsplanungsbild ist nicht vertrauenswürdig. Zum Bestätigen der UA-Position im MRT-Bild ist ein neues SAG T2-Bild erforderlich.
<b>Fehlercode</b>	50-214
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung kann nicht gestartet werden.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Entfällt. Bedingung und Alarm treten nicht auf.</p>
<b>Behebung der Ursache</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Den Arbeitsbereich <i>Ausrichtung</i> entsperren, einen neuen SAG T2-Scan aufnehmen und diesen dann in den TDC importieren.</li> <li>Bei Bedarf neu ausrichten.</li> </ol> <p> <b>HINWEIS:</b> Bei einer erforderlichen Neuausrichtung müssen Sie während <b>Detaillierte Planung</b> zwingend neue TUV- und AX T2-Scans aufnehmen.</p> <p>Der Alarm wird gelöscht, sobald ein neues SAG T2-Bild in die TDC-Software geladen wird.</p>

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Entfällt.

### 50-215: Überprüfen, ob sich der Patient in der Position „Kopf zuerst, Rückenlage“ befindet

<b>Bedingung</b>	Die Patientenausrichtung ist nicht „Kopf-zuerst, Rückenlage“ und wurde während der Patientenregistrierung falsch eingestellt.	
<b>Fehlercode</b>	50-215	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Detailliert:</b> TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die TDC stoppt die Verarbeitung von Thermometriebildern aus der MRT, und die Initialisierung wird beendet.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Entfällt. Bedingung und Alarm treten nicht auf.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	Der Patient muss auf der MRT-Konsole mit der richtigen Patientenpositionsausrichtung (Kopf zuerst – Rückenlage) neu registriert werden, oder die MRT-Konfiguration ist entsprechend anzupassen.	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Entfällt.



### B.3. Positionierungssystem

#### 10-102: Keine Netzwerkverbindung zwischen TDC und Schnittstellenbox des Positionierungssystems

<b>Bedingung</b>	Die Netzwerkverbindung der Schnittstellenbox des Positionierungssystems (PSIB) wurde unterbrochen, und die TDC-Software kann nicht mehr mit dem PSIB kommunizieren.	
<b>Fehlercode</b>	10-102	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> Der Benutzer kann nicht mit der Ausrichtung fortfahren.</p> <p><b>Ausrichtung:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Grob:</b> Der Benutzer kann den Ultraschallapplikator (UA) nicht mit der linearen Roboterachse in Translationsrichtung bewegen.</p> <p><b>Detailliert:</b> Der Benutzer kann den UA nicht mit der Rotationsachse des Roboters drehen. Der Benutzer kann weiterhin mit „Wärmezufuhr“ fortfahren.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergewissern Sie sich, dass die Systemelektronik (SE) an eine Steckdose angeschlossen und der Netzschalter eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob die Verbindung wiederhergestellt wurde.</li> <li>2. Vergewissern Sie sich, dass ein Ethernet-Kabel die TDC mit der SE verbindet. Überprüfen Sie, ob die Verbindung wiederhergestellt wurde.</li> <li>3. Vergewissern Sie sich, dass beide HF-Kabel (Systemelektronik zur Filterbox und Filterbox-zur PSIB) angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob die Verbindung wiederhergestellt wurde.</li> <li>4. Das Ethernet-Kabel zwischen TDC und SE abziehen, wieder anschließen und eine Minute lang warten, bevor Sie fortfahren. Überprüfen Sie, ob die Verbindung wiederhergestellt wurde.</li> <li>5. Schalten Sie das SE-System aus. Das weiße HF-Kabel an der PSIB abziehen, eine Minute lang warten, und es dann wieder anschließen. Schalten Sie das SE-System ein. Überprüfen Sie, ob die Verbindung wiederhergestellt wurde.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Prüfen Sie, ob die UA-Rotationsachse noch zentriert ist. Wiederholen Sie die UA-Initialisierung im Arbeitsbereich <i>Einrichtung</i> , falls die Initialisierung verloren gegangen ist. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>GROB</b>	Die erforderliche lineare Bewegung des UA mit der linearen Roboterachse durchführen (falls erforderlich) und mit <i>Detaillierte Planung</i> fortfahren.
	<b>DETAILLIERT</b>	Prüfen Sie, ob die UA-Rotationsachse noch zentriert ist. Wiederholen Sie die UA-Initialisierung im Arbeitsbereich <i>Einrichtung</i> , falls die Initialisierung verloren gegangen ist. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Klicken Sie zum Fortsetzen der Behandlung in der TDC auf <b>Erwärmung fortsetzen</b> .

## 20-102: Kabel zwischen Positionierungssystem (PS) und PS-Schnittstellenbox getrennt

<b>Bedingung</b>	Das Kabel des Positioniersystems (PS) ist von der PS-Schnittstellenbox (PSIB) getrennt.
<b>Fehlercode</b>	20-102
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> Der Benutzer kann <b>PS prüfen</b> oder <b>UA referenzieren</b> nicht testen</p> <p><b>Ausrichtung:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Grob:</b> Der Benutzer kann die lineare Position des UA nicht mit der linearen Roboterachse anpassen.</p> <p><b>Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung kann nicht gestartet werden, oder die Initialisierung wird angehalten.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>
<b>Behebung der Ursache</b>	Überprüfen Sie auf jeden Fall, ob das PS-Kabel fest in der PSIB sitzt. Kontrollieren Sie, ob die Verbindung wiederhergestellt wurde. Entfernen Sie das PS-Kabel, falls immer noch keine Verbindung angezeigt wird, warten Sie eine Minute lang und schließen Sie es dann wieder an.

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehren Sie zu <i>Einrichtung</i> zurück.</li> <li>2. Entsperrten Sie den UA.</li> <li>3. Zentrieren Sie den UA.</li> <li>4. Laden Sie das zuletzt aufgenommene SAG T2-Bild in <i>Ausrichtung</i>.</li> <li>5. Richten Sie den UA aus.</li> <li>6. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.</li> </ol>
	<b>GROB</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehren Sie zu <i>Einrichtung</i> zurück.</li> <li>2. Entsperrten Sie den UA.</li> <li>3. Zentrieren Sie den UA.</li> <li>4. Laden Sie das zuletzt aufgenommene SAG T2-Bild in <i>Ausrichtung</i>. Der UA wird von der Software automatisch registriert.</li> <li>5. Wählen Sie <b>UA registrieren</b>.</li> <li>6. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.</li> </ol>
	<b>DETAILLIERT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehren Sie zu <i>Einrichtung</i> zurück.</li> <li>2. Entsperrten Sie den UA.</li> <li>3. Zentrieren Sie den UA.</li> <li>4. Laden Sie das zuletzt aufgenommene SAG T2-Bild in <i>Ausrichtung</i>. Der UA wird von der Software automatisch registriert.</li> <li>5. Wählen Sie <b>UA registrieren</b>. Den UA nicht in <i>Grobe Planung</i> verschieben, sondern stattdessen <b>Position akzeptieren</b> auswählen.</li> <li>6. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.</li> </ol>

<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehren Sie zu <i>Einrichtung</i> zurück.</li> <li>2. Entsperren Sie den UA.</li> <li>3. Zentrieren Sie den UA.</li> <li>4. Laden Sie das zuletzt aufgenommene SAG T2-Bild in Ausrichtung. Der UA wird von der Software automatisch registriert.</li> <li>5. Wählen Sie <b>UA registrieren</b>.</li> <li>6. Den UA nicht in <i>Grobe Planung</i> verschieben, sondern stattdessen <b>Position akzeptieren</b> auswählen.</li> <li>7. Bestätigen Sie die Behandlungsplanung. Sie müssen keine neuen TUV- oder AX T2-Bilder aufnehmen.</li> <li>8. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.</li> </ol>
<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>.</li> <li>2. Kehren Sie zu <i>Einrichtung</i> zurück.</li> <li>3. Entsperren Sie den UA.</li> <li>4. Zentrieren Sie den UA.</li> <li>5. Laden Sie das zuletzt aufgenommene SAG T2-Bild in Ausrichtung. Der UA wird von der Software automatisch registriert.</li> <li>6. Wählen Sie <b>UA registrieren</b>.</li> <li>7. Den UA nicht in „Grobe Planung“ verschieben, sondern stattdessen <b>Position akzeptieren</b> auswählen.</li> <li>8. Bestätigen Sie die Behandlungsplanung. Sie müssen keine neuen TUV- oder AX T2-Bilder aufnehmen.</li> <li>9. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.</li> </ol>

## 20-201: Problem mit der Drehbewegung

<b>Bedingung</b>	Ein Drehbewegungsfehler ist aufgetreten.	
<b>Fehlercode</b>	20-201	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> „PS-Test“ oder „Rotationsausgangsposition“ wird angehalten.</p> <p><b>Ausrichtung, Grob:</b> Entfällt. Bedingung und Alarm treten nicht auf.</p> <p><b>Detailliert:</b> Der Ultraschallapplikator (UA) erreicht nicht die vorgesehene Startposition.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Entfällt. Bedingung und Alarm treten nicht auf.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollieren Sie, ob das Positionierungssystem (PS) den UA an der Drehung hindert. Mögliche Ursachen: <ul style="list-style-type: none"> <li>UA- und/oder ECD-Flüssigkeitsleitungen haben sich um das PS gewickelt.</li> <li>Eine der Flüssigkeitsleitungen wird durch Tücher oder anderes Zubehör behindert.</li> <li>Das UA-Kabel ist zu kurz und lässt keine freie Drehung des UA zu.</li> </ul> </li> <li>Zur Zugentlastung des UA-Kabels das UA-Kabel am PSIB-Ende abziehen, abwickeln und wieder anschließen.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	Wiederholen Sie die Drehbewegung. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Klicken Sie zum Fortsetzen der Behandlung in der TDC auf <b>Erwärmung fortsetzen</b> . Der Alarm wird gelöscht und die Behandlung fortgesetzt.

## 20-202: TDC-Computer ausgelastet, kann Thermometriebilder nicht schnell genug verarbeiten

<b>Bedingung</b>	Das Positionierungssystem (PS) empfängt neue Hardwarebefehle langsamer als gewöhnlich, da die TDC die Bilder nicht schnell genug verarbeitet.	
<b>Fehlercode</b>	20-202	
<b>Verzögerung</b>	8 Sekunden	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert – Initialisierung:</b> Entfällt. Bedingung und Alarm treten nicht auf.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	Die TDC muss stets Zugriff auf genügend Computerressourcen haben. Beenden Sie deswegen alle nicht erforderlichen Programme wie z. B. Antivirenprogramme, Windows-Updates oder Internetbrowser.	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Klicken Sie in der TDC auf <b>Erwärmung fortsetzen</b> . Der Alarm wird gelöscht und die Behandlung fortgesetzt.

## 20-203: Fehler bei der Kommunikation mit dem Positionierungssystem

<b>Bedingung</b>	Bei einem Bewegungsregler trat ein Kommunikationsfehler mit der Schnittstellenbox des Positionierungssystem (PSIB) auf, wodurch die Bewegung gestoppt wurde.	
<b>Fehlercode</b>	20-203	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	Das Problem wird von der TDC in jedem Stadium automatisch behoben. Sie müssen keine Aktion ausführen.	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Klicken Sie in der TDC auf <b>Erwärmung fortsetzen</b> . Der Alarm wird gelöscht und die Behandlung fortgesetzt.

## 21-201: Lineare Achse des Positionierungssystems unerwartet verschoben

<b>Bedingung</b>	Die lineare Achse des Positionierungssystems (PS) hat sich unerwartet verschoben und der Ultraschallapplikator (UA) ist nicht mehr für das MRT-Bild registriert.
<b>Fehlercode</b>	21-201
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung kann nicht gestartet werden, oder die Initialisierung wird angehalten.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>Die automatisierte lineare Achse hat sich in jeder Phase unerwartet von der zuletzt angeforderten linearen Position bewegt. Der UA ist nicht mehr für das MRT-Bild registriert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergewissern Sie sich, dass keine zusätzliche Kraft auf die lineare Roboterachse des PS ausgeübt wird.</li> <li>2. Vergewissern Sie sich, dass sich der Patient nicht bewegt.</li> </ol>

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie eine neue SAG T2 auf.</li> <li>2. Wählen Sie in der Auswahl <b>Anatomy</b> (Anatomie) die neue SAG T2 aus, um den UA ein zweites Mal auszurichten. Der Alarm wird gelöscht, sobald ein neues SAG T2-Bild aufgenommen wurde.</li> <li>3. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort, um zu <i>Wärmezufuhr</i> zurückzukehren.</li> </ol>
	<b>GROB</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entsperren Sie den UA auf der Registerkarte <i>Ausrichtung</i>.</li> </ol>
	<b>DETAILLIERT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Nehmen Sie eine neue SAG T2 auf.</li> <li>3. Wechseln Sie zur Auswahl <b>Anatomie</b> und wählen Sie die neue SAG T2, um den UA ein zweites Mal auszurichten. Der Alarm wird gelöscht, sobald ein neues Bild aufgenommen wurde.</li> </ol>
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort, um zu <i>Wärmezufuhr</i> zurückzukehren.</li> </ol>
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellen Sie ein neues Segment.</li> <li>2. Entsperren Sie den UA auf der Registerkarte <i>Ausrichtung</i>.</li> <li>3. Nehmen Sie eine neue SAG T2 auf.</li> <li>4. Wechseln Sie zur Auswahl <b>Anatomie</b> und wählen Sie die neue SAG T2, um den UA ein zweites Mal auszurichten. Der Alarm wird gelöscht, sobald ein neues Bild aufgenommen wurde.</li> <li>5. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort, um zu <i>Wärmezufuhr</i> zurückzukehren.</li> </ol>



## 22-201: Positionierungssystem dreht Ultraschallapplikator nicht mit erwarteter Geschwindigkeit

<b>Bedingung</b>	Das Positionierungssystem dreht den Ultraschallapplikator nicht mit der erwarteten Geschwindigkeit.
<b>Fehlercode</b>	22-201
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert – Initialisierung:</b> Entfällt. Bedingung und Alarm treten nicht auf. <b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.

- Behebung der Ursache** In jeder Phase:
- Vergewissern Sie sich, dass nichts das PS daran hindert, den UA frei zu drehen. Mögliche Ursachen:
    - UA- und/oder ECD-Flüssigkeitsleitungen haben sich um das PS gewickelt.
    - Eine der Flüssigkeitsleitungen wird durch Tücher oder anderes Zubehör behindert.
    - Das UA-Kabel ist zu kurz und lässt keine freie Drehung des UA zu.
      - Zur Zugentlastung des UA-Kabels das UA-Kabel am PSIB-Ende abziehen, abwickeln und wieder anschließen.
  - Auch wenn der Alarm ungewöhnlich ist, kann er aufgrund einer Hardware-Fehlfunktion ausgelöst werden. Wenden Sie sich an den PMI-Support, wenn Sie diesen Alarm weiterhin erhalten.

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Klicken Sie in der TDC auf <b>Erwärmung fortsetzen</b> . Der Alarm wird gelöscht und die Behandlung fortgesetzt.

## 22-202: Rotationsausgangsposition verlorengegangen

<b>Bedingung</b>	Der Ultraschallapplikator (UA) sitzt nicht richtig im Greifer des Positionierungssystems (PS) bzw. der PS-Schnittstellenbox (PSIB), wodurch die bekannte Position verloren ging.	
<b>Fehlercode</b>	22-202	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Detailliert:</b> Der Benutzer kann den UA nicht mit der Rotationsachse des Roboters drehen. Der Benutzer kann weiterhin mit „Wärmezufuhr“ fortfahren.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung kann nicht gestartet werden, oder die Initialisierung wird angehalten.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergewissern Sie sich, dass der UA richtig im PS-Greifer sitzt. Öffnen Sie gegebenenfalls den PS-Greifer und fixieren Sie den UA wieder.</li> <li>2. Vergewissern Sie sich, dass das PS mit der PSIB kommunizieren kann, indem Sie den Status des UA im Arbeitsbereich <i>Einrichtung</i> überprüfen. Gegebenenfalls das Kabel zwischen PS und PSIB abziehen, wieder anschließen und eine Minute lang warten.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	1. Navigieren Sie zum Arbeitsbereich <i>Einrichtung</i> und wählen Sie <b>UA entsperren</b> aus. Zentrieren Sie den UA. Der Alarm wird gelöscht.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	Wenn sich der UA vom PS gelöst hat:
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie einen neuen SAG T2-Scan auf.</li> <li>2. Laden Sie die neueste SAG T2-Sequenz in die Auswahl <b>Anatomie</b>.</li> <li>3. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.</li> </ol>
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellen Sie ein neues Segment.</li> <li>2. Navigieren Sie zum Arbeitsbereich <i>Einrichtung</i> und wählen Sie <b>UA entsperren</b> aus.</li> <li>3. Zentrieren Sie den UA. Der Alarm wird gelöscht.</li> </ol> <p>Wenn sich der UA vom PS gelöst hat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nehmen Sie einen neuen SAG T2-Scan auf.</li> <li>2. Laden Sie die neueste SAG T2-Sequenz in die Auswahl <b>Anatomie</b>.</li> <li>3. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.</li> </ol>

## 22-206: Ultraschallapplikator (UA) zu weit in eine Richtung gedreht

<b>Bedingung</b>	Der Ultraschallapplikator (UA) hat sich zu weit in eine Richtung gedreht. Der UA muss abgewickelt werden, um mit der Erwärmung fortzufahren.	
<b>Fehlercode</b>	22-206	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung kann nicht gestartet werden.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p><b>In Wärmezufuhr:</b> Der Ultraschallapplikator (UA) hat sich zu weit in eine Richtung gedreht. Durch Klicken auf <b>UA abrollen</b> wird der UA abgewickelt. Nach dem Abwickeln kann der Benutzer die Behandlung in derselben Behandlungsrichtung fortsetzen.</p> <p><b>In Initialisierung:</b> Verschieben Sie die mittlere Position des UA manuell im Arbeitsbereich <i>Wärmezufuhr</i> etwas auf der <u>THERM-TUV-Größe</u>. Die TDC-Anwendung erkennt das Erreichen der UA-Rotationsgrenze und ergreift die erforderlichen Maßnahmen zum Beheben des Problems.</p>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>GROB</b>	Entfällt.
	<b>DETAILLIERT</b>	Entfällt.
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	Entfällt.
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf <b>UA abrollen</b>, um den UA abzuwickeln.</li> <li>2. Klicken Sie nach Abschluss des Abwickelvorgangs auf <b>Erwärmung fortsetzen</b>, um mit der Behandlung fortzufahren. Der Alarm wird gelöscht, sobald die UA-Abwicklung abgeschlossen ist.</li> </ol>

## 22-208: Die Drehachse des Positionierungssystems hat sich unerwartet verschoben

<b>Bedingung</b>	Die Drehachse des Positionierungssystems (PS) hat sich unerwartet bewegt, und der UA-Strahl zeigt möglicherweise in eine unbeabsichtigte Richtung.	
<b>Fehlercode</b>	22-208	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung kann nicht gestartet werden.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Entfällt. Bedingung und Alarm treten nicht auf.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>Die automatisierte Drehachse hat sich in einer beliebigen Phase unerwartet aus der zuletzt angeforderten Drehposition bewegt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergewissern Sie sich, dass keine zusätzliche Kraft auf die Roboterdrehachse des PS ausgeübt wird.</li> <li>2. Vergewissern Sie sich, dass sich der Patient nicht bewegt.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Wiederholen Sie die Rotation in die Ausgangsposition im Arbeitsbereich <i>Einrichtung</i> .
	<b>AUSRICHTUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Navigieren Sie zum Arbeitsbereich <i>Einrichtung</i> und wählen Sie <b>UA entsperren</b> aus.</li> <li>2. Führen Sie die Rotation in die Ausgangsposition erneut durch.</li> <li>3. Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.</li> </ol>
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	

## B.4. Hochfrequenz

### 30-201: Not-Aus-Schalter aktiviert

<b>Bedingung</b>	Der Not-Aus-Schalter an der SE wurde gedrückt.
<b>Fehlercode</b>	30-201
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> Linear- und Rotationsachsen werden ausgeschaltet, die Ultraschallleistung für alle Elemente sowie UA- und ECD-Flüssigkeitspumpen werden abgeschaltet.</p> <p><b>Ausrichtung:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Grob:</b> Der Benutzer kann die lineare UA-Position nicht an die lineare Roboterachse anpassen.</p> <p><b>Detailliert:</b> Der Benutzer kann die UA-Rotationsposition nicht an die Rotationsachse des Roboters anpassen.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung kann nicht gestartet werden, oder die Initialisierung wird angehalten.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beheben Sie die Situation, in der der Not-Aus-Schalter gedrückt werden musste.</li><li>2. Zum Löschen des Alarms ist der Not-Aus-Schalter an der Vorderseite der SE fünf Sekunden lang <b>gedrückt zu halten</b>.</li></ol>
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	Gehen Sie zu jedem Zeitpunkt durch den normalen Arbeitsablauf.

### 30-202: TDC-Computer ausgelastet, kann Thermometriebilder nicht schnell genug verarbeiten

<b>Bedingung</b>	Die Systemelektronik (SE) hat in den letzten 8 Sekunden keinen neuen Aktualisierungsbefehl erhalten, da die TDC die Bilder nicht schnell genug verarbeitet.
<b>Fehlercode</b>	30-202
<b>Verzögerung</b>	8 Sekunden
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Entfällt. Bedingung und Alarm treten nicht auf.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.</p>
<b>Behebung der Ursache</b>	Die TDC muss stets Zugriff auf genügend Computerressourcen haben. Beenden Sie deswegen alle nicht erforderlichen Programme wie z. B. Antivirenprogramme, Windows-Updates oder Internetbrowser.

<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	Klicken Sie zum Fortsetzen der Behandlung auf <b>Erwärmung fortsetzen</b> in der TDC, wenn diese Option dort verfügbar ist.
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Setzen Sie die Behandlung fort.

### 31-201: Systemelektronikverstärker überhitzt

<b>Bedingung</b>	Ein oder mehrere Verstärker in der Systemelektronik (SE) haben sich übermäßig erwärmt.	
<b>Fehlercode</b>	31-201	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung kann nicht gestartet werden, oder die Initialisierung wird angehalten.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergewissern Sie sich, dass die vorderen und hinteren Belüftungsöffnungen der SE frei von Hindernissen sind und die Lüfter laufen. Lassen Sie die Verstärker abkühlen, bevor Sie fortfahren.</li> <li>2. Unter Umständen ist die SE (ohne das SE-Netzkabel oder die Flüssigkeitsschläuche abzuziehen) zum Maximieren der Luftzirkulation in einen offenen Raum zu verlegen.</li> <li>3. Weiterhin sollte ein Verringern der Temperatur im Raum, in dem sich die SE befindet, in Betracht gezogen werden.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>2. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>3. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>4. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie in der TDC auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen.</li> <li>2. Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>3. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>4. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>5. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>

### 31-202: Systemelektronikverstärker abgeschaltet

<b>Bedingung</b>	Ein oder mehrere Verstärker in der Systemelektronik (SE) haben sich unerwartet abgeschaltet.	
<b>Fehlercode</b>	31-202	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Entfällt. Bedingung und Alarm treten nicht auf.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	Die TDC-Anwendung muss Zugriff auf genügend Computerressourcen haben. Beenden Sie deswegen alle nicht erforderlichen Programme wie z. B. Antivirenprogramme, Windows-Updates oder Internetbrowser.	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	Entfällt.
	<b>AUSRICHTUNG</b>	
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	Klicken Sie zum Fortsetzen der Behandlung auf <b>Erwärmung fortsetzen</b> in der TDC, wenn diese Option dort verfügbar ist.
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	Setzen Sie die Behandlung fort.



### 32-102: Keine Netzwerkverbindung zwischen TDC und Systemelektronik

<b>Bedingung</b>	Die Netzwerkverbindung der Systemelektronik (SE) wurde unterbrochen.	
<b>Fehlercode</b>	32-102	
<b>Verzögerung</b>	direkt	
<b>Systemantwort</b>	<p><b>Einrichtung:</b> UA- und ECD-Spülung werden abgebrochen. HF-Test kann nicht durchgeführt werden.</p> <p><b>Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Initialisierung kann nicht gestartet werden, oder die Initialisierung wird angehalten.</p> <p><b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird unterbrochen.</p>	
<b>Behebung der Ursache</b>	<p>In jeder Phase:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vergewissern Sie sich, dass die SE an eine Steckdose angeschlossen und der Netzschalter eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob die Verbindung wiederhergestellt wurde.</li> <li>2. Vergewissern Sie sich, dass ein Ethernet-Kabel die TDC mit der SE verbindet. Überprüfen Sie, ob die Verbindung wiederhergestellt wurde.</li> <li>3. Das Ethernet-Kabel zwischen TDC und SE abziehen, wieder anschließen und eine Minute lang warten. Überprüfen Sie, ob die Verbindung wiederhergestellt wurde.</li> <li>4. Unter Umständen ist das Ethernet-Kabel zwischen TDC und SE auszuwechseln.</li> </ol>	
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	<b>EINRICHTUNG</b>	<p>Führen Sie eine weitere UA-Spülung durch, wenn die UA-Spülung noch <u>nicht</u> abgeschlossen ist.</p> <p>Starten Sie den HF-Test, wenn die Spülung abgeschlossen ist, der HF-Test jedoch noch nicht abgeschlossen wurde.</p>
	<b>AUSRICHTUNG</b>	Fahren Sie mit dem normalen Arbeitsablauf fort.
	<b>GROB</b>	
	<b>DETAILLIERT</b>	
	<b>WÄRMEZUFUHR – INITIALISIERUNG</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>2. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>3. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>4. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu.</li> </ol>
	<b>WÄRMEZUFUHR – ABLATION</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie in der TDC auf <b>Thermometrie beenden und Behandlungsplan ändern</b>, um ein neues Behandlungssegment zu erstellen.</li> <li>2. Stoppen Sie auf der MR-Konsole die MR-Thermometriesequenz.</li> <li>3. Klicken Sie in der TDC auf <b>Start</b>.</li> <li>4. Geben Sie die Kerntemperatur des Patienten erneut ein.</li> <li>5. Starten Sie die MR-Thermometriesequenz auf der MRT-Konsole neu. Der Alarm wird gelöscht, sobald das neue Bild empfangen wird.</li> </ol>

## B.5. System

### 71-202: Nicht genügend Festplattenspeicher zum Abschließen der Sitzung

<b>Bedingung</b>	Auf der TDC-Festplatte ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. Es sind mindestens 6 GB Speicherplatz erforderlich.
<b>Fehlercode</b>	71-202
<b>Verzögerung</b>	direkt
<b>Systemantwort</b>	<b>Einrichtung, Ausrichtung, Grob, Detailliert:</b> Keine Systemantwort. <b>Wärmezufuhr – Initialisierung:</b> Die Ablation beginnt nicht. <b>Wärmezufuhr – Ablation:</b> Die Ablation wird angehalten.
<b>Behebung der Ursache</b>	Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter von Profound Medical.
<b>Schritte nach Behebung der Ursache</b>	Befolgen Sie zu jedem Zeitpunkt die Anweisungen des autorisierten Kundendienstvertreters von Profound Medical.